

# Service rapport - ved eftersyn kontrolleres flg. punkter anvist af producent WinnCare Nordic

## Badetoiletstol

Anbefalet serviceeftersyn i henhold til DS/EN ISO 17966:2016. Hjælpemidler til personlig hygiejne Anneks D.

### Kundeoplysninger

<b>Service type:</b>	Årligt eftersyn med kontrakt: <input type="checkbox"/>	Årligt eftersyn uden kontrakt: <input type="checkbox"/>	Reparation: <input type="checkbox"/> / Tid: _____
Dato: _____	Kontaktperson: _____		
Kundenummer/ordrenummer: _____	Tlf. Kontaktperson: _____		
Kunde: _____	Borgers navn: _____		
Vejnavn: _____	Tlf. Borger: _____		
Postnummer / By: _____	Værelsesnummer: _____		
E-mail: _____	Andet: _____		

<b>Type:</b>	Triton/Dual: <input type="checkbox"/>	Rise IIS/130: <input type="checkbox"/>	Hera II/140: <input type="checkbox"/>	Badetoiletstol andet mærke: _____
Serienummer: _____	Produktionsdato: _____			

### Serviceeftersyn

Kontrolpunkt	Efterset	Justeret	Repareret	Udskiftet	Bemærkninger
<b>1. Kontrolpunkter uden belastning</b>					
1.1 Løfte og tilt aktuatorer: - Aktuator monteret korrekt og kører begge veje - Stempel smurt m. tynd syrefri olie - Låsering og møtrikker er placeret korrekt - Løfte fra bund til top	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2 Hjul og bremsere: - Tjekkes om de er spændt (HUSK "Loctite" hvis løsnet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3 Ryglæn og spænder: - Intakt og sikkert spændt også gældende hvis PU-ryg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4 Sæde: - Let at fjerne og monteres - PU-overflade er intakt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.5 Armstøtte og bevægelige dele: - Sikker fastgjort, smurt og bevæges let op og ned - PU-overflade er intakt - Skruer skal være spændt (HUSK "Loctite" hvis løsnet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.6 Fodplade: - Test op/ned funktion - Test højdeindstilling og fodplader er let aftagelige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.7 Håndbetjening: - Kontroller alle funktionsknapper virker - Kontroller at alle ledninger er intakte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.8 Kontrolboks: - Kontroller alle funktionsknapper - Kontroller nødstop (hvis installeret) - Afprøv lade funktionen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.9 Stel og svejsninger: - Tjekkes for synlige revner, rust og deformationer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>2. Kontrolpunkter med vægtbelastning (SWL)</b>					
2.1 Vægtkapacitet max. SWL: _____ kg.					
2.2 Kontroller følgende: - Svejsninger for brud og deformationer - Nødstop/Nødfir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>3. Afslutning</b>					
3.1 Forefindes der en brugermanual?	Ja: <input type="checkbox"/>		Nej: <input type="checkbox"/>		
3.2 Påsæt servicemærkat for næste service!	Eftersynet er foretaget af: _____		Næste service: _____	12 måneder	