

# Brugsanvisning Tower albuestok med Derby håndgreb

## Indstilling:

Indstil albuestokken til den ønskede højde

- 1) Tryk knappen ① ind og drej underrøret lidt
- 2) Træk/skub underrøret, indtil den ønskede længde nås
- 3) Drej underrøret, så knappen sidder i det ønskede hul - sørg for at knappen er forsvarligt isat



## Vedligeholdelse:

Kontrollér regelmæssigt albuestokken og dupsko ② for skader - udskift hvis nødvendigt

Rengøring kan foretages med alle gængse- eller med ikke ætsende desinfektionsmidler såsom hospitalssprit og lignende

**Maks. brugervægt: 120 kg.**

## Mål:

- ① = 9 cm.
- ② = 21 cm.
- ③ = 11 cm.

