


Brugsanvisning Kowsky Shortline albuestok med Anatomisk håndgreb

Indstilling:


Indstil albuestokken til den ønskede højde

- 1) Træk albuestokkens låseclips **(A)** ud
- 2) Træk/skub det forlængede underrør, indtil den ønskede længde nås
- 3) Sæt albuestokkens låseclips i igen - kontrollér at låseclipsen er forsvarligt og korrekt anbragt

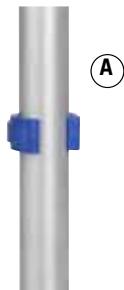

Anti-click muffe:

For at undgå click-lyde ved brug strammes muffen **(B)**

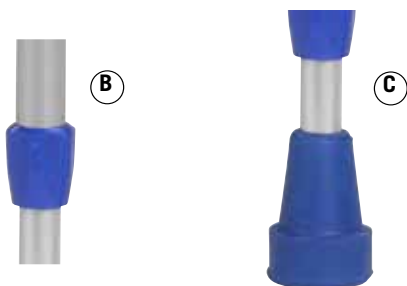

Vedligeholdelse:

Kontrollér regelmæssigt låseclips **(A)** og dupsko **(C)** for skader - udskift hvis nødvendigt

Kontrollér regelmæssigt håndtagsskruen - stram efter hvis nødvendigt

Rengøring kan foretages med alle gængse- eller med ikke ætsende desinfektionsmidler såsom hospitalssprit og lignende

Maks. brugervægt: 140 kg.

