


Brugsanvisning Kowsky gåstok med Anatomisk håndgreb - grå/sort

Indstilling:

Indstil gåstokken til den ønskede højde

- 1) Træk gåstokkens låseclips **A** ud
- 2) Træk/skub underrøret, indtil den ønskede længde nås
- 3) Sæt gåstokkens låseclips i igen - kontrollér at låseclipsen er forsvarligt og korrekt anbragt

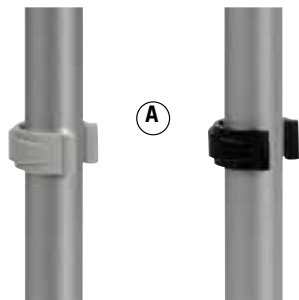

Vedligeholdelse:

Kontrollér regelmæssigt gåstokken og dupsko **B** for skader - udskift hvis nødvendigt

Rengøring kan foretages med alle gængse- eller med ikke ætsende desinfektionsmidler såsom hospitalsprit og lignende

Maks. brugervægt: 100 kg.

