

Excellent rampesystem (Shower system) i brusenicher.


Niveauforskelle i brusenicher, passer normalt ikke godt sammen med bade- og toiletstole. **MEN DET KAN DE KOMME TIL .**

Det er ikke så meget det, at få de forreste hjul over kanten og ned i "hullet", som en bruseniche jo er, men at få de bagerste hjul med. Det sidste kræver mange kræfter og er ikke helt ufarligt, da personen i rullestolen kommer til at sidde fremoverlænet, og således vil være mere udsat for at støde mod væggene etc.

Man kan naturligvis ombygge badeværelset og fjerne disse forhindringer. Hvis det kun er en midlertidig ordning eller at boligen derudover skal bringes tilbage i den oprindelige stand, er det en meget kostbar løsning.

De følgende figurer angiver nogle af de løsningsmodeller, som er mulige med Excellent rampesystem (Excellent Showersystem).

En par typiske brusenicher, her set i tværsnit.

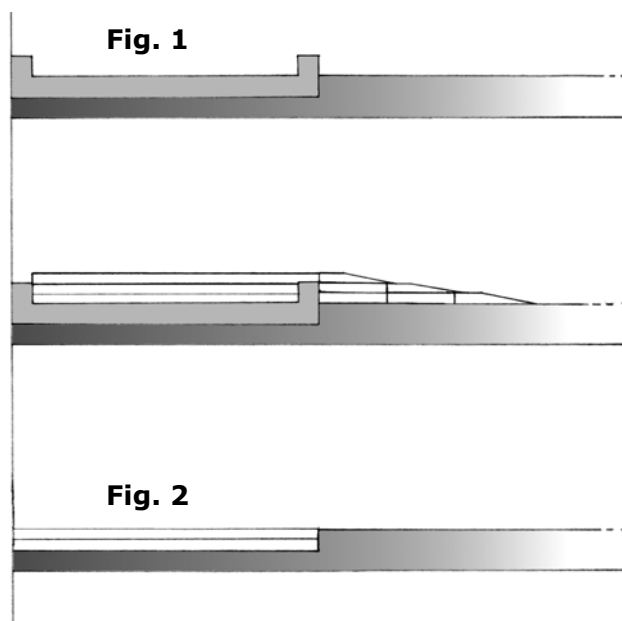

Uanset om der er tale om en "opkant" eller blot et "hul", skal dette fyldes op med flisemoduler. På fig. 1 bliver "opkanten" udjævnet med rampe-moduler.

Er der ingen "opkant", men kun et "hul", fyldes dette blot op med flise moduler.

Det er vigtigt, at fliserne ligger helt ud til kanten af brusenichen, så installationen ikke kan skride til siderne.

Fliserne tilpasses med en almindelig handsav eller med en stiksav. Det bedste er at anvende en klinge beregnet til træ.

Rengøring: Fliserne skylles med det rengøringsmiddel, der bliver brugt i husstanden, én gang om ugen. Vi anbefaler derudover, at installationen tages op nogle gange om året og rengøres på bagsiden. (*Rodalon* er et godkendt rengøringsmiddel, de fleste steder.)