

Air MASTER

Luftventilerende betræk

BRUGERVEJLEDNING



Når mobiliteten forringes...




...forbedrer vi livskvaliteten!

Vare	Art no.	Hmi no.	Produktbetegnelse	Model	Størrelse	*L/B	Vægt
	MC 0200-0090	33268	AIR MASTER Madrasbetræk Luftventilerende liggebetræk		L 200 x B 80 cm Tykkelse: 5 mm	L	560 g

* L=lagervare, hvor det kan forventes, at varen afsendes indenfor 3 arbejdsdage
B=bestillingsvare, her kan påregnes op til ca. 3 ugers leveringstid

Air MASTER

Luftventilerende betræk

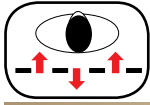

A. Anvendelse af Air MASTER



1A) Brugeren ligger i sengen og har behov for øget ventilation på madrassen samt forebyggelse af varmerelaterede symptomer. Air MASTER Madrasbetræk monteres om sengemadrassen, og skaber derved mulighed for optimal ventilation.

Vaskeanvisning

Air MASTER kan vaskes ved 80 grader C



Kun skånsom tørretumbling

Produktbeskrivelse

Air MASTER består af et specialfremstillet elastisk net med unikke luftventilerende egenskaber.

Anvendelse

Air MASTER Madrasbetræk anvendes til sengemadrassen. Den anvendes til at skabe bedre ventilation i sengen og forebygger varmerelaterede symptomer.

Fordele

- Skaber øget ventilation
- Mindsker varmeudvikling
- Giver god komfort
- Forebygger tryksår

! VIGTIGT

- Sørg hele tiden for at dette Master CARE hjælpemiddel er intakt ved jævnligt at efterse syninger.
- Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller på anden vis har skader, må det ikke benyttes.
- Er du i tvivl om brugen af dette hjælpemiddel, skal du omgående kontakte Master CARE.

! ANSVAR

- Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller u hensigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.