

# Sittsele 25030

# Badsele Nät 25035



Human Cares Sittsele 25030 är en förflyttningsssele främst tänkt för förflyttningar mellan säng, rullstol och liknande. Selen är stadig med ett förstärkt ryggstöd med två uttagbara plastlattor. Sittpositionen är upprätt vilket underlättar vid förflyttning till emepelvis rullstol. Selen kan kompletteras med Human Cares Midjebälte 25145/25146.

Human Cares Badsele 25035 liknar 25030. Den är tillverkad i nät och är tänkt att främst användas till bad och dusch. Ryggen är förstärkt med två uttagbara plastlattor. Midjebälte kan inte appliceras.

25030 och 25035 är anpassade för 2- och 3-punktsupphängning.

## Viktigt!



*Lyft och förflyttning av en person medför alltid en risk. Läs därför noga igenom bruksanvisning för både lyft och lyfttillbehör. Förvissa dig alltid om att de lyfttillbehör du använder fungerar ihop med lyften. Som vårdgivare är du ansvarig för vårdtagarens säkerhet och du måste känna till dennes möjlighet att klara lyftsituationen.*

*Lyftselen skall vara anpassad och utprovad för vårtagarens särskilda behov.*

*Vid tveksamheter kontakta leverantören.*

*Human Cares produkter vidareutvecklas och uppdateras kontinuerligt och vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar utan förvarning.*

# Innehållsförteckning

---

Säkerhetsinstruktioner	2
Skötsel och tillsyn av selen	2
Teknisk specifikation	3
Lyft från liggande	4
Lyft från sittande	5
Produkt- och tillbehörskombinationer	6
Felsökning	6
Tips	6

# Säkerhetsinstruktioner

## Viktigt att tänka på

- Kontroll av selen skall göras vid varje användningstillfälle genom noggrann visuell inspektion.
- Kontrollera att rätt sele används till vårdtagaren. Modell, storlek och material skall vara anpassade till vårdtagarens behov.
- Planera förflytningen/lyftet så att det sker på tryggast möjliga sätt.
- Kontrollera att selen är korrekt kopplad till lyften när banden är sträckta.
- Kontrollera att vårdtagaren sitter säkert i selen innan lyftet.
- Kontrollera att lyften är i balans vid förflyttning, höjning och sänkning.
- Vid förflyttning är det viktigt att inte hålla i lyftbandet, detta för att undvika att det skadas.
- Selen får endast användas för att lyfta människor.

## Periodisk inspektion

Minst var 6:e månad bör en periodisk inspektion utföras, se Human Cares protokoll för periodisk inspektion.

## Förväntad livslängd


Vid normal användning av produkten är den förväntade livslängden 1-5 år. Material, tvätt, användningsfrekvens samt belastning på produkten påverkar livslängden.

## CE-märkning

Lyftselen är CE-märkta enligt de direktiv som gäller för medicintekniska hjälpmedel. CE-märkningen är placerad på selen.

## Etikettinformation

Etiketten på selen innehåller följande information.

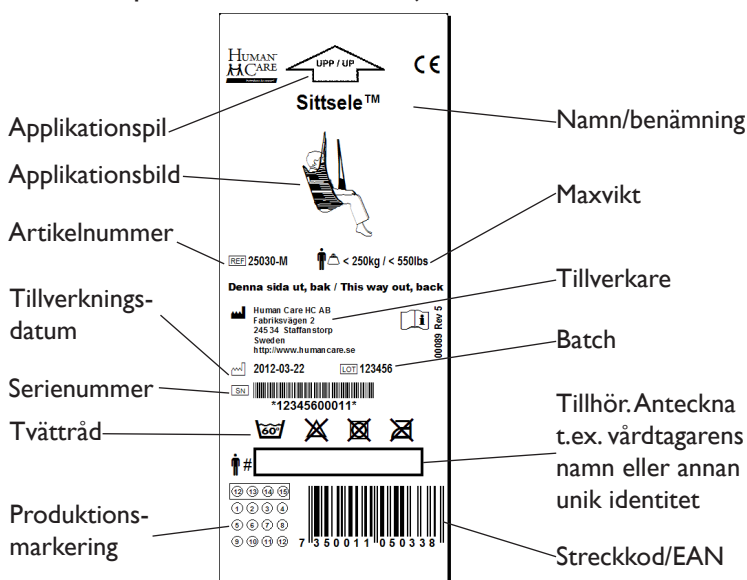

## Skötsel och tillsyn av selen

- Kontrollera selen med avseende på förslitning och nötning. Tyg, band, sömmar och öglor är viktiga att kontrollera.
- Lyfttillbehör som är skadade får ej användas.
- Tvättråd, se etikett på selen.

## Teknisk specifikation

Selen kan användas med eller utan de uttagbara plastplattorna.

### Sittsele 25030

Tyg: Polyester

Kantband: Polyester

Maxlast: 250 kg

Storlekar: JS, JM, S, M, L, XL

Tillbehör:

- Midjebälte art.nr 25145/25146


### Badsele Nät 25035

Tyg: Polyesternät

Kantband: Polyester

Maxlast: 250 kg

Storlekar: JS, JM, S, M, L, XL

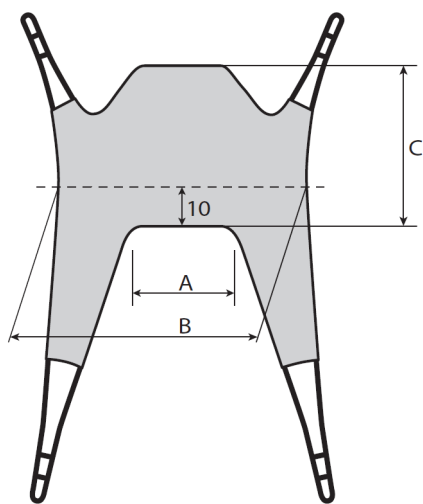

Artikel	Art. nr.	Storlek	Färgkod	A	B	C	Personvikt*	Max last
Sittsele	25030-JS	Junior small	Lila	9	54	52	15-20 kg	250 kg
Sittsele	25030-JM	Junior medium	Grå	15	60	58	20-35 kg	250 kg
Sittsele	25030-S	Small	Röd	30	75	63	30-60 kg	250 kg
Sittsele	25030-M	Medium	Gul	36	85	63	55-90 kg	250 kg
Sittsele	25030-L	Large	Grön	42	95	63	85-120 kg	250 kg
Sittsele	25030-XL	Extra large	Blå	47	102	63	110-140 kg	250 kg
Badsele	25035-JS	Junior small	Lila	9	54	52	15-20 kg	250 kg
Badsele	25035-JM	Junior medium	Grå	15	60	58	20-35 kg	250 kg
Badsele	25035-S	Small	Röd	30	75	63	30-60 kg	250 kg
Badsele	25035-M	Medium	Gul	36	85	63	55-90 kg	250 kg
Badsele	25035-L	Large	Grön	42	95	63	85-120 kg	250 kg
Badsele	25035-XL	Extra large	Blå	47	102	63	110-140 kg	250 kg

\* De angivna vikterna är endast riktlinjer och ersätter inte en individuell utprovning, avvikelser kan förekomma.

## Lyft från liggande

1



Om möjligt höj upp ryggstödet till halvsittande. För ner selen bakom ryggen till höjd med svanskotan.

*Alternativ; Lagg vårdtagaren på sidan. För in selen så att dess mitt hamnar längs ryggraden. Rulla över vårdtagaren på andra sidan och dra fram selen.*


2



Dra fram bendelarna mellan vårdtagarens ben. Sänk ner lyften i höjd med magen. Vid 3-punktsupphängning träs vänstra bendelen in i hållan på utsidan av den högra bendelen. Haka på bendelarnas lyftöglor i lyftens benkrok. Haka på ryggdelens lyftöglor i lyftbygeln. Håll undan lyften med ena handen från vårdtagarens ansikte medan du kör upp den ovanför huvudet.

*Alternativ: Selen kan även användas med tvåpunktsupphängning. Ögla på den högra bendelen används då inte. Istället korsas bendelarna.*

3

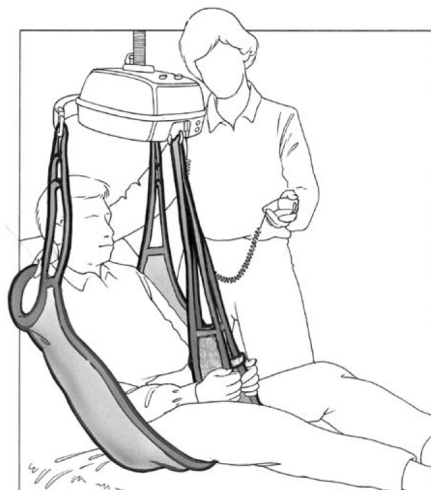

Stanna i detta läge och kontrollera att alla lyftöglorna är säkert förankrade i krokarna.

4



Fortsätt lyftet. Det kan bli nödvändigt att sänka sängen något. Lyft lite i vårdtagarens ben samtidigt som du vrider vårdtagaren från sängen. Håll gärna din arm om vårdtagaren under förflyttningen för att skapa en större trygghet.

## Lyft från sittande

1



För ner selen bakom ryggen. Selen skall ner så att dess nederkant är nere vid svanskotan. Dra fram selens bendelar.


2



Dra upp selens bendelar mellan vårdtagarens ben. Sänk ner lyften i höjd med magen. Vid 3-punktsupphängning träs vänstra bendelen in i hållan på utsidan av den högra bendelen. Haka på bendelarnas lyftöglor i lyftens benkrok. Haka på ryggselens lyftöglor i lyftbygel. Håll undan lyften med ena handen från vårdtagarens ansikte medan du kör upp den ovanför huvudet.


*Alternativ: Selen kan även användas med tvåpunktsupphängning. Ögla på den högra bendelen används då inte. Istället korsas bendelarna.*

3

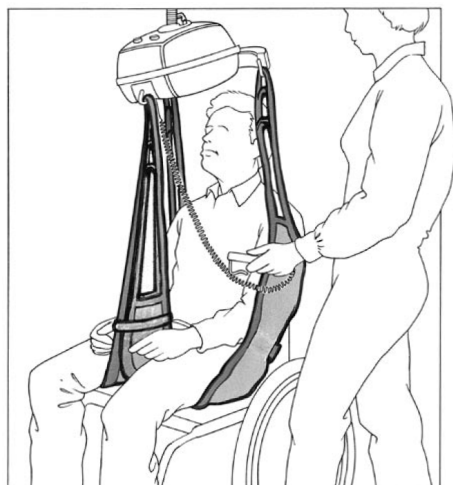

Stanna i detta läge och kontrollera att alla lyftöglorna är säkert förankrade i krokarna.

4

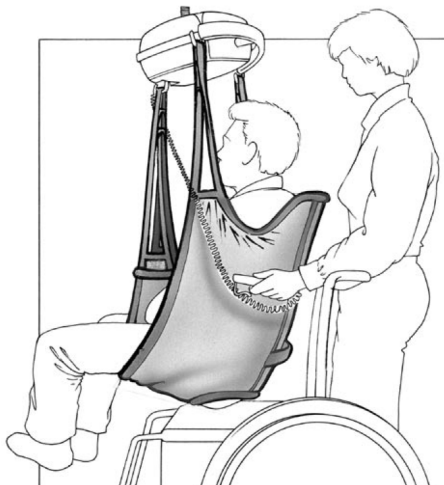

Fortsätt lyftet. Håll gärna din arm om vårdtagaren under förflyttningen då det skapar en större trygghet.

## Produkt- och tillbehörskombinationer

---

Selen passar med alla Human Cares lyftar och lyftbyglar, se [www.humancare.se](http://www.humancare.se) för information om tillbehör och produkter.

För kombinationer med lyftar av andra fabrikat än Human Care hänvisas till gällande Samarbetsavtal utgiven av HjälpmedelsCenter Väst och Hjälpmedelsinstitutet (gäller endast i Sverige).

Kombinationer av tillbehör/produkter som inte är rekommenderade av Human Care kan medföra en risk för vårdtagarens säkerhet och sker på användarens egen risk och ansvar.

## Felsökning

---

### Vårdtagaren sitter inte bra i selen?

- Vårdtagaren riskerar att glida ur - selen är inte korrekt applicerad.
- Vårdtagaren riskerar att glida ur - storleken kan vara för stor.
- Dålig lyftsymmetri - anvisningar på personligt utprovningsprotokoll har inte följts eller en ny utprovning bör göras.
- För liten storlek på selen, detta kan medföra obehag för vårdtagaren då selen kan skära in och/eller att ryggen får för lite stöd.

OBS! Det är viktigt att rätt sele används till vårdtagaren och att denna är individuellt utprovad för att passa för just dennes behov.

## Tips

---

### Kopplingsalternativ, benstöd

OBS! En individuell bedömning av vårdtagarens behov skall alltid göras innan val av kopplingsalternativ.

1. 3-punktsupphängning: den vänstra bendelen träs genom hällan på den högra bendelen. Bendelarnas lyftöglor hakas på benkroken och ryggdelarnas lyftöglor hakas på lyftbygeln.
2. 2-punktsupphängning med korsade benstöd: Öglan på den ena bendelen träs genom öglan på den andra innan de kopplas till lyftbygeln.
3. 2-punktsupphängning med benstöd omlott: exempelvis lämpligt vid lyft av vårdtagare med amputerade ben. Förlängningsöglor kan användas på lyftöglorna för att förhindra en alltför tillbakalutad sittställning.
4. 2-punktsupphängning med benstöd separat: benen placeras i varsin bendel, lyftöglorna kopplas sedan till lyftbygeln. OBS! Detta medför en ökad risk för urglidning.

**99535-Bruksanvisning Sele 25030-25035**



• Årstaängsvägen 21C, SE-117 43 Stockholm, Sweden •  
• Tel. +46(0)8 - 510 132 00 • Fax +46(0)8 - 665 35 10 •  
• [www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com) •