



**VICAIR<sup>®</sup>**

the best in body support

## MULTIFUNCTIONAL BACK

DK

Brugermanual

CE

## AVAILABLE STANDARD MODEL



Multifunctional Back

## AVAILABLE STANDARD SIZES

CM	INCH
36x45	14½x18
41x45	16½x18
46x45	18½x18
37x54	14¾x21½
40x54	16x21½
45x54	18x21½
50x54	20x21½

\* Width x Height

Specials and custom made products on request.



fig. A



fig. B

## INTRODUKTION

Før du tager din nye Vicair® Academy Multi Functional ryg i brug, bør du læse og sætte dig ind i følgende enkle, men vigtige anvisninger, så du kan få fuldt udbytte af systemet.

Ryggen er opbygget af følgende dele:

### **Pude**

Puden er opdelt i separate kamre med lynlås. Hvert kammer er fyldt med et præcist antal luftfyldte, trekantede SmartCells™. På bagsiden er der monteret velcroremme til at fastholde rygpuden på kørestolens ryg.

### **Betræk**

Betrækket er fremstillet af et komfortabelt, åndbart materiale, der er strækbart i to retninger. Betrækket lynes på puden.

## MONTERING

Vicair anbefaler, at Academy Multi Functional ryggen tilpasses og monteres i samarbejde med terapeut eller forhandler.

### **Tjek størrelsen**

Sørg for, at rygpuden har den rigtige størrelse og passer til brugeren og målene på kørestolen.

### **Montering af rygpuden på rygskaflen**

- Tag puden ud af plastikposen.
- Læg puden i rygskaflen og sørg for, at velcrobåndene passer sammen (figur A).
- Sørg for at den sorte mærkat vender nedad (figur B).

## TILPASNING

- Placer brugeren i stolen i nogle minutter for at puden tilpasser sig kroppens konturer.
- Med hjælp fra terapeut eller konsulent tilpasses rygsystemet til den ønskede position og vinkel.

### **Tjek, at brugeren ikke "går igennem" puden**

Brugers ryggrad må ikke gå igennem puden eller trykkes mod rygskallen. Dette skal tjekkes ved ibrugtagning af rygsystemet første gang og hvis der ændres i pudens fyld.

- Placer brugeren i kørestolen med det påmonterede rygsystem i ca 5 minutter.
- Mærk efter med en hånd mellem puden og ryggen.
- Sørg for, at ryggen supporteres af et godt lag af SmartCells™.
- Brug ikke rygsystemet, hvis ovenstående ikke er tilfældet. I de fleste tilfælde kan problemet løses ved at ændre på antallet af SmartCells™ i kamrene.

### **Justering af fyld**

Puden er fyldt med SmartCells™. Hvis nødvendigt, kan hårdhedsgraden af puden tilpasses enten ved at fjerne eller ilægge flere celler i kamrene.

### **Stabilitet**

Brug af Academy Multi Functional Rygsystemet kan have indflydelse på det statiske og dynamiske i kørestolen. Tjek og afprøv stolens balance og stabilitet sammen med terapeut eller forhandler.

## BRUG

### **Sørg for, der ikke opstår rødmen i huden**

Tjek jævnligt, at der ikke opstår rødmen i huden – især efter de første par dage på en ny pude. Hvis der opstår rødmen og denne ikke forsvinder efter 15 min, bør puden ikke længere benyttes. Kontakt da terapeuten eller konsulenten.

### **Brug af puden i højder**

Eftersom hver SmartCell™ er fyldt med luft, kan det forekomme, at puden bliver hård eller ikke fungerer som normalt, hvis denne medbringes i fly, hvor lufttrykket ændres. Pudens hårdhed kan evt justeres, hvis enkelte celler fjernes fra hvert kammer. Vicair anbefaler ikke, at puden benyttes ved over 2400 m over havets overflade.

### **Udskiftning af betræk**

Ved normalt brug anbefaler Vicair, at betrækket udskiftes én gang om året. Betræk til puden kan indkøbes separat hos forhandleren.

## Transport

Pt er der ikke nogle testresultater tilgængelige omkring korrekt brug af Vicair® Academy Multi Functional Rygpuden under transport. Derfor anbefaler vi, IKKE at bruge puden ved transport i bil eller bus.

## Genbrug af puden til anden bruger

Før puden genbruges til en anden bruger, er det vigtigt at puden renses og betrækket vaskes. Begge dele bør desinficeres. Sørg for, Academy Multi Functional Rygpuden tilpasses korrekt til den nye bruger.

## Brandsikring

Udsæt ikke Academy Multi Functional Rygpuden for åben ild eller høje temperaturer.

## VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING



Bemærk: Pudens må ikke autoklaveres og kan ikke modstå ekstrem varme eller tryk.

## Eftersyn

Hver 3. måned bør pudens efterses for slidtage eller ødelagte celler. I tilfælde af skade eller et større antal ødelagte celler, bør pudens ikke længere benyttes. Kontakt da forhandleren.

## Rengøring af pudens

- Aftør pudens med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. Vanskelige pletter klares ved først at fugte pletten og dernæst bruge en blød børste.
- Hvis det er nødvendigt at fjerne cellerne for at gøre pudens ren, noter da antallet af celler i hvert kammer.
- Brug ikke hårde eller slibende midler eller skarpe genstande til at rengøre pudens med.
- Læg ikke pudens i blød
- Vask ikke pude eller celler i vaskemaskine.

## Rengøring af betræk

Betrækket kan maskinvaskes. Se vaskeanvisningen på mærkaten på indersiden af betrækket.

## Disinficering af puden

Hvis puden er snavset eller skal benyttes til anden bruger, skal puden disinficeres for at undgå overførsel af bakterier.

- Rengør pude og yderbetræk som beskrevet ovenfor. Det anbefales at bruge et antibakterielt rengøringsmiddel til betrækket.
- Brug disinficerende spraymiddel til såvel betræk som pude. Sørg for, at alle kamre og hjørner af puden bliver sprayet ind- og udvendigt.

## GARANTI

Vicair tilbyder 2 års garanti mod fabrikations- og materialefejl regnet fra den oprindelige købsdato, forudsat at produktet udelukkende er anvendt efter sit formål. Ved skade opstået på baggrund af unormalt brug, eksempelvis forkert håndtering, uhensigtsmæssig rengøring eller skødesløshed frafalder garantien. Skulle en fabrikations- og materialefejl opstå inden for 2 år regnet fra den oprindelige købsdato, vil Vicair efter eget valg reparere eller bytte produktet uden beregning. Garantien omfatter ikke punktering, revner eller brandmærker. Betrækket er ligeledes ikke omfattet af garantien, men nyt betræk kan købes separat.

For yderligere produktinformation, se vores hjemmeside: [www.vicair.com](http://www.vicair.com) eller Invacares hjemmeside: [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk).

**WWW.VICAIR.COM**

**VICAIR BV  
Koetserstraat 10  
1531 NX Wormer  
The Netherlands**

**T +31(0)75 642 9999  
F +31(0)75 642 9990**

**E [info@vicair.com](mailto:info@vicair.com)**

