

Master GLIDE

Glidebrætter

BRUGERVEJLEDNING



JUNIOR



SENIOR



FLEXI



MULTI



HEAVY




GLIDESTYKKE
POLSTRET



GLIDESTYKKE
NYLON

Når mobiliteten forringes...

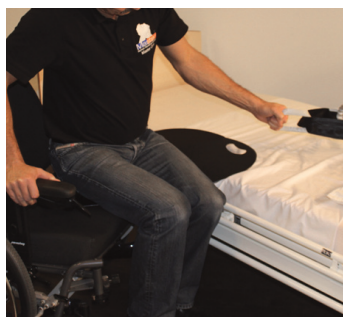


...forbedrer vi livskvaliteten!

Vare	Art no.	Hmi no.	Produktbetegnelse	Model	Størrelse	*L/B	Vægt
	MC 001-6000	36390	Master GLIDE	JUNIOR	L 40 x B 20 cm	L	380 g
	MC 001-6010	36391	Master GLIDE Small	SENIOR	L 45 x B 35 cm	L	680 g
	MC 001-6020	36392	Master GLIDE Medium	SENIOR	L 60 x B 35 cm	L	780 g
	MC 001-7000	34160	Master GLIDE Small	FLEXI	L 40 x B 35 cm	L	520 g
	MC 001-7010	33246	Master GLIDE Medium	FLEXI	L 60 x B 35 cm	L	880 g
	MC 001-7020	33247	Master GLIDE Large	FLEXI	L 75 x B 35 cm	L	1120 g
	MC 001-7026	53378	Master GLIDE Medium	MULTI	L 60 x B 35 cm	L	680 g
	MC 001-7027	53379	Master GLIDE Large	MULTI	L 70 x B 35 cm	L	780 g
	MC 001-7025	50148	Master GLIDE Glidestykke	POLSTRET	L 60 x B 38 cm	L	60 g
	MC 001-7024	61964	Master GLIDE Glidestykke	NYLON	L 60 x B 38 cm	L	40 g
	MC 001-7030	53192	Master GLIDE Small	HEAVY	L 45 x B 22 cm	L	780 g
	MC 001-7035	53193	Master GLIDE Medium	HEAVY	L 60 x B 22 cm	L	1120 g
	MC 001-7040	53194	Master GLIDE Large	HEAVY	L 70 x B 22 cm	L	1260 g

* L=lagervare, hvor det kan forventes, at varen afsendes indenfor 3 arbejdsdage
B=bestillingsvare, her kan påregnes op til ca. 3 ugers leveringstid

Master GLIDE

Glidebrætter

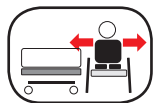

A. Overflytning mellem stol og seng (selvhjulpne bruger)



1A) Brugeren læner sig en smule over mod den hofte, der vender ind mod sengens hoveddel. Holder i det midterste håndtag på Master GLIDE. Fører glidebrættet ind under den balle, der vender mod kørestolen.



2A) For at brugeren ikke skal støde ind i hjulet ved overflytning, bøjes den bagerste kant på Master GLIDE op og skærmer dermed for kørestolens hjul




3A) Brugeren læner sig nu mod glidebrættet og får derved vægten af ballen lagt på glidebrættet. Brugeren griber med den ledige hånd i håndtag på kørestolen og glider nu ved hjælp af Master GLIDE over på kørestolens sæde.




4A) For at fjerne Master GLIDE igen, griber brugeren i begge håndtag på Master GLIDE og bøjer dette op. Nu løftes antiskrid belægningen på glidebrættet op fra underlaget. Glidebrættet holdes spændt og trækkes ud under sædepartiet.



5A) Højdeforskellen fra det man flytter fra, bør være lidt højere end det man flytter til, derved glider brugeren lettere. Er dette ikke muligt bør hjælper stille sig foran brugeren for at skabe tryk og sikkerhed, mens bruger glider fra stol til seng.

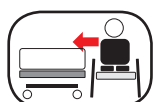

B. Overflytning fra stol til seng med eller uden hjælp

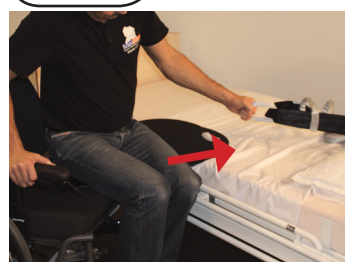

1B) For at give tryk og aktivering kan brugeren anvende Bed Grip MASTER sengebånd til at trække sig over i sengen med. Sengenbåndet fæstnes til sengen.



2B) For at hjælpe med overflytningen og samtidig støtte brugeren kan Master BELT med fordel anvendes. Dette sættes fast om brugerens talje. Hjælper griber i håndtag og støtter mod brugerens knæ. Brugeren flyttes nu over i kørestol.

Master GLIDE

Glidebrætter



C. Overflytning af bruger med bar hud



1C) Til forflytning af bruger med bar hud anvendes Master GLIDE glidestykke. Burrebåndet på glidestykket åbnes og burrebåndsenderne føres ned i de to spor på Master GLIDE Flexi fra overfladen og ned.



2C) Burrebåndsenderne føres sammen og låses. Glidestykket er nu monteret på Master GLIDE Flexi's midte.



3C) Placer Master GLIDE Flexi under brugerens balle ved, at brugeren vipper til modsatte side. Det løse Glidestykke skubbes ind under brugerens løftede balle. Brugeren kan nu glide uden, der opstår friktion på huden.

Master GLIDE

Vaskeanvisning

Master GLIDE Glidestykker kan vaskes ved 80 grader C



Kun skånsom tørretumbling





ADVARSEL

Der må ikke anvendes skylle- eller blegemiddel. Dette forringer glideeffekten.

Max. belastning

Master GLIDE Junior, Flexi, Senior, Multi

Master GLIDE Heavy

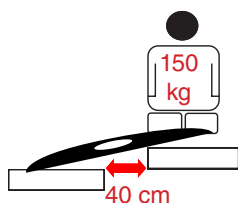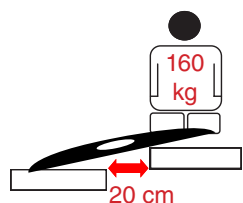

VIGTIGT

- Sørg hele tiden for at dette Master CARE hjælpemiddel er intakt ved jævnligt at efterse syninger.
- Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller på anden vis har skader, må det ikke benyttes.
- Er du i tvivl om brugen af dette hjælpemiddel, skal du omgående kontakte Master CARE.



ANSVAR

- Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller u hensigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.



ADVARSEL

Hjul på begge overflytningsunderlag SKAL være blokeret inden overflytning foretages. Dette for at undgå ulykker med alvorlige personskader til følge.

Hvis Master GLIDE ikke ligger plant eller, hvis man anvender det tilhørende glide-stykke kan der være stor risiko for at bruger glider af glidebrættet og falder på gulvet med alvorlige skader til følge.

STOP



Glidebætter

Produktbeskrivelse

Master GLIDE er glidebrætter udviklet i forskåret polyethylene plader med fræsedede kanter. På modellerne Flexi og Multi er der endvidere en bøjelig bagkant, der beskytter brugeren mod kørestolens hjul i forbindelse med forflytninger. Master Glide er forsynet med grebsvenlige håndtag og skrid-sikker belægning på undersiden.

Master GLIDE Heavy er et glidebræt udviklet i forskåret Trespa plader med fræsedede kanter. Materialet Trespa sikrer høj vægtbæring og muliggør forflytninger over længere afstande. Master GLIDE Heavy er forsynet med grebsvenlige håndtag samt skridsikre nonslip belægning på undersiden.

Master GLIDE Polstret glidestykke

Er fremstillet i elastisk PU-belagt polyester, der er vateret med øko-TEX fiber-vat. Monteres på Master GLIDE Flexi ved hjælp af påsyet burrebånd, der er fremstillet af polyester.

Master GLIDE Nylon glidestykke

Er fremstillet af specialudviklet nylon. Monteres på Master GLIDE Flexi ved hjælp af påmonterede burrebånd, der er fremstillet af polyester.

Anvendelse

Master GLIDE anvendes i forbindelse med forflytninger mellem f.eks. seng og kørestol. Master GLIDE bygger bro og gør forflytninger mellem afstande mulig op til 20 cm. Master GLIDE placeres under brugerens ene balle og ved hjælp af vægtoverføring glider brugeren over på Master GLIDE og videre over til ønsket placering. Forflyttes brugeren uden tøj på underkroppen, anbefales det at anvende et af de tilhørende glidestykker.

Master GLIDE Heavy anvendes i forbindelse med forflytninger mellem f.eks. seng og kørestol eller større afstande op til 40 cm. Master GLIDE Heavy bygger bro og gør forflytninger mellem afstande mulig. Master GLIDE Heavy placeres under brugerens ene balle og ved hjælp af vægtoverføring glider brugeren over på Master GLIDE og videre over til ønsket placering.

Fordele

- Muliggør forflytninger mellem afstande fra 20-40 cm
- Placeres og fjernes let
- Kan anvendes både ved egen og med hjælpers hjælp
- Ved brug af tilhørende glidestykker nedsættes friktionen yderligere, og gør forflytning med bar hud mulig