

MADE IN  
EUROPE




Vores produkter og  
råvarer er produceret i  
Europa

Vælg kvalitet, spar  
penge og skån miljøet.

# (DK) Brugervejledning

41\_20230224\_DK

## X-Ray Master

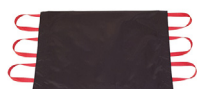

MC 004-6000



MC 004-6001



MC 004-6002



MC 004-6009



MC 004-6010



MC 004-6011



MC 004-6013



Forordning MDR 2017/745 for medicinsk udstyr klasse 1



Varenr.	HMI nr.	Navn - Størrelse	UDI-DI/GTIN
<input type="radio"/> MC 004-6000	39105	X-Ray Master - Thorax	5744001972939
<input type="radio"/> MC 004-6001	39106	X-Ray Master - Digital	5744001972946
<input type="radio"/> MC 004-6002	36586	X-Ray Master - Abdomen	5744001972953
<input type="radio"/> MC 004-6009	53368	X-Ray Master - Glidearm Hjerte	5744001973707
<input type="radio"/> MC 004-6010	39107	X-Ray Master - Trækarm	5744001972960
<input type="radio"/> MC 004-6011	39108	X-Ray Master - Glidearm	5744001972977
<input type="radio"/> MC 004-6013	86700	X-Ray Master - Trækarm	5744001972984

ISO 12 31 03 20

The Original Nordic  
Human Handling Concept



Developed &  
Manufactured by:



master-care.dk



# Tak for at du har valgt et produkt fra master care A/S.

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet /produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde. Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.  
Ved tvivl kontakt master care A/S.

## **MDR (EU) 2017/745:**

Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

## **Erklærede formål for produktet:**

Produktet bruges til anlæggelse af røntgenkassette under patienter i rygleje. Formålet er skånsomt at kunne glide røntgenkassetten ind under en immobil patient.

## **Anvendelse af produktet:**

Via glidearme og nylonhylster kan røntgenkassetten føres ind under brugeren. Risiko for arbejdsskader og shear skader minimeres.

## **Risikovurdering:**

Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for den aktuelle bruger således, at forflytningen foregår ergonomisk og lovmæssigt forsvarligt.

## **Kendskab til produktet/forflytning:**

Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og på vores hjemmeside kan findes vejledninger i brug på langt de fleste produkter.

## **Levetid:**

Produktet forventes at have en levetid på 1-3 år ved normal slitage og vask. Produktets levetid afhænger af brug, belastning samt hvordan og hvor ofte produktet vaskes og tørres.

Produkter bør efterses jævnligt. Produkter, der ikke længere yder tilstrækkelig friktionsnedsættelse til en sundhedsmæssigt forsvarlig forflytning for både hjælper og bruger, bør kasseres. Hvis produktet har defekte syninger eller brudte overflader, bør produktet kasseres.

## **Garanti:**

master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

## **Utsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:**

Utsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produktskader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål /brug.



# Brugervejledning - X-Ray Master

## Placering af X-ray Master og røntgenkassette:




1. Stram lagen-/stiklagen ud og før den første Glidearm under patienten ved lænden.



2. Placer Trækarm oven på Glidearm. Før begge samlet ind på undersiden af den første glidearm.



3. Indsæt røntgenkassetten i Glidehylsteret.

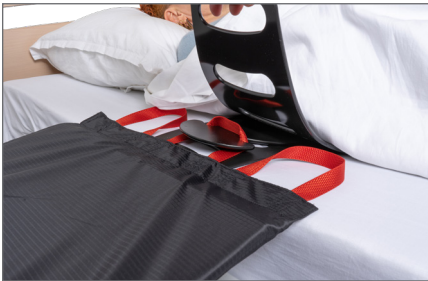

4. Hægt glidehylsteret på Trækarmens krog.



5. Mens Trækarmen trækkes retur igen, føres Glidehylsteret nu imellem de to Glidearme. Hold igen på Glidearmene.



6. Tag Trækarmen af og tag det ønskede røntgenbillede.

## Fjernelse af X-Ray Master:



7. Træk Glidehylsteret ud og vær opmærksom på at holde godt fast i røntgenkassetten.



8. Træk afslutningsvis de to glidearme ud. Benyt vægtoverføring.

# Brugervejledning - X-Ray Master

## Tekniske specifikationer

### Materialer:

PEMD, Nylon, Polyester

### ISO klassificering:

ISO 12952-1:2015

Tekstiler - Vurdering af sengeudstyrs antændelighed - Del 1: glødende cigaret.

Varenummer - Navn	Størrelse:	Antal håndtag	Max. Brugervægt
MC 004-6000 X-Ray Master - Thorax	L 51 x B 41 cm	6	150 kg
MC 004-6001 X-Ray Master - Digital	L 58 x B 58 cm	6	150 kg
MC 004-6002 X-Ray Master - Abdome	L 50 x B 55 cm	6	150 kg
MC 004-6009 X-Ray Master - Glidearm Hjerter	L 110 x B 50 cm	6	150 kg
MC 004-6010 X-Ray Master - Trækarm	L 80 x B 12 cm	5	150 kg
MC 004-6011 X-Ray Master - Glidearm	L 95 x B 38 cm	4	150 kg
MC 004-6013 X-Ray Master - Trækarm	L 90 x B 12 cm	6	150 kg

## ADVARSLER



Efterlad aldrig bruger på produktet på sengekanten.



Efterlad aldrig produktet liggende på gulvet.



Sørg altid for, at brugeren ikke hænger fast i stropperne.



Sørg for, at alle relevante bremsere er låst, inden forflytning foretages.



### CE-mærkning:

Produkterne er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.



### Brugervægt:

Anbefalet max. brugervægt: 150 kg



### Vask:

Nylon covers kan vaskes i vaskemaskine ved max. 60 °C.  
Lavere vaskegrader vil forlænge levetiden væsentligt.



### Vaskemidlets pH værdi:

pH værdi for vaskemiddel / desinfektionsmiddel mellem pH 5 - 9.



### Skyllemiddel:

Der må ikke anvendes skyllemiddel, da dette forringer glideegenskaberne væsentligt.



### Tørretumbling:

Nylon covers må kun tørretumbles skånsomt og ved max. 40 °C.  
Lufttørring forlænger levetiden væsentligt.



### Overfladisk rengøring:

Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.



### Desinficering:

Dette produkt tåler overtørring med alkoholholdige desinficeringsblandinger mellem pH 5-9.



### Strygning:

Tåler ikke strygning



### Kemisk rengøring:

Tåler ikke rengøring.



### Blegning:

Tåler ikke blegning.



### Eftersyn:

Produktet skal kontrolleres jævnlig og gerne inden hver brug. Kontroller, at der ikke er skader på stof, stropper, sømme eller plastmateriale mm.  
Har produktet høj friktion eller på anden vis er i stykker, skal produktet kasseres.



### Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.



### Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.

Find os på:

