

Monteringsvejledning

Til skinner med drejelige hjul på TripTrap Stol

1. Fjern plastdupperne
2. Mærk stolvangerne op på de angivne mål. (se tegning nedenfor)
3. Skær i stregen med El stiksav
4. Skil skinnens rør ad, skruer er ilagt det inderste rør
5. Det tykkeste rør holde på for opmærkning til skruer
6. Bor for med 2–2½ mm. Bor – skru røret fast
7. Det tynde rør sættes i
8. Den tværgående skrue monteres med det fladehoved på ydersiden af skinnen.

