






Stik foden så langt ned i "posen", du kan.

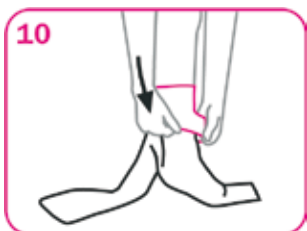

Træk din strømpe eller strømpebuks ned til det punkt, hvor hjælpemidlet starter (omkring læggen). Nu lægger du linningen eller kantbåndet på din kompressionsstrømpe over **mediven® 2 in 1**.

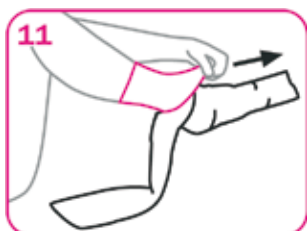

Nu kan du let trække strømpen over hælen og fodryggen i retning mod spidsen af foden. Når du har taget kompressionsstrømpen af, befinder **mediven® 2 in 1** sig inde i strømpen.

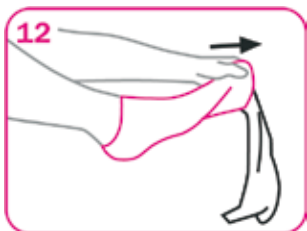

mediven® 2 in 1 strømpepåtager og -aftager



DANPLEJE
ONEMED DENMARK A/S

P.O. Pedersens Vej 16
DK-8200 Århus N
Tlf. 86 109 109
Fax 86 109 209
danpleje@onemed.com
www.onemed.dk

DANPLEJE
ONEMED DENMARK A/S


Brugervejledning

Brugervejledning


Strømpepåtageren og -aftageren **mediven® 2 in 1** er specielt tilpasset til kravene for alle brugere af kompressionsstrømper og forenkler to nødvendige procedurer: At få kompressionsstrømperne over fodryggen og hælen på en let måde både ved påtagning og aftagning.

Vaskeanvisning


Hjælpe midlet **mediven® 2 in 1** kan uden problemer vaskes med andet tøj i vaskemaskinen på skåneprogram op til 40 grader. Brug hverken kemiske rensmidler eller pletfjerner til rengøringen. Lad hjælpe midlet **mediven® 2 in 1** lufttørre. Varmekilder som ovne eller radiatorer skal undgås. Brug ikke tørretumbler.

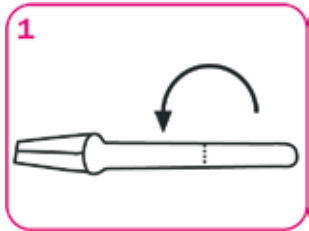


Læg **mediven® 2 in 1** fladt på gulvet, når strømpen skal tages på. Den lange ende på **mediven® 2 in 1** foldes langs med den stiplede linie.

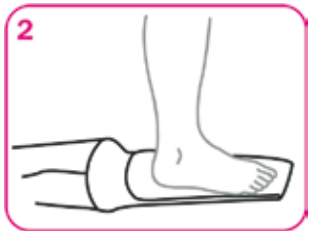



Den nøgne fod sættes på **mediven® 2 in 1**. I den forbindelse skal tærne pege i retning mod den omslåede kant. Vær opmærksom på, at der både foran ved tærne og bagtil ved hælen ligger tilstrækkeligt med stof (min. 3 cm).

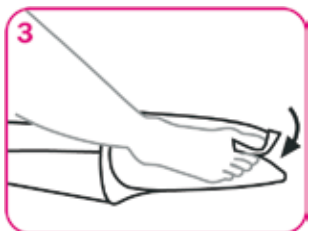


Skub stoffet let ind mellem dine tær, for at holde fast på stoffet.

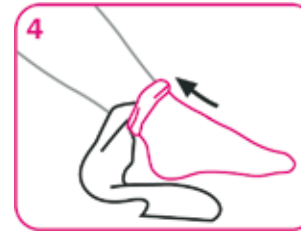


Træk strømpen på - over fodryggen og hælen i retning mod knæet. **mediven® 2 in 1** bliver i strømpen og rager ud bagtil ved læggen.

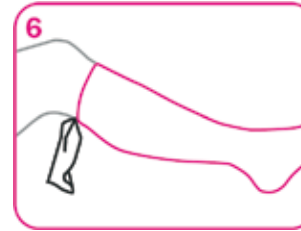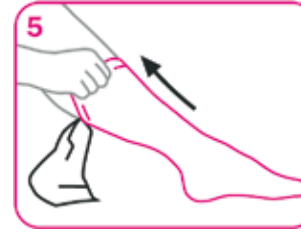

Træk sin strømpe op til ca. en håndsbredde under knæet. Herefter er det let at trække din **mediven® 2 in 1** ud.

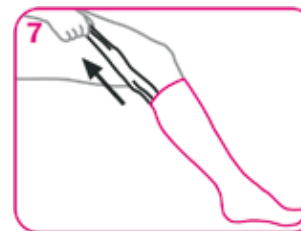

Til det formål tager du fat i den del af **mediven® 2 in 1**, som stadig stikker ud af strømpen, og løfter hælen noget. Nu kan du let og uden større kraftudfoldelse trække **mediven® 2 in 1** ud af din kompressions-strømpe eller strømpebuks.

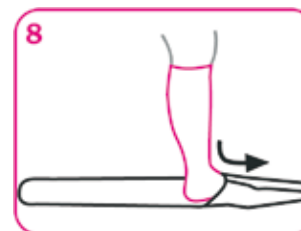

Læg hjælpe midlet **mediven® 2 in 1** fladt på gulvet, når strømpen skal tages af.