



ERGOTip 4 ELH (HMI-nr. 42136)


BRUGSVEJLEDNING



Stolen bør lades op før ibrugtagning.

Læs brugsvejledningen nøje igennem, før du anvender produktet. Vær opmærksom på alle anvisninger og følg dem.

Max. brugervægt: 150 kg.

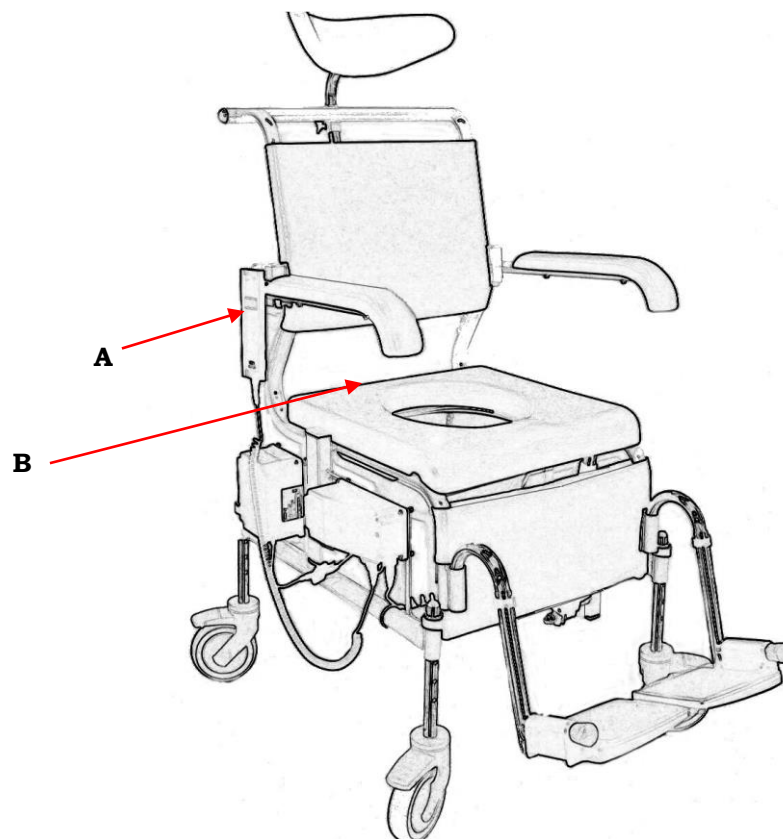

HVORDAN TIPPES STOLEN BAGUD: Tryk på venstre tast på håndbetjeningsboksens (A) forside, og tip stolen til den ønskede siddeposition. **Slip** tasten igen, når stolen har den ønskede hældning:

STOLEN ER NU FASTLÅST I STILLINGEN.

Et vippebeslag (B) bag på sædet sørger for, at spanden IKKE falder ud ved tipning: Vippebeslaget skubbes blot ned bag spanden, når denne er sat ind under sædet.

HVORDAN TIPPES STOLEN FREMAD: Tryk på højre tast på håndbetjeningsboksens forside, og tip stolen til den ønskede siddeposition. Slip tasten igen.

STOLEN ER NU AUTOMATISK FASTLÅST I DENNE STILLING.

Ved brug af en elektrisk tipstol undgår man, at hjælperens rygsøjle og hofter belastes u hensigtsmæssigt. Endvidere kan brugerkontakten hermed (pga fx mindre stress) forbedres væsentligt.






Ved brugers ind- og udstigning samt tipning af stolen SKAL det sikres, at stolens hjul (min. 2 stk.) er aflåst. Hjulenes bremsepedaler (3) må IKKE ”pege” ind under stolen!

Hvis brugeren læner sig kraftigt fremad, kan der opstå tipningsfare, **hvis** forhjulene **ikke** er låst, og **hvis** bremsepedalerne **ikke** peger væk fra stolen.

INDSTILLING AF SÆDEHØJDEN:

- a. Træk teleskopbenets låseclips ud – ét ben ad gangen.
- b. Træk/ skub derefter teleskopbenet til den ønskede længde.
- c. Sæt låseclipsen i igen – check, at den sidder forsvarligt.

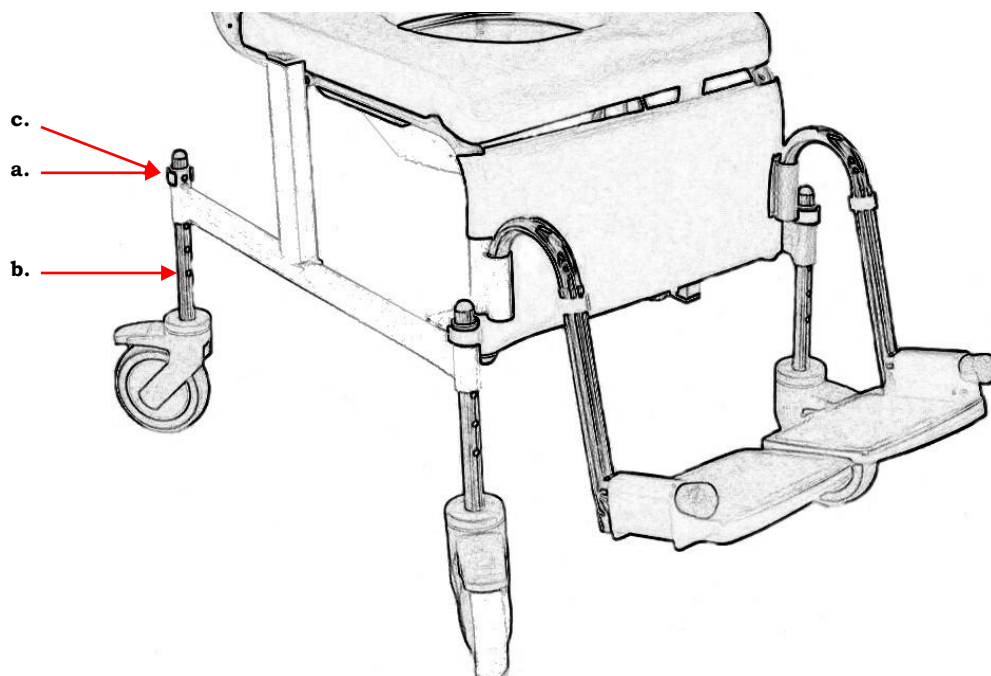

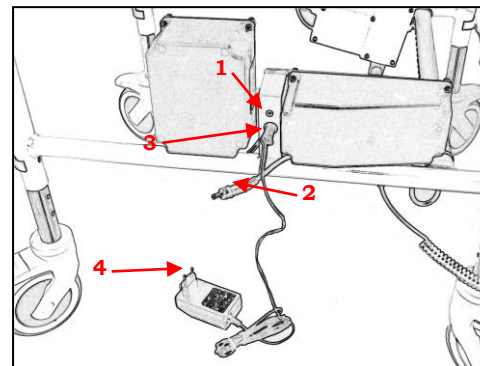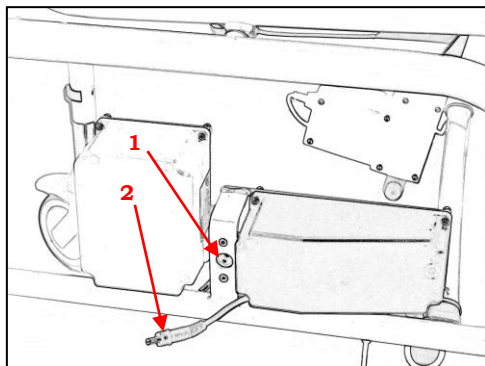

- A. Oplad batterierne **så hyppigt** som muligt: Det resulterer i længere levetid for batterierne. Der afgives en lyd-alarm, når batterierne absolut **SKAL** oplades.
- B. Træk stikket (2) ud af soklen (1).
- C. Placér den medfølgende laders ene ende (3) i soklen (1) og den anden (4) i en stikkontakt i denne rækkefølge.
- D. Efter opladning, dvs når lampen på stik 4 lyser **grønt** - sættes stik 2 igen i sokkel 1. (Under opladningen lyser lampen **gult**.)

Hvis batterierne tømmes helt, vil det ikke være muligt at genoplade dem !

Mindst hver 3. måned **SKAL** batterierne oplades - **OGSÅ** selvom stolen **IKKE** har været brugt !




Opladning må ikke foretages, hvis stolen er våd eller med en bruger siddende i stolen.



OBS ! Siderne på nakkestøttens PUR kan *forsigtigt* skubbes sammen (til smalle nakker) eller trækkes fra hinanden (til bredere nakker). Skub/ træk i PUR-støtten inde på dens midte - *ikke* i de yderste dele af PUR-støtten.
N.B. Evt. brud opstået ved "vold" omfattes IKKE af garanti !




Ved brugers ind- og udstigning må særlig opmærksomhed vies til evt. tipningsfare. **STÅ DERFOR ALDRIG PÅ FODHVILERNES FODPLADER !**

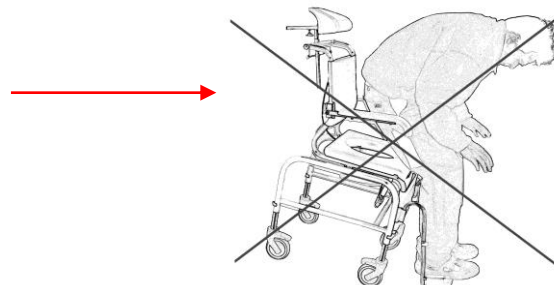


RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE:

Ved usædvanlige lyde og/ eller evt. ujævn motorgang STANDSES tipningen. Kontakt evt. en fagmand eller forhandleren/ producenten. Rengøring foretages med ikke-ætsende rengøringsmidler, hvorefter stolen spules – **der må ikke spules direkte på elmotoren med en højtryksrenser ! OBS ! Ved denne rengøring skal motorens stempel være kørt HELT ind i "huset"**. Den efterfølgende aftørring sker bedst med en blød klud. Armlæn, ryglæn, sæde og hjul kontrolleres med jævne mellemrum – efterspændes eventuelt – og holdes fri for hår m.m. for at bevare den optimale køreevne.

Brugsvejledning fodhvilere model 01051

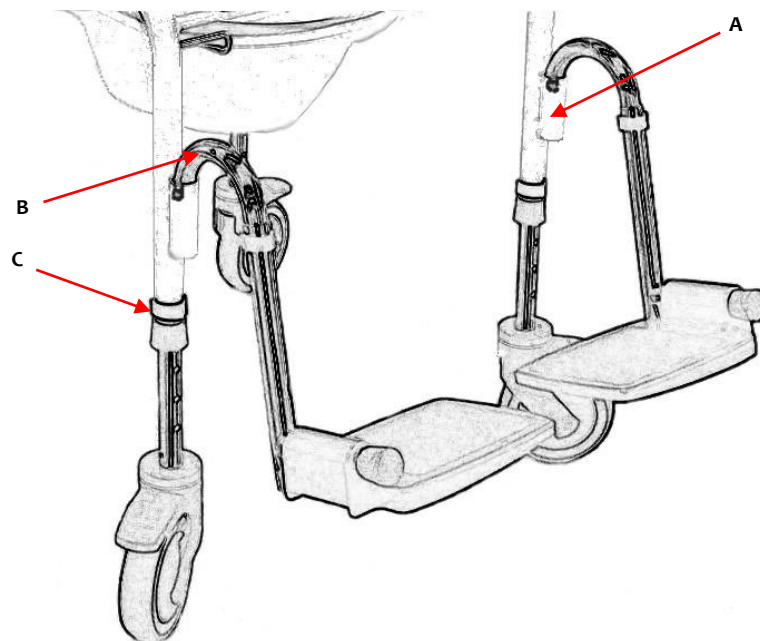

Et fodhvilerpar består af to højdeindstillelige fodhvilere (én til højre og én til venstre fod).

1. Anbring fodhvileren i beslaget (A), som er påsvejet stolens forben. I hver side af beslaget er en slidse, som fodhvilerens ”knopper” glider ned i og derved låser fodhvileren for sidedrej.
 **Disse slidser kan have skarpe kanter, som man kan rive sig på ved et uheld, når fodhvilerne ikke er monteret på en stol.**
2. Ønskes fodhvileren svinget ud til siden, **løftes** fodhvileren - nemmest i krumningen (B) - godt én cm lodret: Herved glider fodhvilerens ”knopper” op af slidserne, og fodhvileren kan nu drejes til siden.
3. Fodhvileren kan indstilles i længden ved at **fjerne** dens låseclip (C) og derefter **trække** eller **skubbe** fodhvilerens inderrør til den ønskede længde. **SÆT** fodhvilerens låseclip på plads igen efter indstillingen.
4. Fodhvilerne kan forsynes med et lægbånd (model **01052**) eller ankelbepændinger (model **01052-A**) fremstillet i skai (med velcrolukning til at **stramme** eller **slække**) samt en udelt polstret fodplade (model **01055-PL**) til med velcrotape at fastgøre oven på de to plast fodplader. Fodhvilerne kan efter ønske leveres **længere** eller **kortere**, hvis brugeren har ekstraordinært lange eller korte ben.



Under indstillingen skal man tage hensyn til den klemrisiko, der altid er til stede.