

A ERGOTIP 4H (HMI-nr. 42137) BRUGSVEJLEDNING



Max. belastning: 150 kg.

Læs brugsvejledningen nøje igennem, før du anvender produktet.
Vær opmærksom på alle anvisninger og følg dem.

HVORDAN TIPPES STOLEN BAGUD: Grib med én hånd om midten af skubbegrebet (A) øverst på stolens ryglæn. Klem så med fingrene kablet (B) ind mod skubbegrebet:

STOLEN TIPPER HERVED BAGOVER.

Slip kablet med fingrene, når den ønskede position er nået:

STOLEN ER HERMED FASTLÅST I DENNE STILLING.

Et vippebeslag (F) på sædets bagside sørger for, at spanden IKKE falder ud ved tipning: Ved isætning/udtagning af spanden drejes beslaget med fingrene for at låse eller frigøre spanden.


HVORDAN TIPPES STOLEN FREMAD: Stå ved siden af stolen. Grib med én hånd omkring skubbegrebet (A) og udløs kablet (B) ved at klemme det ind mod skubbegrebet (evt. med en tommelfot). Placér den anden hånd på forkanten af stolens sæde. Træk derefter fremad med "udløserhånden" samtidigt med, at den anden hånd skubber nedad på sædets forkant:

STOLEN TIPPER HERVED FREMAD.


Slip kablet med fingrene, når den ønskede position er nået:

STOLEN ER HERMED FASTLÅST I DENNE STILLING.

Ved brug af denne form for vægtoverførsel er belastningen på rygsøjle og hofter minimal.

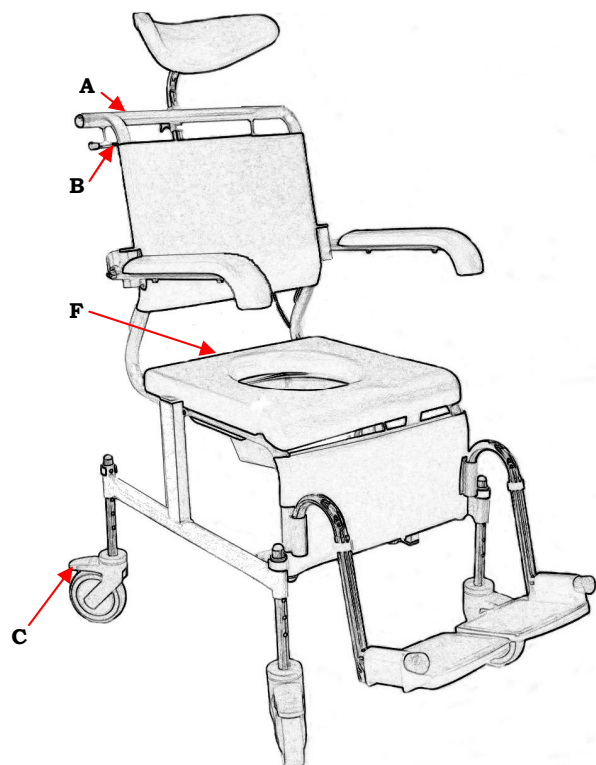


Ved brugers ind- og udstigning i stolen samt tipning af stolen SKAL det sikres, at stolens hjul er aflåst, Hjulenes bremsepedaler (C) må IKKE "pege" ind under stolen !

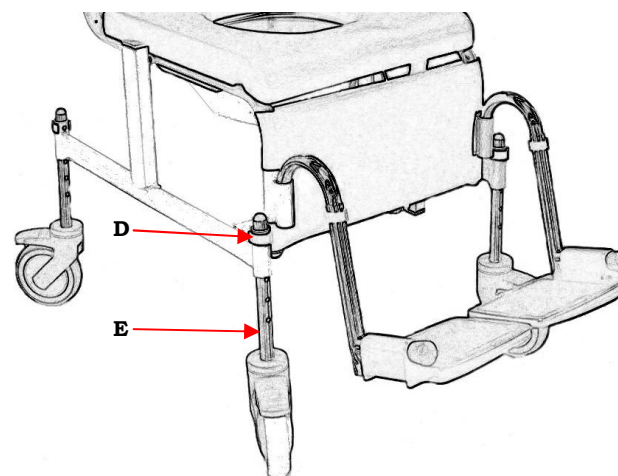

HVORDAN INDSTILLES SÆDEHØJDEN:

1. Træk låseclipsen (D) ud – ét ben ad gangen.
2. Træk/ Skub teleskopbenet (E) til den ønskede længde.
3. Sæt låseclipsen i igen – vær omhyggelig med, at den er skubbet ordentligt på plads !

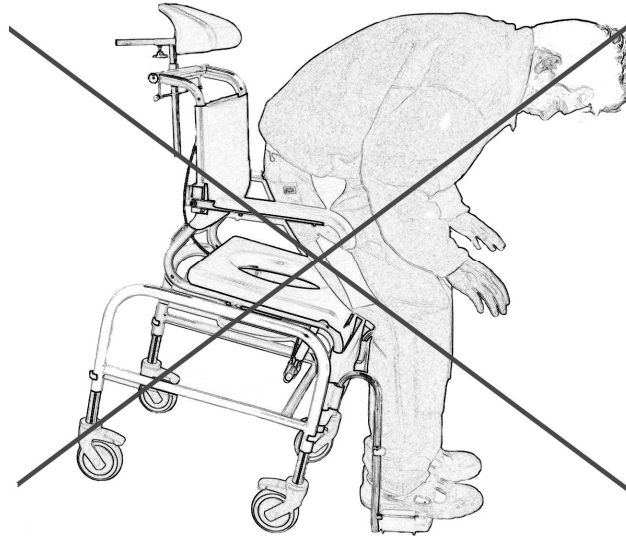

Ved brugers ind- og udstigning må særlig opmærksomhed vies til evt. tipningsfare.
STÅ DERFOR ALDRIG PÅ FODHVILERNES FODPLADER !



Hvis brugeren læner sig kraftigt fremad, kan der opstå tipningsfare, **hvis** forhjulene **ikke** er låst, og **hvis** deres bremsepedaler **ikke** peger væk fra stolen.

OBS !


Siderne på nakkestøttens PUR kan *forsigtigt* skubbes sammen (:til smalle nakker) eller trækkes fra hinanden (:til bredere nakker).
Skub/ træk i PUR-støtten inde på dens midte - *ikke* i de yderste dele af PUR-støtten.
Vær opmærksom på, at evt. brud opstået ved "vold" IKKE omfattes af garantien !

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE:

Rengøring foretages med almindelige ikke-ætsende rengøringsmidler, hvorefter stolen spules. Den efterfølgende aftørring sker bedst med en blød klud.
HJULENE efterses med jævne mellemrum – **efterspændes** eventuelt – og skal holdes fri for bl.a. hår for at bevare den optimale køreevne.

EXTRA TILBEHØR: Se www.danrehab.dk

Brugsvejledning fodhvilere model 01055

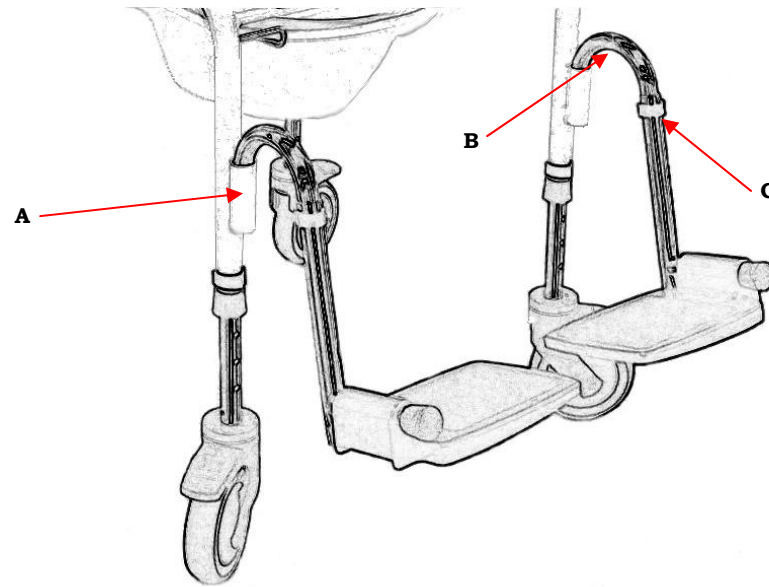

Hvert fodhvilerpar består af to højdeindstillelige fodhvilere (én til højre og én til venstre fod).

1. Anbring fodhvileren i beslaget (A), som er påsvejet stolens forben. I beslaget er indsvæjet en tværstang, som fodhvilerens slidser glider ned over og derved låser fodhvileren for sidedrej.



Disse slidser kan have skarpe kanter, som man kan rive sig på ved et uheld, når fodhvilerne ikke er monteret på en stol.

2. Ønskes fodhvileren svinget ud til siden, **løftes** fodhvileren (nemtest i krumningen (B)) cirka én cm lodret: Herved glider fodhvilerens slidser fri af tværstangen, og fodhvileren kan nu drejes til siden (eller tages helt af).
3. Fodhvileren indstilles i længden ved at **fjerne** dens låseclip (C) og derefter **trække** (eller **skubbe**) fodhvilerens inderrør til den ønskede længde. **HUSK** at sætte fodhvilerens låseclip på plads igen.
4. Fodhvilerne kan forsynes med et indstilleligt lægbånd (**model 01052**) fremstillet i skai med velcrolukning til at **stramme** eller **slække** samt en udelt polstret fodplade til at sætte oven på de to eksisterende fodplader (**model 01055-PL**). Fodhvilerne kan efter ønske leveres **længere** eller **kortere**, hvis brugeren har ekstraordinært lange eller korte ben.



Under indstillingen skal man tage hensyn til den klemrisiko, der altid er til stede.