



**VELA HipHop<sup>®</sup> 100**



**VELA HipHop<sup>®</sup> 2001**

**VELA HipHop<sup>®</sup> 300**

# BRUGERMANUAL

# INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>1.0. INDLEDNING</b> .....	4
<b>1.1. SIKKERHED</b> .....	5
1.1.1 Reklamationsret .....	5
1.1.2 Udpakning af stolen .....	5
<b>1.2. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA HIP HOP</b> .....	6
1.2.1 Hjul .....	6
1.2.2 Stel .....	6
1.2.3 Polster .....	6
1.2.4 Pletfjerning .....	6
1.2.4.1 Blod .....	6
1.2.4.2 Blæk .....	6
1.2.4.3 Chokolade, fedt og slik .....	6
1.2.4.4 Græs og grøntsager .....	6
1.2.4.5 Kaffe, te og mælk .....	6
1.2.4.6 Kuglepen og kosmetik .....	6
1.2.4.7 Skosværte .....	6
1.2.4.8 Stearin .....	7
1.2.4.9 Syltetøj, sirup, frugt og juice .....	7
1.2.4.10 Tyggegummi .....	7
1.2.4.11 Urin .....	7
1.2.4.12 Vin og spiritus .....	7
<b>1.3. GENERELLE RETNINGSLINJER</b> .....	7
1.3.1 Transport .....	7
1.3.2 Stabilitet og balance .....	7
<b>1.4. VELA HIP HOP 100</b> .....	8
1.4.1 Højderregulering .....	8
1.4.2 Sæde .....	8
1.4.2.1 sædekip .....	8
1.4.2.2 Betræk .....	8
1.4.2.3 Komfortkiler .....	8
1.4.2.4 Skumzone .....	8
1.4.3 Ryg .....	9
1.4.3.1 Rygvinkling og ryghøjde .....	9
1.4.3.2 Aftagelig ryg .....	9
1.4.3.3 Bremsfunktion .....	9
1.4.3.4 Nakkestøtte .....	10
1.4.3.5 Armlæn .....	10

1.4.4 Sæde . . . . .	10
1.4.4.1 Sædedybden . . . . .	10
1.4.5 Tilbehør . . . . .	10
1.4.5.1 Eftermontering af tilbehør . . . . .	10
1.4.5.2 Fod- og ankelbespænding . . . . .	10
1.4.5.3 Kropsstøtter . . . . .	10
1.4.5.4 Knæstop . . . . .	11
1.4.5.5 Bord . . . . .	11
1.4.5.6 Skubbebøjle . . . . .	11
1.4.5.7 Fodstøtte . . . . .	11
1.4.6 Teknisk information Vela Hip Hop 100 . . . . .	11

## **1.5 VELA HIP HOP 300/300E . . . . .**

1.5.1 Højderegulering . . . . .	12
1.5.2 Sæde . . . . .	12
1.5.2.1 Sædekip . . . . .	12
1.5.2.2 Betræk . . . . .	12
1.5.2.3 Komfortkiler . . . . .	12
1.5.2.4 Skumzone . . . . .	12
1.5.3 Ryg . . . . .	13
1.5.3.1 Rygdybden . . . . .	13
1.5.3.2 Rygvinkling og ryghøjde . . . . .	13
1.5.3.3 Aftagelig ryg . . . . .	13
1.5.3.4 Hvilestilling . . . . .	13
1.5.3.5 Bremsfunktion . . . . .	13
1.5.3.6 Nakkestøtte . . . . .	14
1.5.3.7 Armlæn . . . . .	14
1.5.3.8 Skubbebøjle . . . . .	14
1.5.3.9 Fodstøtter . . . . .	14
1.5.4 Tilbehør . . . . .	14
1.5.4.1 Eftermontering af tilbehør . . . . .	14
1.5.4.2 Fod- og ankelbespænding . . . . .	14
1.5.4.3 Kropsstøtter . . . . .	14
1.5.4.4 Knæstop . . . . .	14
1.5.4.5 Bord . . . . .	15
1.5.5 Vigtigt vedr. VELA Hip Hop 300E batteri . . . . .	15
1.5.5.1 Opladning af batteriboksen . . . . .	15
1.5.5.2 Isætning af batteri . . . . .	15
1.5.5.3 Opladning af batteri . . . . .	15
1.5.5.4 Advarsel, VELA Hip Hop 300E . . . . .	15
1.5.5.5 Teknisk information . . . . .	15

## 1.0 INDLEDNING

### KÆRE KUNDE

Vi vil gerne takke dig for købet af VELA Hip Hop. Vi er sikre på, at den bliver til daglig glæde for dig. Brugervejledningen omhandler nyttige oplysninger om indstilling, betjening, vedligeholdelse, tekniske data mv.

Denne brugermanual omhandler VELA Hip Hop 100, VELA Hip Hop 300 og VELA Hip Hop 300E.

### VIGTIGT

Læs venligst denne brugermanual grundigt, og gem den til senere brug. Den skal altid være til rådighed for brugeren. Denne brugermanual skal altid følge stolen.

Den kan også findes på VELAs website: [www.vela.eu](http://www.vela.eu)

Du kan ligeledes finde information om VELA Hip Hop på VELAs website: [www.vela.eu](http://www.vela.eu)

VELA forbeholder sig ret til ændringer.

Vermund Larsen A/S

### VELA

Gøteborgvej 12

9200 Aalborg

Danmark

[www.vela.eu](http://www.vela.eu)

### BORTSKAFFELSE

Dette produkt indeholder materialer, som kan genbruges, f.eks. plastik, metal, elektrisk og elektronisk udstyr mv. Derfor skal produktet bortskaffes i overensstemmelse med lokal lovgivning og ikke sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse og genbrug er medvirkende til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.

**Bemærk!** Elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier er mærket med nedsættende ikon. Dette kendetegner udstyr som indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt, og derfor skal indsamles særskilt.



Det er vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

## 1.1 SIKKERHED

Denne stol er CE-mærket og overholder alle gældende EU-regler. Stolen er produceret af VELA, Vermund Larsen A/S, Gøteborgvej 12, 9200 Aalborg SV, Danmark.

Formålet med VELA Hip Hop er en type A stol beregnet til siddende lettere handicappede børn.

### 1.1.1 REKLAMATIONSRET

VELA giver reklamationsret i henhold til købeloven. Den gælder kun ved anvendelse af originale reservedele og tilbehør, samt tilpasninger foretaget af autoriseret servicetekniker.

VELA påtager sig ikke ansvar for skader på produktet eller brugeren, der er opstået pga.:

- Transport
- Misbrug
- Almindelig slitage
- Forkert brug
- Brug af uoriginale reservedele og tilbehør
- Tilpasninger foretaget af uautoriseret servicetekniker

### 1.1.2 UDPAKNING AF STOLEN

VELA Hip Hop leveres i en papemballage, der er udviklet med hensyn til miljøet og med brugervenligheden i fokus.

Såfremt der er mangler eller transportskade ved stolen, bedes du straks kontakte VELA. Du må ikke selv forsøge at reparere evt. skader eller tage stolen i brug.

Den kasse, stolen leveres i, skal indeholde:

#### VELA HIP HOP 100

- 1 stol
- Denne brugermanual
- Evt. ekstra tilbehør
- Værktøj til fastspænding

#### VELA HIP HOP 300

- 1 stol
- Denne brugermanual
- Evt. ekstra tilbehør
- Værktøj til fastspænding

#### VELA HIP HOP 300E

- 1 stol
- Denne brugermanual
- Evt. ekstra tilbehør
- Værktøj til fastspænding

Stolens indstillinger skal justeres af en voksen, så det sikres af stillinger er tilstrækkeligt spændt.

## **1.2 VEDLIGEHOLDELSE AF VELA HIP HOP**

Vi anbefaler et årligt eftersyn af VELA Hip Hop for at finde frem til eksempelvis defekte og slidte dele. Endvidere er det vigtigt at se, om barnet er vokset og derved har brug for en større model eller ændring af evt. tilbehør.

En voksen bør regelmæssigt efterspænde de aftagelige dele.

### **1.2.1 HJUL**

Det anbefales med jævne mellemrum at efterse hjul og rense for eventuelle trådrester etc.

### **1.2.2 STEL**

Vask med lunkent vand evt. tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

### **1.2.3 POLSTER**

Betræk er som standard mikrofiber, som er meget smudsafvisende. Evt. indkøbt inconti-betræk vaskes i vaskemaskinen på skåneprogram.

### **1.2.4 PLETFJERNING**

En gylden regel: Fjern altid pletten hurtigst muligt.

Benyt altid en ren, hvid bomuldsklud, og brug kun små mængder rensmiddel ad gangen.

#### **1.2.4.1 BLOD**

Blod vaskes af i koldt vand. Hvis det ikke hjælper, tilsæt da et pH-neutralt opvaskemiddel.

#### **1.2.4.2 BLÆK**

Fjern så meget som muligt med trækpapir. Rens med 20 % denatureret sprit. Vask efterfølgende med vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

#### **1.2.4.3 CHOKOLADE, FEDT OG SLIK**

Vask med lunkent vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

#### **1.2.4.4 GRÆS OG GRØNTSAGER**

Vask med lunkent vand evt. tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

#### **1.2.4.5 KAFFE, TE OG MÆLK**

Fjern så meget som muligt med trækpapir. Vask med vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

#### **1.2.4.6 KUGLEPEN OG KOSMETIK**

Rens med husholdningssprit.

#### **1.2.4.7 SKOSVÆRTE**

Dup forsigtigt med en klud fugtet med rensbenzin eller husholdningssprit.

#### **1.2.4.8 STEARIN**

Varmt strygejern over sugende papir. Rens med terpentin. Dup med lunkent vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel. Alternativ: Se tyggegummi.

#### **1.2.4.9 SYLTETØJ, SIRUP, FRUGT & JUICE**

Fjern så meget som muligt med en ske. Vask herefter med lunkent vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

#### **1.2.4.10 TYGGEGUMMI**

Køl med isterning i plasticpose eller fryseelement. Skrab væk. Evt. rest kan fjernes forsigtigt med rensbenzin.

#### **1.2.4.11 URIN**

1 del eddike uden farve blandes med to dele vand. Brug en tør klud som underlag, når pletten gennemvædes. Fjern eddikeblandingen med skiftevis tør og vandholdig klud.

#### **1.2.4.12 VIN OG SPIRITUS**

Fjern så meget som muligt med træppapir. Vask med vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel, og rens med fortyndet denatureret sprit.

### **1.3 GENERELLE RETNINGSLINJER**

For korrekt brug af VELA Hip Hop bør følgende overholdes:

#### **1.3.1 TRANSPORT**

Ved transport af VELA Hip Hop bør man altid huske at låse stolen. Der må ikke sidde personer i stolen under transport.

#### **1.3.2 STABILITET OG BALANCE**

VELA Hip Hop er designet som en dagligdagsstol til brug i skolen eller i hjemmet. Den er beregnet til stillesiddende arbejde og ikke som en kørestol. Alle bevægelser i VELA Hip Hop har indvirkning på placeringen af tyngdepunktet. For at øge sikkerheden anbefaler vi:

- Maksimal brugerhøjde er 145 cm
- Maksimal brugervægt er 60 kg, dog er aktivitetsniveauet en væsentlig faktor. En person med meget kraftige bevægelser i stolen bør kontakte en salgskonsulent fra VELA inden køb.
- Man må ikke stå op i stolen
- Man må ikke stå op på fodpladen, den er kun beregnet til ind- og udstigning
- Stolen er ikke beregnet som kørestol
- Ved forflytning bør stolen altid låses

#### **VIGTIGT!, VELA Hip Hop 300 serien:**

Ved ændring af sædekup til og fra hvilestilling, skal der udvises stor agtpågivenhed for personer i nærheden af stole.

#### **1.3.3 GENBRUG**


En del af stolens materiale kan genbruges. Aflever stolen til VELAs distributør eller din lokale genbrugsafdeling.

## 1.4 VELA HIP HOP 100

Stolen bør indstilles og efterspændes jævnligt af en voksen.

### 1.4.1 HØJDEREGULERING

Højden på VELA Hip Hop 100-serien kan justeres ved hjælp af gasfjeder. Dette gøres ved at trække på et af de små greb med flyvemaskiner på.

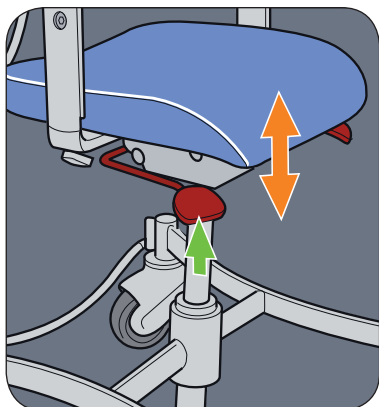

### 1.4.2 SÆDE

#### 1.4.2.1 SÆDEKIP

Sædekip justeres ved hjælp af håndgrebet under sædet.



#### 1.4.2.2 BETRÆK

Betrækket kan ikke afmonteres, men kan lynes op, hvorved man kan komme ind til komfortkilerne.


Se i øvrigt gode råd til vedligeholdelse af betrækket på side 6.

#### 1.4.2.3 KOMFORTKILER


Det er muligt at tilpasse sædet til barnet ved at indstille de medfølgende komfortkiler.

#### 1.4.2.4 SKUMZONE

Der er lavet skumzoner i sædet. De giver mulighed for at tilpasse stolen perfekt til det enkelte barn. Skumzonerne kan vendes, og man kan vælge mellem en hård og en blød zone.

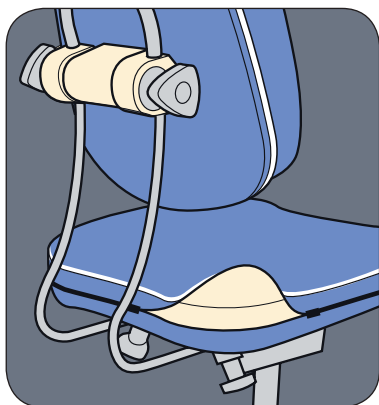



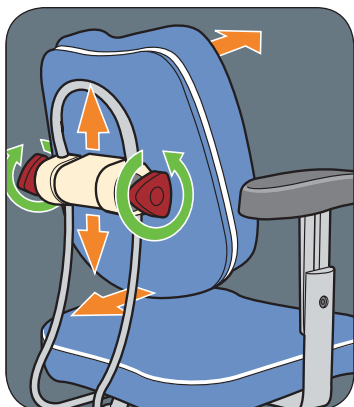


## 1.4.3 RYG

### 1.4.3.1 RYGVINKLING OG RYGHØJDE

Ryggen vinkles vha. de to håndgreb, der er placeret bag på ryggen. Ryggen indstilles af en voksen, for at sikre, at den bliver tilstrækkeligt spændt i den valgte position.

Begge håndgreb skal løsnes for at ændre rygvinklingen. Husk at spænde håndgrebene bagefter.

Disse håndgreb bruges også til at justere ryghøjden med.

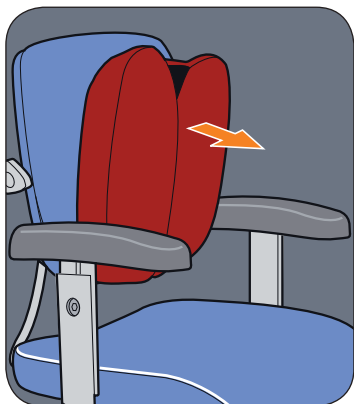


### 1.4.3.2 AFTAGELIG RYG

Det er muligt at tage rygpuden af og vaske betrækket på skånevask og maks. 30 grader.

Via lynlåsen på bagsiden af rygpuden er det muligt at komme ind til selve polstringen, hvor man evt. kan indsætte ekstra støtte.

**BEMÆRK:** Dette gælder ikke den mindste stol i serien, VELA Hip Hop 100 I. Der kan rygpuden og betrækket ikke tages af.

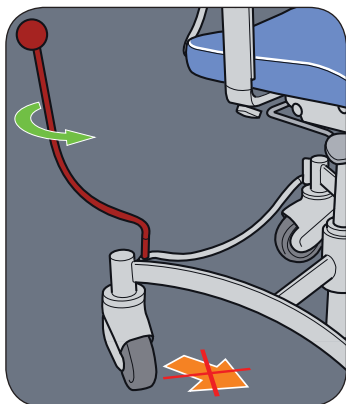


### 1.4.3.3 BREMSEFUNKTION

VELA Hip Hop har centralbremse, som aktiveres vha. håndbremsen til højre eller venstre for barnet. Man kan selv flytte bremsen fra højre til venstre ved at fjerne gummiproppen og sætte bremsen over i det andet hul. Håndbremsen skubbes fremad for at låse hjulene og bagud for at låse dem op.

**VIGTIGT:** Stolen kører meget let, når den ikke er bremsat og brugeren ikke sidder i stolen.

Bremsestangen kan flyttes fra højre til venstre side ved at løsne pinolskruen med det medfølgende værktøj, som sidder for enden af bremsestangen.

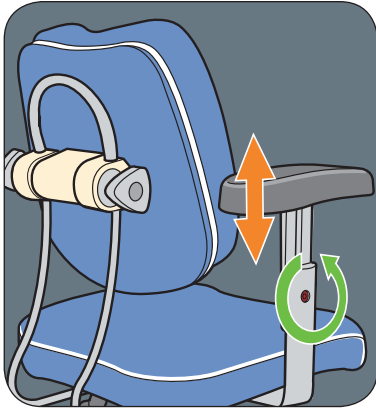

#### 1.4.3.4 NAKKESTØTTE

Justering af nakkestøtten foretages ved at løsne fingerskruerne. Husk at efterspænde den igen.

#### 1.4.3.5 ARMLÆN


Armlænene kan justeres i såvel højden som bredden. I højden gøres det ved at løsne skruen med den medsendte nøgle. Husk at spænde dem godt igen.

Bredden indstilles under sædet i tilbehørsrillen ved at løsne de to skruer og justere metalskinnen, der holder armlænet. Husk at spænde godt bagefter med det medsendte værktøj.

#### 1.4.4 SÆDE

##### 1.4.4.1 SÆDEDYBDEN

Sædets dybde kan justeres vha. håndgrebene placeret lige under sædets bagkant i såvel højre som venstre side. Begge håndgreb skal løsnes for at justere placeringen af ryggen. Husk at spænde håndgrebet bagefter.

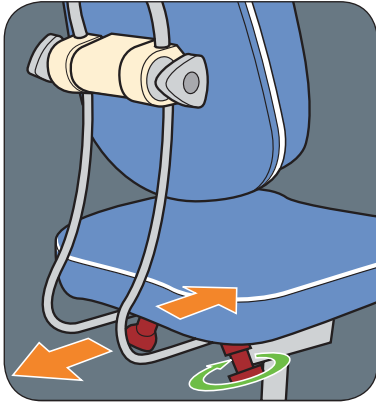

#### 1.4.5 TILBEHØR

Tilbehør er som standard monteret ved levering

##### 1.4.5.1 EFTERMONTERING AF TILBEHØR:


- Sidestøtter skal monteres på armlænet.
1. Skru unbracco-skruen ud (skal bruges igen), og træk det indvendige plastik af ved at fjerne de fire skruer.
  2. Sidestøtterne monteres på indersiden af armlænet, og unbracco-skruen skrues i igen.

- Seler og veste
- Lårstyrer

De eftermonteres i de to riller i hver side af bunden af sædet. Montering i rillerne sker ved følgende tilbehør:

##### 1.4.5.2 FOD- OG ANKELBESPÆNDING

Denne eftermonteres ved at sætte båndet igennem hullerne i fodpladen.

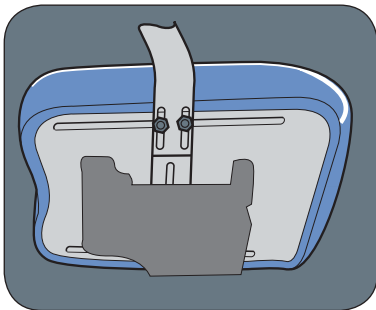

##### 1.4.5.3 KROPSSTØTTER

Kropsstøtter kan justeres i højden ved at tage rygpuden af, og derefter justere den i højden. Skal de åbnes og lukkes gøres dette ved at trykke på knappen på selve beslaget.

#### 1.4.5.4 KNÆSTOP

Knæstop monteres ved at skrue det fast i ophænget i sædet.

#### 1.4.5.5 BORD

Bordet sættes fast i ophænget til armlænet.

#### 1.4.5.6 SKUBBEBØJLE

Skubbebøjlen er ekstra tilbehør.

#### 1.4.5.7 FODSTØTTE

Fodstøtten er ekstra tilbehør på VELA Hip Hop 100-serien. Fodpladen kan indstilles i højden ved at løsne håndgrebet, som findes bag ved fodpladen. Husk at spænde den godt bagefter.

### 1.4.6 TEKNISK INFORMATION VELA HIP HOP 100

#### Sæde:

- Betræk: polyester
- Plastdele: PA6-GF


#### Stel:

- Pulverlakeret stål

	VELA Hip Hop 100
<b>Siddehøjde</b>	38-48 cm 43-58 cm Kan intervalreguleres 10 cm
<b>Sædestørrelse</b>	27(b) x 30 cm, 32(b) x 35 cm 36(b) x 43 cm, 40(b) x 47 cm
<b>Sædedybde</b>	25-30 cm 30-35 cm 35-43 cm 39-47 cm
<b>Ryg</b>	22(b) x 18 cm, 26(b) x 26 cm, 28(b) x 35 cm
<b>Armlæns pude</b>	20 x 6 cm
<b>Armlæns højde</b>	10-22 cm
<b>Afstand mellem armlæn</b>	21-29 cm, 26-34 cm 30-38 cm, 34-38 cm
<b>Sædevinkling</b>	-8° - +10°
<b>Rygvinkling</b>	+/- 20°
<b>Understel</b>	53 x 55 cm
<b>Vægt</b>	19 kg
<b>Kapacitet</b>	60 kg
<b>Hmi-nr.</b>	43554

## 1.5 VELA HIP HOP 300/300E

Stolen bør indstilles og efterspændes jævnligt af en voksen.

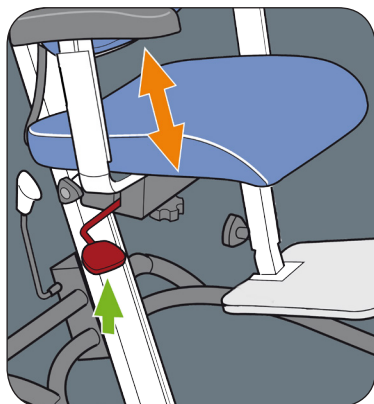


### 1.5.1 HØJDEREGULERING


Højden på VELA Hip Hop 300-serien kan justeres enten ved hjælp af gasfjeder (VELA Hip Hop 300) eller ved hjælp af el (VELA Hip Hop 300E).

#### VELA HIP HOP 300

Højden justeres ved at trykke på højdereguleringshåndtaget, som er placeret neden under armlænet.

#### VELA HIP HOP 300E

Højden justeres ved at trykke på enten den medfølgende fjernbetjening. For at hejse stolen skal du trykke på [ + ], og for at sænke den trykkes på [ - ]. Højdereguleringen kan også være placeret på armlænet eller på skubbebøjlen bagpå stolen. For at sænke/hejse stolen skal du trykke på 

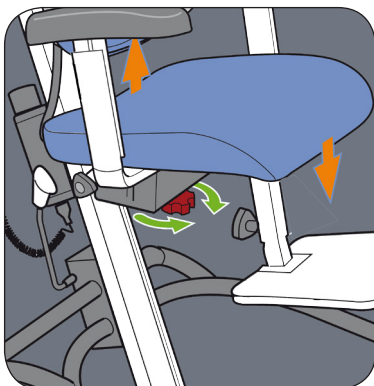

### 1.5.2 SÆDE

#### 1.5.2.1 SÆDEKIP

Sædekip justeres ved hjælp af håndgrebet under sædet.

#### 1.5.2.2 BETRÆK

Betrækket kan ikke afmonteres, men kan lynes op, hvorved man kan komme ind til komfortkilerne.


Se i øvrigt gode råd til vedligeholdelse af betrækket på side 6.


#### 1.5.2.3 KOMFORTKILER

Det er muligt at tilpasse sædet til barnet ved at indstille de medfølgende komfortkiler.

#### 1.5.2.4 SKUMZONE

Der er lavet skumzoner i sædet. De giver mulighed for at tilpasse stolen perfekt til det enkelte barn. Skumzonerne kan vendes, og man kan vælge mellem en hård og en blød zone.

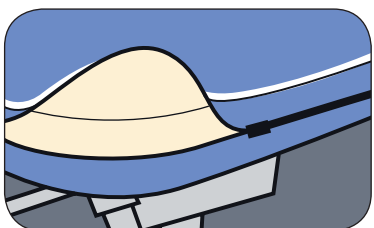

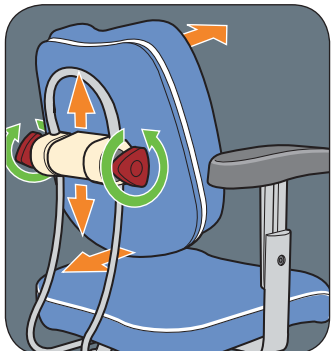


## 1.5.3 RYG

### 1.5.3.1 RYGDYBDEN

Ryggens dybde kan justeres vha. håndgrebene placeret lige under sædets bagkant i såvel højre som venstre side. Begge håndgreb skal løsnes for at justere placeringen af ryggen. Husk at spænde håndgrebet bagefter.

### 1.5.3.2 RYGVINKLING OG RYGHØJDE

Ryggen vinkles vha. de to håndgreb, der er placeret bag på ryggen. Begge håndgreb skal løsnes for at ændre rygvinklingen. Husk at spænde håndgrebet bagefter. Disse håndgreb bruges også til at justere ryghøjden med.

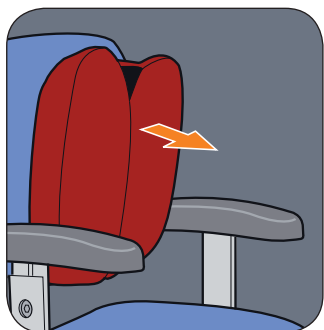


### 1.5.3.3 AFTAGELIG RYG

Det er muligt at tage rygpuden af og vaske betrækket på skånevask og maks. 30 grader. Via lynlåsen på bagsiden af rygpuden er det muligt at komme ind til selve polstringen, hvor man evt. kan indsætte ekstra støtte. **BEMÆRK:** Dette gælder ikke den mindste stol i serien, VELA Hip Hop 300 og VELA Hip Hop 300E. Der kan rygpuden og betrækket ikke tages af.

### 1.5.3.4 HVILESTILLING

VELA Hip Hop 300-serien giver mulighed for, at barnet kan hvile sig i stolen. Dette gøres ved at:

1. Låse hjulene
2. Træd på udløserpedalen på bagsiden af søjlen. Der kan vælges mellem fire forskellige positioner.

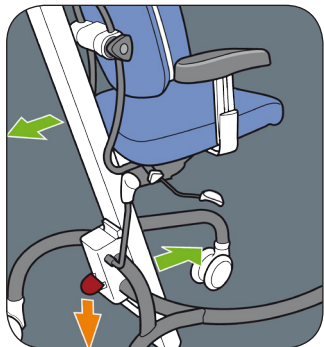


**VIGTIGT!** Hold godt fast i søjlen for at undgå en for kraftig vipning af sædet.

Ved ændring af sædekip til og fra hvilestilling, skal der udvises stor agtpågivenhed for personer i nærheden af stole.

### 1.5.3.5 BREMSEFUNKTION

VELA Hip Hop har centralbremse på alle fire hjul, som aktiveres vha. håndbremsen til højre for barnet. Håndbremsen skubbes fremad for at låse hjulene og bagud for at låse dem op.


**VIGTIGT:** Stolen kører meget let, når den ikke er bremset og brugeren ikke sidder i stolen.

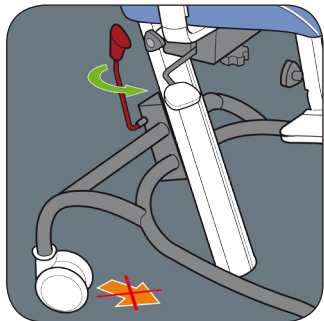

Bremsestangen kan flyttes fra højre til venstre side ved at løsne pinolskruen med det medfølgende værktøj, som sidder for enden af bremsestangen.

### 1.5.3.6 NAKKESTØTTE

Justering af nakkestøtten foretages ved at løsne skruberne.

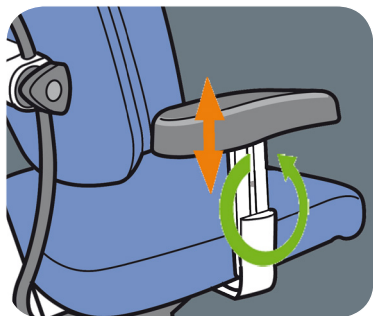


### 1.5.3.7 ARMLÆN

Armlænene kan justeres i såvel højden som bredden. I højden gøres det ved at løsne skruen med den medsendte nøgle. Husk at spænde dem godt igen. Bredden indstilles under sædet i tilbehørsrillen ved at løsne de to skruber og justere metalskinnen, der holder armlænet. Husk at spænde godt bagefter med det medsendte værktøj.

### 1.5.3.8 SKUBBEBØJLE

Skubbebøjlen kan justeres i højden ved at løsne håndgrebet. Husk at spænde den godt bagefter.

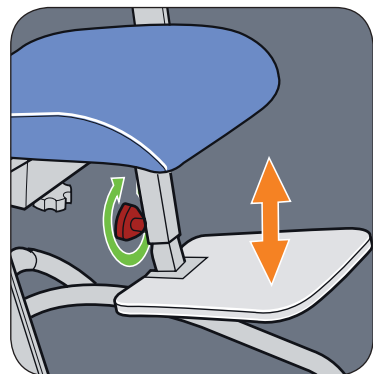

### 1.5.3.9 FODSTØTTER


Fodstøtten, som er standard på VELA Hip Hop 300-serien, kan afmonteres. Fodpladen kan indstilles i højden ved at løsne håndgrebet, som findes bag ved fodpladen. Husk at spænde den godt bagefter.

### 1.5.4 TILBEHØR

Tilbehør er som standard monteret ved levering

#### 1.4.5.1 EFTERMONTERING AF TILBEHØR:

- Sidestøtter skal monteres på armlænet.
1. Skru unbracco-skruen ud (skal bruges igen), og træk det indvendige plastik af ved at fjerne de fire skruber.
  2. Sidestøtterne monteres på indersiden af armlænet, og umbracoskruen skrues i igen.

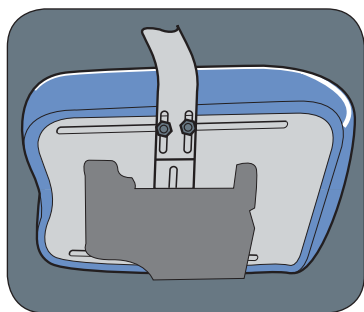

- Seler og veste
- Lårstyrer

De eftermonteres i de to riller i hver side af bunden af sædet. Montering i rillerne sker ved følgende tilbehør:

#### 1.5.4.2 FOD- OG ANKELBESPÆNDING

Denne eftermonteres ved at sætte båndet igennem hullerne i fodpladen.

#### 1.5.4.3 KROPSSTØTTER

Kropsstøtter sættes fast i ryglænet som nakkestøtten.

#### 1.5.4.4 KNÆSTOP

Knæstop monteres ved at skrue det fast i ophænget i sædet.

#### 1.5.4.5 BORD

Bordet sættes fast i ophænget til armlænet.

### 1.5.5 VIGTIGT VEDR. VELA HIP HOP 300E BATTERI

#### 1.5.5.1 OPLADNING AF BATTERIBOKSEN

Opladning skal ske ved den medfølgende batterilader. Opladningstiden er ca. 8 timer. Det røde lys på laderen fortæller at der er strøm til laderen, og den grønne lampe blinker ved ladning og lyser konstant, når batteriet er opladet.

#### 1.5.5.2 ISÆTNING AF BATTERI

Batteriet isættes ved at sætte det ned i holderen og dreje det, til det giver en lav hyletone, hvilket betyder, at det er placeret korrekt.

#### 1.5.5.3 OPLADNING AF BATTERI

Daglig opladning anbefales. Ladeapparatet er elektronisk styret og kan efterlades tilkoblet indtil næste gang, man skal bruge stolen.

#### 1.5.5.4 ADVARSEL, VELA HIP HOP 300E

Denne stol er kun beregnet til 230V. Ladeapparatet må ikke udsættes for fugt eller vand, og det må ikke tildækkes. Børn og husdyr må ikke have adgang til det tilsluttede ladeapparat, og kun det medfølgende originale ladeapparat må benyttes.

### 1.5.6 TEKNISK INFORMATION

#### Sæde:

- Betræk: polyester
- Plastdele: PA6-GF

#### Stel:

- Pulverlakeret stål

	VELA Hip Hop 300 (gas-hejs)	VELA Hip Hop 300E (el-hejs)
Siddehøjde	28-64 cm	26-64 cm
Sæde	27(b) x 30 cm, 32(b) x 35 cm 36(b) x 43 cm, 40(b) x 47 cm	27(b) x 30 cm, 32(b) x 35 cm 36(b) x 43 cm, 40(b) x 47 cm
Sædedybde	25-30 cm, 30-35 cm, 35-43 cm, 39-47 cm	25-30 cm, 30-35 cm, 35-43 cm, 39-47 cm
Ryg	22(b) x 18 cm, 26(b) x 26 cm, 28(b) x 35 cm	22(b) x 18 cm, 26(b) x 26 cm, 28(b) x 35 cm
Armlæns pude	20 x 6 cm	20 x 6 cm
Armlæns højde	10-22 cm	10-22 cm
Afstand mellem armlæn	21-29 cm, 26-34 cm 30-38 cm, 34-38 cm	21-29 cm, 26-34 cm, 30-38 cm, 34-38 cm
Fodstøtte	22-32 cm, 27-43 cm	22-32 cm, 27-43 cm
Sædevinkling	-8° - +10°	-8° - +10°
Rygvinkling	+/- 20°	+/- 20°
Hvilestilling	24°	24°
Understel	55(b) x 73 cm	55(b) x 73 cm
Vægt	24 kg	26 kg
Kapacitet	60 kg	60 kg
Hmi-nr.	42927	42925



VELA · Gøteborgvej 12 · 9200 Aalborg SV · Tlf: 9634 7600 · mail@vela.dk · www.vela.eu