

# DARO

by able 

## Brugervejledning

# Kørepose med gribebånd

Blød og faconsyet kørepose med høj ryg. Fås i børne- og voksenstørrelser. Fremstillet i et åndbart, vind- og vandafvisende kvalitetsmateriale og isoleret med varm Thinsulate.

Vandafvisende



Vindtæt



Åndbar



Vaskbar



Varenr. (voksne): 1-04X TH

Varenr. (børn): 1-045XX TH

**Kære kunde,**

**Tak fordi du valgte et produkt fra DARO. Vi håber du bliver glad for det og får mange gode oplevelser ude i det fri.**

**Læs denne brugervejledning, inden du bruger køreposen.**



### Sikkerhedsregler

- ⚠️ Brug kun en kørepose, der passer til brugerens størrelse.
- ⚠️ Brug **aldrig** køreposen, hvis dele er frigjort, i stykker eller mangler. Der er fare for, at det kan sætte sig fast i hjulene.
- ⚠️ Immobile eller plejkrævende brugere må **ikke** lades alene eller være uden opsyn, når køreposen er på.
- ⚠️ Vær opmærksom på brugerens temperatur og reguler påklædningen derefter. Dette for at undgå overophedning.
- ⚠️ Benytter brugeren sele, skal denne **altid** være fastspændt ved brug af kørepose, således brugeren ikke glider ned.

### Reklamationsret

DARO yder 2 års reklamationsret i henhold til dansk købelov. Det omfatter materiale- og produktionsfejl og således **IKKE** ved:

- Forkert brug.
- Forkert vask.
- Forkert vedligehold.
- Uautoriseret indgreb.
- Almindelig slidtage.

### Køreposens funktioner

- Vind- og vandafvisende.
- Åndbar.
- Varm Thinsulate-isolering og blød fleeceforing.
- Faconsyet og med høj ryg.
- Sædestykke i skridsikker regnstof.
- Åbnes i venstre side med gribebånd - fra taljen og ned til bundpladen.
- Bomuldsbånd isyet som "håndtag", for at brugeren nemmere kan åbne posen.
- Bundplade udvendig og indvendig i sort kunstlæder og med Thinsulate-isolering imellem. Herunder gribebånd til fastgørelse om fodpladen.
- Bagstykke med gribebånd, for fastgørelse til kørestolen.
- Sikkerhedsreflekser på forstykket for bedre synlighed i mørke.
- Elastik i taljen.
- Huller til hofteseler.
- Forsyet til abduktionsklods.

## Sådan bruges køreposen

1. Placer køreposen i stolen og fastgør den med gribebåndene i hver side og bagom ryggen.
2. Fastspænd bundpladens gribebånd under stolens fodplade.
3. Åbn køreposen vha. gribebåndene på forstykket.
4. Før hofteselerne ud gennem hullerne i hver side og placer brugeren i stolen og fastspænd.
5. Placer først venstre forstykke over brugeren og dernæst højre og luk gribebåndene.

**TIP!** Ved brug af abduktionsklods klippes den forsyede del forsigtigt op. Klip **ikke** i syningerne, men i midten.



Køreposen skal placeres **mellem** brugers fødder og kørestolens fodplade.

## Vask

- ⚠ Denne vaskeanvisning **SKAL** følges. Vaskes produktet forkert, er der risiko for beskadigelse og forkortet produktlevetid.
- ⚠ Anvend **IKKE** skyllemiddel, iblødsætning eller vaskemiddel med blege-stoffer.

## Vask i maskine

1. Luk gribebåndene og læg køreposen i tromlen med vrangen ud.
2. Benyt kun en lille mængde vaskemiddel **uden** blegestoffer.
3. Vask køreposen ved **max. 60°C** og ved lav centrifugering.
4. Hæng køreposen til tørre. Den kan også tørretumbles ved lav varme.



Ingen  
blegemiddel



Skånevask  
max. 60°C



Tørretumbling  
ved lav varme



Strygning ved  
lav varme



Rens er  
muligt

## Vedligehold

- Tjek jævnligt køreposen for skader.
- Brug **aldrig** køreposen, hvis dele er frigjort, i stykker eller mangler.

## Materiale

### Yderstof

- OEKO-TEX® 100-certificeret.



- 100% polyester med PU-coating.

## Isolering

- OEKO-TEX® 100-certificeret.
- Thinsulate P100.



## Foer

- OEKO-TEX® 100-certificeret.
- 100% polyester fleece.

## Teknisk info

### Yderstof

- Vandsøjletryk: 10.000 mm.
- Åndbarhed: 5.000g/m<sup>2</sup>.
- Kvadratmetervægt: 135g/m<sup>2</sup>.

### Isolering

- Evne: Bevarer isoleringen i fugtige omgivelser og tørrer hurtigt.
- Kvadratmetervægt: 95g/m<sup>2</sup>
- Isolering: 0,30 Rct.
- Tykkelse: 1,1 cm.

### Foer

- Anti-peeling.
- Kvadratmetervægt: 300g/m<sup>2</sup>.

# DARO

by able

able nordic a/s  
DARO  
Skavholmvej 8C, 1.  
DK-8520 Lystrup  
Danmark

Tlf. (+45) 75 88 16 22  
daro@ablenordic.dk  
www.daro.dk

## DARO - dansk producent af tøj til alle typer handicap

Hos DARO brænder vi for at lave tøj til alle typer handicap - tøj, som kan give dig en øget livskvalitet, komfort og lette din hverdag. DARO har mere end 40 års erfaring med at designe og sy moderigtigt og funktionelt tøj til både børn og voksne. Vi kan specialtilpasse tøjet præcis til dig og hjælper gerne med nye løsninger, hvis du har specifikke behov. Se hele DAROs produktudvalg på [www.daro.dk](http://www.daro.dk).

DARO er tøj til DIG og tøj med omtanke.