

SAFE-MED

Trykfordelende Produkter

SAFE Med Siddepuder:

Materiale i 100% SAFE ViscoPore:

Viskoelastisk temperaturfølsom skum



ViscoPore
HEALTH & FUNCTION




Overvægt
op til 180 kg




Op til 125 kg

Halebensproblem

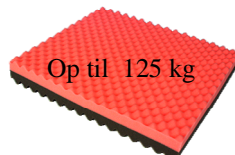

Op til 125 kg

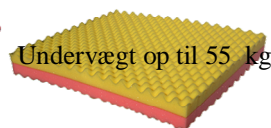


Undervægt op til 55 kg



Op til 125 kg

Til Kørestol
buget bund

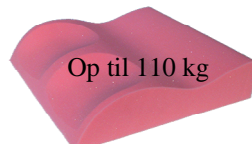

Op til 110 kg

Holder personen
tilbage i stolen

Effektiv trykfordeling - nem at bevæge sig på - meget god komfort

SAFE Med anti-decubitus siddepuder

i trykfordelende SAFE ViscoPore visko-elastisk skum, der former sig efter brugeren og forlænger tiden for den enkelte i siddende stilling.

SAFE Med anti-decubitus siddepuder er

specielt designet til trykfordeling og trykaflastning til forebyggelse af tryksår—til heling af tryksår, samt til lindring af forskellige lidelser, og for at reducere smerter for personer med forskellige problematikker.

Brugervægt dækkes op til 180 kg

Materiale:

SAFE ViscoPore 100% visko-elastisk skum:

Vægtfylde Gul SAFE ViscoPore 57 kg/m³

Vægtfylde Rosa SAFE ViscoPore 60 kg/m³

Vægtfylde Grå SAFE ViscoPore 65 kg/m³

Vægtfylde Vanilje SAFE ViscoPore 100 kg/m³

Eksempel på Vægt Siddepuder:

40 x 40 x 6 cm = 0,50 kg

45 x 45 x 6 cm = 0,65 kg

50 x 45 x 6 cm = 0,8 kg

Comfor Inkontinensbetræk i sort farve er åndbart og strækbart, fås med dækket lynlås på to sider, anti-slip bagside i grå og med praktisk håndtag - eller betræk med åben bagside.

Soft-Cell Inkontinensbetræk har hudvenlig overflade som SILKE, men absorberer mere fugt end bomuld, fås som heldækkende eller med åben bagside.

HMI numre på SAFE Med siddepuder:

Flere bredder der dækker området fra 40-50 cm

Flere dybder der dækker området fra 40-50 cm

Rengøringsmetoder:

SAFE Med siddepuder kan maskinvaskes ved op til 95°C og tørre-tumbles ved høj varme.

Comfor betræk kan maskinvaskes ved op til 95°C og tørre-tumbles ved svag varme. Sæbevand og alkoholopløsning må anvendes ved aftørring.

Soft-Cell betræk kan maskinvaskes ved 60 grader og tørre-tumbles ved svag varme.

Brandtest:

Siddepuder opfylder EN 1021-1 og 2

Comfor PUR Betræk opfylder BS 7175: Crib 5

Soft-Cell opfylder EN 597-1 & ISO 12952-1:2011

Bortskaffelse: Ingen halogener og afgiver ingen skadelige gasser.

Afbrændes på en normal affaldsplads med husholdningsaffald. Skummet udleder hovedsageligt kuldioxid og vand ved bortskaffelse og skader ikke miljøet eller mennesker.

Opbevaring: Liggende plan

Produktionsland: Schweiz & Danmark




SAFE-MED

Trykfordelende Produkter


SAFE Med Siddepuder

Materiale i 100% SAFE ViscoPore:

Vskoelastisk temperaturfølsom skum

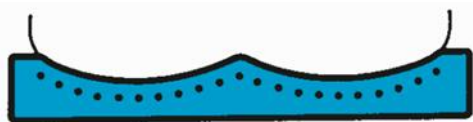

ViscoPore
HEALTH & FUNCTION

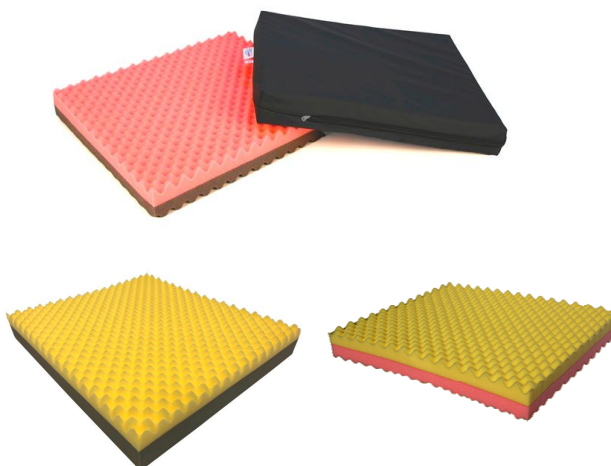

Effektiv trykfordeling - nem at bevæge sig på - meget god komfort

SAFE Med siddepuder vælges efter brugervægt / med brugervægt op til 180 kg

Materiale: SAFE ViscoPore visko-elastisk temperatur følsom trykfordelende skum.

Forebyggelse af tryksår i forhold til BRADEN skalaen

Lav risiko: Score 15-18

Middel risiko: Score 13-14

Høj risiko: Score 10-12

Personer med tryksår

Stadie 0

Stadie 1

Stadie 2

Stadie 3

GODE RÅD i siddende stilling - Når du sidder i stol eller kørestol.

Når du sidder, må du sidde på en pude som passer til din vægt, former sig og fordeler trykket.

Samtidig er det vigtigt med en god holdning og eventuelt at supplere med en lændestøtte.

En god holdning tillader at du bevæger dig lettere for at undgå friktion og forskydningskræfter.

Nem og rigtig bevægelse er vigtig for at forebygge trykmærker og tryksår.

Ryglænet på stolen må være i orden.

Sørg for at siddestillingen er korrekt.

Husk at presse op i stolen.

Kan du bruge armene, pres op 15 sekunder hvert 15. minut.

Kan du ikke presse dig op med armene, må du få nogen til at hjælpe dig med at skifte stilling. F.eks. Ved at læne dig forover, læne dig bagover, til siden eller lægge benene skiftevis over kors.

Undgå for stramt tøj og folder på tøjet. Bruger du jeans, må du være opmærksom på at de ofte har tykke baglommer. Fjern dem hvis det er tilfældet. Det er vigtigt at siddepudebetræk er strækbart og åndbart, for at undgå fugt.


Rengøringsvejledning:

SAFE Med Siddepuder kan maskinvaskes og tørretumbles

Comfor Inkontinensbetræk kan maskinvaskes og tørretumbles

Sæbevand og alkoholopløsning må anvendes ved aftørring.

Soft-Cell kan maskinvaskes og tørretumbles

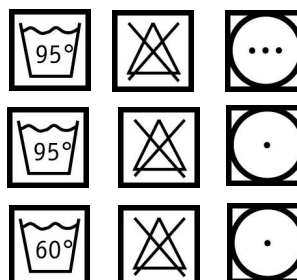

NAVN:

SCORESKEMA med brug af BRADEN

Person nr.:

Højde: Vægt: BMI:	Eller→	Undervægt:	Normalvægt:	Overvægt:
-------------------------	--------	------------	-------------	-----------

Dato: Initialer: Dato: Initialer: Dato: Initialer: Dato: Initialer: Dato: Initialer:

Sensorisk Perception: Helt begrænset Meget begrænset Lidt begrænset Ingen svækkelse	1 2 3 4					
Fugt: Konstant fugt Meget fugt Lejlighedsvis fugt Sjældent fugt	1 2 3 4					
Aktivitet: Bundet til sengen Bundet til en stol Går en gang i mellem Går hyppigt	1 2 3 4					
Mobilitet: Helt immobil Meget begrænset Let begrænset Ingen begrænsning	1 2 3 4					
Ernæring: Meget dårlig Sandsynligvis utilstrækkelig Tilstrækkelig Udmærket	1 2 3 4					
Gnidning og forskydning Problem Potentielt problem Ikke noget iagttageligt problem	1 2 3					
Sammenlagt score:						
Ryk til næste risiko niveau! Hvis yderligere risikofaktorer er gældende som:	Sæt Kryds:					
Høj alder	→	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feber	→	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lille indtagelse af protein	→	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diastolisk blodtryk under 60	→	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hemodynamisk ustabilitet	→	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Næste risiko niveau:						

- Lav risiko: Score 15-18 SAFE Med siddepude valgt ud fra Vægt/BMI
- Moderat risiko: Score 13-14 SAFE Med siddepude valgt ud fra Vægt/BMI
- Høj risiko: Score 10-12 SAFE Med siddepude valgt ud fra Vægt/BMI
- Ekstra høj risiko: Score ≤9 SAFE Med siddepude valgt ud fra Vægt/BMI

Personens Vægt/BMI afgør siddepude valg:

- Vægt max 55 kg /BMI < 20 Undervægt** SAFE Med siddepude – nr. 104YP, Gul/Rosa
- Vægt op til 80 kg/ BMI op til 25 Normal vægt SAFE Med siddepude – nr. 105P, Rosa
- Vægt op til 125 kg /BMI op til 33 Normal-Overvægt** SAFE Med siddepude – nr. 104, Rosa/Grå
- Vægt op til 150 kg/BMI op til 35 Meget Overvægt SAFE Med siddepude – nr. 105G, Grå
- Vægt op til 180 kg /BMI op til 40 Svær overvægt** SAFE Med siddepude – nr. 105YG, Gul/Grå