

Brugervejledning Knæpose

Blød og faconsyet knæpose uden sæde. Fås til både børn og voksne.
Fremstillet i et åndbart, vind- og vandafvisende kvalitetsmateriale
med varm Thinsulate isolering og blød fleeceforing.

Vandafvisende



Vindtæt



Åndbar



Vaskbar



Varenr. (voksne): 1-01XTH

Varenr. (børn): 1-015XXTH

Kære kunde,

Tak fordi du valgte et produkt fra DARO. Vi håber du bliver glad for det og får mange gode oplevelser ude i det fri.

Læs denne brugervejledning, inden du bruger knæposen.



Sikkerhedsregler

- ⚠️ Brug kun en knæpose, der passer til brugerens størrelse.
- ⚠️ Brug **aldrig** knæposen, hvis dele er frigjort, i stykker eller mangler. Der er fare for, at det kan sætte sig fast i hjulene.
- ⚠️ Immobiler eller plejekrævende brugere må **ikke** lades alene eller være uden opsyn, når knæposen er på.
- ⚠️ Vær opmærksom på brugerens temperatur og reguler påklædningen derefter. Dette for at undgå overophedning.
- ⚠️ Benytter brugeren sele, skal denne **altid** være fastspændt ved brug af knæpose, således brugeren ikke glider ned.

Reklamationsret

DARO yder 2 års reklamationsret i henhold til dansk købelov. Det omfatter materiale- og produktionsfejl og således **IKKE** ved:

- Forkert brug.
- Forkert vask.
- Forkert vedligehold.
- Uautoriseret indgreb.
- Almindelig slidtage.

Knæposens funktioner

- Vindtæt, åndbar og vandafvisende.
- Varm Thinsulate-isolering og blød fleeceforing.
- Faconsyet og uden sæde.
- Lynlås i hver side fra knæhaserne og ned til bundpladen.
- Bagstykke med bred og blød ribdel, der slutter under knæhaserne.
- Bundplade udvendig og indvendig i sort kunstlæder og med Thinsulate-isolering imellem.
- Sikkerhedsreflekser på forstykket for bedre synlighed i mørke.



Sådan bruges knæposen

1. Placer brugeren i kørestolen.
2. Lyn lynlåsene ned i hver side.
3. Placer brugerens fødder ovenpå bundpladen og læg forstykket op over benene.
4. Lyn lynlåsene op.
5. Hoftestykkerne puttes ind mellem brugerens og kørestolens ryg.



Knæposens bundplade skal placeres **mellem** brugers fødder og kørestolens fodplade.

Vask

- ⚠ Denne vaskeanvisning **SKAL** følges. Vaskes produktet forkert, er der risiko for beskadigelse og forkortet produktlevetid.
- ⚠ Anvend **IKKE** skyllemiddel, iblødsætning eller vaskemiddel med blegestoffer.

Vask i maskine

1. Luk lynlåsene og læg knæposen i tromlen med vrangen ud.
2. Benyt kun en lille mængde vaskemiddel **uden** blegestoffer.
3. Vask knæposen ved **max. 60°C** og ved lav centrifugering.
4. Hæng knæposen til tørre. Den kan også tørretumbles ved lav varme.



Ingen blegemiddel



Skånevask max. 60°C



Tørretumbling ved lav varme



Strygning ved lav varme



Rens er muligt

Vedligehold

- Tjek jævnligt knæposen for skader.
- Brug **aldrig** knæposen, hvis dele er frigjort, i stykker eller mangler.

Materiale

Yderstof

- OEKO-TEX® 100-certificeret.



- 100% polyester med PU-coating.

Isolering

- OEKO-TEX® 100-certificeret.
- Thinsulate P100.



Foer

- OEKO-TEX® 100-certificeret.
- 100% polyester fleece.

Teknisk info

Yderstof

- Vandsøjletryk: 10.000 mm.
- Åndbarhed: 5.000g/m².
- Kvadratmetervægt: 135g/m².

Isolering

- Evne: Bevarer isoleringen i fugtige omgivelser og tørrer hurtigt.
- Kvadratmetervægt: 95g/m²
- Isolering: 0,30 Rct.
- Tykkelse: 1,1 cm.

Foer

- Anti-peeling.
- Kvadratmetervægt: 300g/m².

DARO

by able

able nordic a/s
DARO
Skavholmvej 8C, 1.
DK-8520 Lystrup
Danmark

Tlf. (+45) 75 88 16 22
daro@ablenordic.dk
www.daro.dk

DARO - dansk producent af tøj til alle typer handicap

Hos DARO brænder vi for at lave tøj til alle typer handicap - tøj, som kan give dig en øget livskvalitet, komfort og lette din hverdag. DARO har mere end 40 års erfaring med at designe og sy moderigtigt og funktionelt tøj til både børn og voksne. Vi kan specialtilpasse tøjet præcis til dig og hjælper gerne med nye løsninger, hvis du har specifikke behov. Se hele DAROs produktudvalg på www.daro.dk.

DARO er tøj til DIG og tøj med omtanke.