

Brugervejledning Neptun regnslag inkl. pose

Let og åndbart regnslag til manuelle kørestole med lav ryg. Fås i børne- og voksenstørrelser. Fremstillet i et blødt, vind- og vandtæt kvalitetsmateriale med tapede sømme og mange funktionelle detaljer.

Vandtæt



Vindtæt



Åndbar



Tapede sømme



Vaskbar



Varenr. (voksne): 4-02X

Varenr. (børn): 4-025XX







Kære kunde,

Tak fordi du valgte et produkt fra DARO. Vi håber du bliver glad for det og får mange gode oplevelser ude i det fri.

Læs denne brugervejledning, inden du bruger regnslaget.



Sikkerhedsregler

-  Brug kun et regnslag, der passer til brugerens størrelse.
-  Brug kun regnslaget sammen med en manuel kørestol med lav ryg.
-  Brug **aldrig** regnslaget, hvis dele er frigjort, i stykker eller mangler. Der er fare for, at det kan sætte sig fast i hjulene.
-  Immobiler eller plejekrævende brugere må **ikke** lades alene eller være uden opsyn, når regnslaget er på.
-  Vær opmærksom på brugerens temperatur og reguler påklædningen derefter. Dette for at undgå overophedning.
-  Benytter brugeren sele, skal denne **altid** være fastspændt ved brug af regnslaget, således brugeren ikke glider ned.

Reklamationsret

DARO yder 2 års reklamationsret i henhold til dansk købelov. Det omfatter materiale- og produktionsfejl og således **IKKE** ved:

- Forkert brug.
- Forkert vask.
- Forkert vedligehold.
- Uautoriseret indgreb.
- Almindelig slidtage.

Regnslagets funktioner

- Vandtæt op til 10.000 mm.
- Åndbarhed på 5.000g/m².
- Tapede sømme.
- Justerbar hætte med snøre.
- Skyggekant på hætte, der beskytter ansigtet mod regn, slud og sne.
- Lille vindfang ved halsåbningen, som åbnes og lukkes med gribebånd og gør det nemmere at få regnslaget af og på.
- Rummelig facon som dækker hele brugerens krop.
- Ærmer med elastik ved handleddene.
- Indsyet elastik rundt i hele kanten, så regnslaget slutter tæt om kørestolen.
- Sikkerhedsreflekser foran, bagpå, på ærmer og som piping på hættens skyggekant for bedre synlighed i mørke.
- Lomme foran med flap som let lukkes med gribebånd.
- Huller til kørehåndtag.
- Pose til opbevaring.

Sådan bruges regnslaget

Bemærk: Dette regnslag er kun beregnet til manuelle kørestole med lav ryg.

1. Åbn vindfanget og tag regnslaget over hovedet. Det skal dække hele brugerens krop.
2. Træk regnslaget ud over ryggen på kørestolen, samt ned om brugerens fødder. Dette således, at regnslaget placeres **mellem** brugers fødder og kørestolens fodplade.
3. Kontroller at regnslaget slutter til og **ikke** går ind i hjulene.

OBS! Regnslaget skal være helt tørt, inden det pakkes ned i den medfølgende pose.



Regnslaget skal placeres **mellem** brugers fødder og kørestolens fodplade.

Vask

- ⚠ Denne vaskeanvisning **SKAL** følges. Vaskes produktet forkert, er der risiko for beskadigelse og forkortet produktlevetid.
- ⚠ Anvend **IKKE** skyllemiddel, iblødsætning, vaskemiddel med blegestoffer eller vaskemiddel i pulverform.

TIP! Den mest skånsomme måde at vaske et DARO-regnslag på er, at skylle synligt snavs af under rindende vand. Dermed bevarer regnslaget sine egenskaber længst muligt. Brug ikke børste eller klud ved synligt sand, da det vil ødelægge den vandtætte belægning. Lad regnslaget lufttørre.

Vask i maskine

1. Skyl løst mudder og snavs af regnslaget under rindende vand. Luk gribebåndslukningerne og læg regnslaget i tromlen med vrangen ud.
2. Benyt kun en lille mængde flydende vaskemiddel **uden** blegestoffer.
3. Vask regnslaget ved **max. 40°C** og undgå centrifugering.
4. Regnslaget må **IKKE** tørretumbles, men skal dryp-/lufttørre på eks. en bøjle.



Ingen blegemiddel



Skånevask max. 40°C



Ingen tørretumbling



Dryptørring anbefales



Rens er muligt

OBS! For hver maskinvask nedbrydes en lille del af den vandtætte belægning, hvilket vil forkorte regnslagets levetid.

Vedligehold

- Tjek jævnlgt regnslaget for skader.
- Brug **aldrig** regnslaget, hvis dele er frigjort, i stykker eller mangler.
- Sørg for at regnslaget er helt tørt, inden det pakkes ned.

Materiale

- OEKO-TEX® 100-certificeret.



- 100% polyester med PU-coating.

Teknisk info

- Vandsøjletryk: 10.000 mm.
- Åndbarhed: 5.000g/m².
- Kvadratmetervægt: 135g/m².

DARO

by able 

able nordic a/s
DARO
Skavholmvej 8C, 1.
DK-8520 Lystrup
Danmark

Tlf. (+45) 75 88 16 22
daro@ablenordic.dk
www.daro.dk

DARO - dansk producent af tøj til alle typer handicap

Hos DARO brænder vi for at lave tøj til alle typer handicap - tøj, som kan give dig en øget livskvalitet, komfort og lette din hverdag. DARO har mere end 40 års erfaring med at designe og sy moderigtigt og funktionelt tøj til både børn og voksne. Vi kan specialtilpasse tøjet præcis til dig og hjælper gerne med nye løsninger, hvis du har specifikke behov. Se hele DAROs produktudvalg på www.daro.dk.

DARO er tøj til DIG og tøj med omtanke. 