



Zibo Wiggle & Zibo Flex

Brugervejledning







Indhold

Indledning	3
Produktbeskrivelse	4
Udpakning af produktet	4
Rengøring - Klargøring	5
Generelle oplysninger	6
Symbolforklaring	7



VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER OG KONTRAINDIKATIONER

Læs alle instruktioner før brug

-  Produktet må kun anvendes til det tiltænkte formål som beskrevet i denne vejledning. Produktet må ikke kombineres, samles eller repareres med andre dele, andet tilbehør eller andre reservedele end dem, der er beskrevet i denne vejledning eller i anden dokumentation fra ZiboCare.
-  **PRODUKTET MÅ IKKE ANVENDES** i nærheden af eller i forbindelse med brandkilder/varme overflader som f.eks. ild, brændende cigaretter eller varme lamper. Selvom produktet er brandtestet, kan det beskadiges, hvis det kommer i kontakt med brandkilder.
-  Anbring og brug produktet på en måde, så de ikke klemmes eller beskadiges. **BEMÆRK!** Vær særlig opmærksom på risikoen for, at madrassen kan komme i klemme ved brug af sengeheste.
-  Kontrollér altid, at produktet har en passende størrelse.
-  Sørg for, at produktet placeres korrekt, så risiko for kvælning undgås.
-  Undgå skarpe genstande, der kan beskadige produktet og/eller betrækket.

Indledning



Læs altid hele brugsanvisningen før brug.

Erklæret formål og anvendelse

Produktets hensigt er at gøre lejring eller positionering af brugeren så komfortabelt som muligt.

Det anbefales, at patientens stilling ændres regelmæssigt. Tidsintervallet skal vurderes af det ansvarlige personale alt efter patientens status, diagnose og almene tilstand.

Kliniske fordele

Madrassen kan bruges som hjælp til at:

- forebygge og behandle tryksår/shear skader.
- reducerer smerter.
- give en rolig og uforstyrret søvn, hurtigere rehabilitering.
- reducerer kontraktur.

Tilsigtet målgruppe

Patienter der er i risiko for eller i behandling af tryksår, patienter med smerter og forbyggelse og behandling af kontraktur.

Produktbeskrivelse

Lejringspuden er en alsidig pude der bruges i forbindelse med lejrning og trykaflastning. Produktet kan herved have en positiv indvikning på en bedre og mere tryk søvn samt afhjælpe eller forbygge kontrakturer. Produktet består af polysturenkugler samt et betræk af bomuld der har en vandafvisende coding på overfladen.

Lejringspuden fås i følgende størrelser:

Navn	REF nr.	Størrelse	HMI nr.
Zibo Wiggle		20x200x14 cm	
Zibo Flex		20x200x14 cm	
Zibo Flex		20x200x14 cm	

Kontakt ZiboCare på 76 900 407, post@zibocare.dk eller besøg vores hjemmeside www.zibocare.dk for at få flere oplysninger.

Udpakning af produktet

Produktet leveres indpakket i genanvendelig plast.

Begynd med at kontrollere, at emballagen er ubeskadiget. Fjern plastikposen og eventuelt beskyttelsesmateriale. Undgå at bruge en kniv, når emballagen åbnes, da dette kan beskadige produktet.

Kontrollér altid om produktet er i god stand.

Rengøring og klargøring

Det er vigtigt at følge nedenstående anvisninger, før produktet anvendes til en ny bruger. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte den hygiejneansvarlige eller leverandøren for at få hjælp og nærmere anvisninger.

VIGTIGT!

Kontrollér betrækket ved hver rengøring. Hvis betrækket er beskadiget, skal produktet udstiftes eller repareres. Følg omhyggeligt de lokale anvisninger og brugsanvisningerne til rengøringsmidlerne.

Bomulds betræk:

Betrækket kan maskinvaskes ved 40 °C, og tørretumbles ved lav varme eller dryptørres.

Indvendig pude:

Hvis der anvendes et betræk, beskytter det den indvendige pude, og det er sjældent nødvendigt at rengøre puden. Hvis den indvendige pude af en eller anden årsag skal rengøres, kan den maskinvaskes ved 40 °C og tørretumbles ved lav varme eller dryptørres.

Afførings- og blodpletter skal straks fjernes med koldt vand. Følg omhyggeligt de lokale anvisninger og brugsanvisningen til rengøringsmidlerne.

Betræk med flere lag skal adskilles før vask. Skal vaskes med lignende farver. Klorin- og fenolbaserede rengøringsmidler kan have en negativ indvirkning på betrækoverfladen og bør undgås.

Vaskeanvisning



Generelle oplysninger

Dette produkt er medicinsk udstyr, klasse I og CE-mærket i henhold til Medical Device Regulation 2017/745 omhandlende medicinsk udstyr.

Opbevaring

Produktet skal altid opbevares ved stuetemperatur et tørt sted. Sørg for, at produktet opbevares et sted, hvor det ikke udsættes for stød, slag eller andet, der kan beskadige det. Undgå at udsætte produktet for direkte sollys.

Mærkning

Madraserne er mærket med produktnavn, produktionsdato, ref. nr., størrelse, pleje- og vaskeanvisninger samt LOT nr.

Garanti

Garanti: 2 år (standard uden for udbud).

Garantien dækker produktionsfejl. Garantien dækker ikke normalt slid, forringelse af produktet eller skader, der opstår som følge af skødesløs håndtering eller pleje af produktet.

Levetid

Produktets forventede levetid er 4 år med bevarelse af de trykaflastende egenskaber, der kan forventes levetid op til 10 år, dog skal madrassen så anvendes til patienter som ikke er direkte tryksårstruede. Holdbarhed på betrækket er 2 år vurderet ud fra den forventede daglige belastning af betrækket.

Service og vedligeholdelse

Produktet kræver ingen anden service eller vedligeholdelse end rengøring, som beskrevet i denne brugervejledning.

1.1 Reparation

Kontakt leverandøren for at få nærmere oplysninger om reparation.

1.2 Genvinding

Produktet er fuldt genvindelige og bør genvindes som "brændbart

affald". Produktet skal ikke skilles ad før genvinding.





1.3 Returnering og reklamationer

Reklamationer skal sendes til leverandøren. Returnering af et produkt skal ske i henhold til leverandørens anvisninger og kan først finde sted, når reklamationen er indberettet. Skader, der opstår under transport, skal rapporteres til transportvirksomheden.

Ulykker og hændelser

I henhold til myndighedernes bestemmelser vedrørende medicinsk udstyr er det producentens og sundhedspersonalets pligt at indberette ulykker og hændelser, som involverer deres produkter. Vi beder derfor om, at alle oplysninger om eventuelle ulykker og hændelser, som vedrører vores produkter, omgående indberettes til ZiboCare.

Symbolforklaring

	Advarsel		Maskinvaskes ved 40° C
	Ref nummer		Tørrerumbling ved lav temperatur
	Producent		Ingen blegning
	Fabrikant		Strygning ikke tilladt
	Artikel nummer		
	Medicinsk udstyr		
	Læs brugsanvisningen		
	CE-mærket iht. Medical Device Regulation 2017/745 om medicinsk udstyr		

KONTAKTINFORMATION



Produceret for og distribueret af:
ZiboCare Denmark ApS
Præstemarksvej 67, Hatting
8700 Horsens
www.zibocaredenmark.com

Ver.: 0.01
17.11.2022



ZiboCare[®]
Denmark