

**CE***Producent:  
Atoform®, Tyskland.***Beskyttelses hjelme:**

Tak fordi du valgte vores produkt. Vi er leveringsdygtige i mange forskellige typer beskytteshjelme. Stoffhjelme kan vi normalt levere fra dag til dag, mens hjelme der er fremstillet efter mål kan leveres inden for 2-3 uger. Læderhjelme laves altid på mål og kan leveres i mange forskellige farver, som f.eks. lyserød, blå, sort, grøn, grå, lysegrå, eller vælg selv en farve og vi undersøger om det kan lade sig gøre. Hjelmen vælges efter behovet for beskyttelse. Vi kan ikke garantere at hjelmen yder fuld beskyttelse ved alle typer "fald", men vi tilstræber at vælge den hjem vi finder bedst egnet. Hjelmene er testet i henhold til de normer der er gældende for disse produkter. **Det er vigtigt, at før hjelmen bestilles, man laver en risikoanalyse samt finder brugerens behov for beskyttelse, af hensyn til valget af hjelm.**

Stof/læderhjelme erstatter ikke cykelhjelm, knallerthjelm eller andre typer hjelme til sportsbrug. Hjelmene må ikke anvendes i forbindelse med badning/svømning, da det kan forandre hjelmens dimensioner. Kun hjelmen "Starlight Aqua" må anvendes til badning og svømning. Udsættes hjelmen for regn skal den hurtigst muligt sættes til tørre ved normal stuetemperatur. Ved problemer kontaktes firmaet Surcon. Ved henvendelse vedr. læderhjelme, oplys venligst serienummeret som står i bunden af hjelmen.

**Ved modtagelse:**

Kontroller altid produktet før anvendelse. Såfremt der findes fejl og mangler kontakt straks firmaet Surcon på nedenstående telefonnummer.

**Afprøvning.**

Sæt hjelmen på hoved. Juster hage og nakke rem så de går fri af ørerne. Spænd remmene til, men pas på at de ikke bliver for stramme. Ved kontrol, "Pres" forsigtigt lillefingeren ind under hageremmen under hagen og føl/hiv i remmen, for at se, om remmen er spændt for meget. Lad hjelmen side i ca. 20 min. Tag derefter hjelmen af. Såfremt der findes røde plamager /tryk sår efter hjelmen, må hjelmen først anvendes igen efter aftale med leverandøren. Såfremt der ikke er problemer, kan hjelmen anvendes. Se altid efter om der opstår trykmærker efter hjelmen, hvis det sker, skal leverandøren kontaktes. Passer hjelmen ikke eller er hjelmen defekt, kontakt straks leverandøren.

**Bemærk:** Sov ikke med hjelmen. Især læderhjelmen kan blive ødelagt (Mister sin form). Få lavet en hjelm der er bedre egnet til at sove med, hvis nødvendigt, men som udgangspunkt **skal** man ikke sove med hjelm. **(Kontakt leverandør).** Hvis man skal bruge hjelm hele døgnet, bør man have min. 2 stk. hjelme så man kan skifte imellem dem. Dermed kan hjelmen nå at tørre (På grund af sved) inden den skal anvendes igen. Brugeren skal altid være under opsyn. Åben ild og rygning er forbudt.

**Vaskeanvisning:**

**Stoffhjelme** kan vaskes i hånden eller ved maskinvask (Skånevask) ved 30 Grader.

**Husk at lukke Velcro lukninger før vask.**

Husk altid at fjerne løse spænder mm. før vask. Tørre tumbler må ikke anvendes.

**Læderhjelme** kan rengøres med en mild sæbe (Evt. sæbe til læder) på en let fugtig klud eller svamp. Hjelmen aftørres/vaskes forsigtigt med den fugtige klud eller svamp. Hjelmen skyldes herefter forsigtigt i lunken vand. Stil herefter hjelmen til tørre ved normal stuetemperatur og ikke i solen. Hjelmen må ikke anvendes før den er tør. Udsæt aldrig hjelmen for fugt og høj temperatur. Brug aldrig stærke opløsningsmidler, da det kan ødelægge læderet.

**Ved hjelme der leveret efter bevilling fra kommunen, skal brugeren efter modtagelse af hjelmen, såfremt hjelmen er ok, underskrive vedlagte/modtaget bevilling, bilag 2 fra kommunen. Bevillingen sendes til os pr. post, såfremt at der ikke er lavet en anden aftale.**

Jeg håber at du bliver tilfreds med hjelmen.  
Såfremt du har spørgsmål, kan jeg kontaktes på telefon 86 55 70 45.

Med venlig hilsen  
**SURCON CARE LINE ApS**

### Info.

**Stof hjelme:** Da konstruktionen er "Blød" i sin opbygning er dens evne til fordeling af faldet /"Slaget" meget begrænset, da hjelmen giver efter og beskyttelsen kun er afhængigt af skumtykkelsen. Disse typer hjelme må kun anvendes til de brugere der falder "blødt". Ved voldsomme fald har de kun en begrænset beskyttelse. Det anbefales, at anvende beskyttelsespudder, hvis de findes som tilbehør til hjelmen. Især store børn samt voksne har normalt behov for at anvende puderne.

### Starlight FLEX base:

Hjelmen kan tilpasses i hovedomfanget inden for et lille interval. Størrelsen reguleres ved at åbne de to låse på siden af hjelmen imens man trækker i kantbåndet på hjelmen, indtil hjelmen får den ønskede størrelse. Hjelmen **skal udvides** lige meget i begge sider. Det inderste kantbånd, hageremme samt de øverste stropper er monteret med Velcro. Ved justering skal alle dele løsnes. Efter udvidelsen placeres de enkelte dele således at det passer til brugerens hovedfacon. Det inderste kantbånd monteres til sidst.

### Starlight Aqua:

Denne hjelm er den eneste der er egnet til badning/svømning. Hjelmen skal altid skylles med ferskvand efter brug og hænges til tørre. Hjelmen kan vaskes i hånden eller ved maskinvask (Skånevask) ved 30 Grader. Da det er en "blød" hjelm, vil hjelmen kun have en begrænset beskyttelse ved meget voldsomme fald.

### Starlight Baseball Cap

Hjelmen findes i 5 forskellige størrelser. Det er muligt at justere størrelsen af hjelmen i et begrænset interval. Hjelmen har hagerem, som **altid** skal anvendes. Hjelmen er **kun egnet** dem der falder **meget** "blødt", som f.eks. de personer der tager fra ved faldet. Beskyttelsen er meget begrænset, da tykkelsen af beskyttelseslaget kun er ca. 8 -10 mm.

### Starlight Easy

Hjelmen laves efter mål. Hjelmens hagerem konstruktion medfører at hjelmen ikke kan anvendes af personer der er meget urolige eller hvor brugeren konstant hiver i hjelmen. Hjelmen sidder lidt mere "løst" ind de andre typer hjelme, da remmen ikke er ført rundt om nakken. Hjelmen har også en reduceret beskyttelsesoverflade.