



VELA Tango

VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL

Manual. nr. 105015



VELA Tango 100



VELA Tango 100
Artrodese



VELA Tango 200



VELA Tango 100EL



VELA Tango EI
Ståstøtte



VELA Tango 200EL

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.0. INDLEDNING	3
1.1. SIKKERHED	4
1.1.1. Anvendelse	4
1.1.2. Transport	4
1.2. REKLAMATIONSRET	4
1.3. UDPAKNING AF STOLEN	4
1.4. VEDLIGEHOLDELSE	5
1.4.1. Hjul	5
1.4.2. Stel	5
1.4.3. Polster	5
1.5. GENBRUG OG BORTSKAFFELSE	5
1.6. BRUGERMANUAL	7
1.6.1. Påsætning af ryglæn	7
1.6.2. Højdeindstilling (VELA Tango El)	7
1.6.3. Ændring af betjening (VELA Tango El)	7
1.6.4. Højdeindstilling (VELA Tango)	7
1.6.5. Indstilling af sædevinkel	8
1.6.6. Indstilling af rygvinkel	8
1.6.7. Indstilling af ryghøjde	8
1.6.8. Indstilling af armlæn, højde	8
1.6.9. Indstilling af armlæn, bredde	9
1.6.10. Bremse	9
1.6.11. Rotation (VELA Tango) (tilvalg)	9
1.6.12. Rotation (VELA Tango El) (tilvalg)	9
1.6.13. Ryg-rigel (VELA Tango 200 & 200El)	10
1.6.14. Opladning (VELA Tango El)	10
1.6.15. Artrodese-sæde (tilvalg)	10
1.6.16. Opklappelig fodstøtte (tilvalg)	10
1.6.17. Fodstøtte (tilvalg)	11
1.6.18. Skubbebøjle (tilvalg)	11
1.6.19. Fodpedal til bremse (tilvalg)	11
1.6.20. Vinkelkontakt (tilvalg)	11
1.6.21. Håndboks (tilvalg)	12
1.6.22. El-tilt (tilvalg)	12
1.6.23. El-bremse (tilvalg)	12

1.0. INDLEDNING

KÆRE KUNDE

Vi vil gerne takke dig for købet af VELA Tango. Vi er sikre på, at denne stol bliver til daglig glæde for dig. Denne brugermanual omhandler nyttige oplysninger om indstilling, betjening og vedligeholdelse af VELA Tango.

Vigtigt

Læs venligst denne brugermanual grundigt, og gem den til senere brug. Den bør altid være til rådighed for brugeren og følge stolen. Brugermanualen kan også findes på VELAs website: www.vela.dk, hvor du også kan finde anden relevant information om VELA Tango.

Har du spørgsmål, kan du kontakte din VELA forhandler.

VELA forbeholder sig ret til ændringer.

VELA

Gøteborgvej 8-12
9200 Aalborg
Danmark
www.vela.dk

GENERELT

1.1. SIKKERHED

Denne stol er CE-mærket og overholder alle gældende EU-regler.

Stolen er produceret af:
VELA, Gøteborgvej 8-12,
9200 Aalborg SV, Danmark.

VELA Tango El overholder alle EMC-krav i henhold til IEC 60601-1-2.

1.1.1. ANVENDELSE

VELA Tango er en indendørs stol til siddende personer.

- :: Stolen er ikke bygget til at stå på
- :: For sikker forflytning af en person til og fra stolen skal stolen altid bremses.

VELA Tango 100/100El/200/200El er testet og godkendt til en brugervægt på max 160 kg.

Bemærk: Personer, der bruger sele i VELA Tango, skal altid være under opsyn, når selen er i brug.

1.1.2. TRANSPORT

Ved transport af stolen i bil, fly og andre transportmidler, bør man altid anvende stolens bremse. Stolen er ikke godkendt som passagersæde i transportmidler og må derfor ikke anvendes som sådan.

Stolen kan klare følgende transportspecifikationer:

Temperatur: - 40°C til + 70°C
Luftfugtighed: 15-95%
Lufttryk: PPP op til 1000 meter over havniveau

1.2. REKLAMATIONSRET

VELA giver reklamationsret efter den danske købelov. Reklamationsretten gælder kun ved anvendelse af originale reservedele og tilbehør, samt tilpasninger foretaget af autoriseret servicetekniker.

Bemærk: Dog undtaget, hvis der er indgået særlige kontraktmæssige aftaler direkte med VELA.

VELA påtager sig ikke ansvar for skader på produktet eller brugeren, der er opstået pga.:

- :: Transport
- :: Misbrug
- :: Almindelig slitage
- :: Forkert brug
- :: Brug af uoriginale reservedele og tilbehør
- :: Tilpasninger foretaget af uautoriseret servicetekniker

1.3. UDPAKNING AF STOLEN

VELA Tango leveres i miljøvenlig papemballage.

Såfremt der er mangler eller transportskade ved stolen, bedes du straks kontakte VELA. I sådanne tilfælde må du ikke selv forsøge at reparere evt. skader eller tage stolen i brug.

Den kasse, stolen leveres i, skal indeholde:

- :: VELA Tango stol
- :: Brugermanual tilhørende stolen
- :: evt. oplader

Bemærk: se pkt 1.6.1. for korrekt påsætning af ryglæn.

1.4. VEDLIGEHOLDELSE

Vi anbefaler et årligt eftersyn af VELA Tango for at finde frem til eksempelvis defekte og slidte dele. Man bør selv regelmæssigt efterspænde alle aftagelige dele.

1.4.1. HJUL

Det anbefales med jævne mellemrum at efterse hjul og rens for eventuelle trådrester o.l.

1.4.2. STEL

Rengøres med lunkent vand evt. tilsat en pH-neutral sæbe.

1.4.3. POLSTER

Stof: Rengøres med møbelrensemiddel eller en hårdt opvreden klud med vand.

Kunstlæder: Rengøres med vand eller mild sæbe.

Medicinske tekstiler: Rengøres som ovenstående. Der kan dog også benyttes desinfektionsmiddel samt afspritning.

Læder: Rengøres ved støvsugning med blød børste. Undgå brug af rengøringsmiddel.

1.5. GENBRUG OG BORTSKAFFELSE

Dette produkt indeholder materialer, som kan genbruges, f.eks. plastik, metal, elektrisk og elektronisk udstyr mv. Derfor skal produktet bortskaffes i overensstemmelse med lokal lovgivning og ikke sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse og genbrug er medvirkende til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.


Bemærk! Elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier er mærket med nedenstående ikon. Dette kendetegner udstyr som indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt, og derfor skal indsamles særskilt.



Det er vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

1.6. BRUGERMANUAL

Udskiftning af gasfjeder og elektrisk hejs må kun ske af en tekniker fra VELA eller af en uddannet person indenfor dette felt.

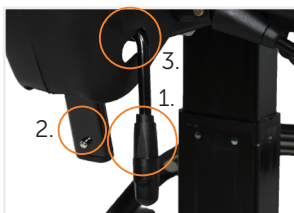

1.6.1. PÅSÆTNING AF RYGLÆN

Håndtag (1) til indstilling af ryglæn sættes i åben position. Knopfjeder trykkes ind og ryglænsstang sættes ned igennem beskyttelseskappe (2) og hul. St ram håndtag bagefter. Håndtaget til indstilling af ryglænet skal føres igennem afdækning (3) som vist på billede. Bemærk: Ryglænsstang skal føres igennem hul så knopfjeder låser. Kontrollér at ryglæn ikke kan trækkes op igen!



1.6.2. HØJDEINDSTILLING (VELA TANGO EL)

Kan betjenes fra undersiden af både højre og venstre armlæn - afhængigt af, hvor stikket placeres (se pkt. 1.6.3.).
Bemærk: VELA Tango El fås også med højdeindstilling via håndboks (hvis plejepersonale skal kunne indstille højden).



1.6.3. ÆNDRING AF BETJENING (VELA TANGO EL)

Udtag stik fra bagsiden af armlæn og sæt det i modsatte sides armlæn eller i bunden af kontaktboks.
Bemærk: Højdefunktionen må kun anvendes kontinuerligt i et minut, derefter ni minutters pause.



1.6.4. HØJDEINDSTILLING (VELA TANGO)

Indstilles ved at trække op i det forreste greb i højre side.



1.6.5. INDSTILLING AF SÆDEVINKEL

Indstilles ved at trække op i det midterste håndtag i højre side.



1.6.6. INDSTILLING AF RYGVINKEL

Indstilles ved at trække op i det bagerste håndtag i højre side.



1.6.7. INDSTILLING AF RYGHØJDE


Træk op i håndtaget, som er placeret bag på ryggen. Indstil ryggen. Husk at stramme håndtaget bagefter.



1.6.8. INDSTILLING AF ARMLÆN, HØJDE

Indstilles ved at løsne skruen på armlænsstangen og regulere højden på armlænet. Husk at stramme skruen igen.


Bemærk: Armlænet kan afmonteres helt ved at løsne armlæns-skruen og trække armlænsstangen op.

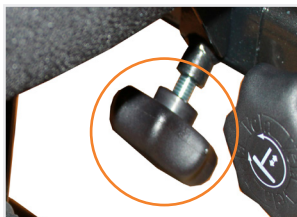

1.6.9. INDSTILLING AF ARMLÆN, BREDDDE

Indstilles ved at løsne skruen under sædet og regulere armlænsbredde ved at trække ud i armlænet. Husk at stramme skruen igen.

Bemærk: Armlænenene kan afmonteres fuldstændig, ved at trykke palen, der sidder inderst på stangen, i bund og trække ud i armlænet, når håndskruen er løsnet.

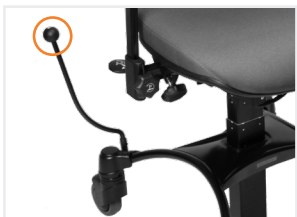

1.6.10. BREMSE

VELA Tango bremses ved at føre håndtaget på siden af stolen fremad. Oplås stolen ved at føre håndtaget tilbage i opret position.

Bemærk: Bremsen kan flyttes uden værktøj ved at løsne skruen nederst på bremsestangen, fjerne plastikknoppen i modsatte sides hul og isætte bremsestangen. Husk at spænde skruen fast igen.



1.6.11. ROTATION (VELA TANGO) (TILVALG)

Sædet roteres ved, at hive op i det forreste greb i venstre side.



1.6.12. ROTATION (VELA TANGO EL) (TILVALG)

Sædet roteres ved, at skubbe bagud i det forreste greb i venstre side. Rotation kan dreje og låses i følgende positioner: 90° til venstre og 90° til højre.

Bemærk: Rotation findes ikke på alle konfigurationer af VELA Tango El



1.6.13. RYG-RIGEL (VELA TANGO 200 & 200EL)

Ryglænen kan indstilles til en specifik vinkel ved at indstille og fæstne riglen der er monteret bag på stoleryggen.



1.6.14. OPLADNING (VELA TANGO EL)

Daglig opladning anbefales. Betjeningsstik puttes i ladekontakt - hvis stolen oplader, lyser en diode på laderen gul, hvis stolen er opladt lyser dioden grøn. Hvis batterispændingen er for lav ved brug, høres en hyletone. Oplad da hurtigst muligt stolen.
Bemærk: Stolen må ikke benyttes under opladning.



1.6.15. ARTRODESESÆDE (TILVALG)

Vinklen på artrodeseklapperne kan indstilles uafhængigt af hinanden, så de kan tilpasses den enkeltes behov for støtte. løsne håndskruen under klappen, indstil vinkelen og stram skruen igen.



1.6.16. OPKLAPPELIG FODSTØTTE (TILVALG)


Stabiliserende fodstøtte, der også kan bruges som trinbræt ind og ud af stolen.

Bemærk: Hvis fodstøtten er klappet op og sædet er i laveste position, kan fodstøtte og sæde/armræn komme til at køre på hinanden.



1.6.17. FODSTØTTE (TILVALG)

Fodstøtten kan indstilles i længden, ved at løsne den håndskruer der sidder midt på fodpladestangen. Husk at spænde skruen igen. Fodpladen kan klappes op, så den ikke er i vejen når man rejser og sætter sig i stolen.

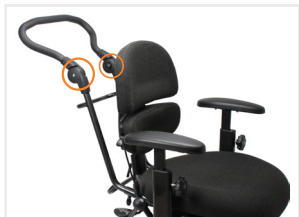

1.6.18. SKUBBEBØJLE (TILVALG)

Skubbebøjle til persontransport i stolen. Skubbebøjlen monteres ned over tårnene på baghjulene.

Bemærk: Skubbebøjlen findes også i en konfiguration der kan indstilles i højden. Løsn håndskruen der sidder midt på stangen. Indstil højden. Husk at spænde skruen igen.



1.6.19. FODPEDAL TIL BREMSE (TILVALG)

VELA Tango med fodpedal bremses ved at trykke pedalens øverste del fremad. Oplås stolen ved at føre fodbremsen tilbage i opret position.

Bemærk: Fodpedalen kan monteres i venstre eller højre side, bag på stolen.



1.6.20. VINKELKONTAKT (TILVALG)


Monteret på undersiden af højre eller venstre armlæn - afhængigt af behov. Husk, placer stikket korrekt (se pkt. 1.6.3.).

Bemærk: VELA Tango El fås også med højdeindstilling via håndboks (hvis fx. plejepersonale skal kunne indstille højden).



1.6.21. HÅNDBOKS (TILVALG)

Håndboksen anvendes via trykknapper på fronten. VELA håndbokse kan have en eller flere funktioner. Se på håndboksens ikoner, hvilke funktioner knapperne dækker.
Bemærk: Indsæt stik i håndboks for at betjene funktioner.

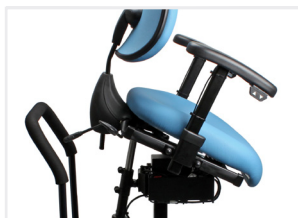

1.6.22. EL-TILT (TILVALG)

VELA Tango med el-tilt, indstilles til den ønskede vinkel via håndboks eller vinkelkontakt.
Bemærk: Stolen bør ikke anvendes til persontransport når sædet er kippet.



1.6.23. EL-BREMSE (TILVALG)

VELA Tango med el-bremse, bremses og oplåses via håndboks eller vinkelkontakt. Det tilrådes at bremse/oplåse stolen helt, når bremsen anvendes.
Bemærk: Denne bremse kan kun anvendes via kontakter under armlænen, kontakter på håndboks eller vinkelkontakt.