

Brugsanvisning Merry fodvippe skammel



Anvendelse:

Merry fodvippe skammel placeres foran en stol, en sofa eller lignende

Læg benet, som skal aflastes op på fodvippe skammelen - sørg for at det lange stykke vender ind imod stolen/sofaen

Rengøring:

Rengøres med en fugtig klud, og aftørres derefter grundigt

Montering:

- 1) Skru de to "kors" (1) på indersiden af mederne (2), med de fire korte skruer - ved hjælp af den medfølgende nøgle
- 2) Montér den større fodplade (3) på den lange del af "korset", med de fire lange skruer - vent med at stramme skruerne
- 3) Montér herefter den lille fodplade (4) på den lille del af "korset" på samme måde
- 4) Spænd alle skruer