

molift[®]

EASY



Molift Easy amputationssele

Molift erbjuder ett brett sortiment av lyftselar för alla slags förflyttningar. Selarna är utformade för att ge en jämn vikt- och belastningsfördelning så att de är så bekväma som möjligt. Därför finns våra selar både i olika modeller och storlekar. Molift fokuserar på säkerhet och komfort. Vi rekommenderar därför individuell anpassning av selarna. En färgkod hjälper dig att hitta rätt storlek. Vi designar och tillverkar våra lyftselar i Norge, enligt samma kvalitetskrav som Molift-lyftarna. Samtliga selar är testade och godkända enligt NS-EN ISO 10535. Molift rekommenderar att Molift-selarna används tillsammans med Molift-lyftarna.

Molift Easy amputationssele

Storlek	Färgkod	Utan huvudstöd	Med huvudstöd
XXS	Rosa	Art.nr 3027050	Art.nr 3028050
XS	Ljusblå	Art.nr 3027000	Art.nr 3028000
S	Röd	Art.nr 3027100	Art.nr 3028100
M	Gul	Art.nr 3027200	Art.nr 3028200
L	Grön	Art.nr 3027300	Art.nr 3028300
XL	Blå	Art.nr 3027400	Art.nr 3028400
XXL	Vit	Art.nr 3027500	Art.nr 3028500

- en lyftsele från

molift[®]
designed for life

BRUKAR MANUAL

Molift Easy amputationssele

Molift Easy amputationssele är en bekväm, polstrad lyftselse som används med Molifts fyrpunktsupphängning. Den är utformad för säkra och bekväma förflyttningar av brukare med enkel- eller dubbelsidig benamputation. Öppningen runt stussen är mindre än på Molift Easy lyftselse. Bendelarna är speciellt utformade för amputerade, bl.a. med öglor som benstöden träas in genom - detta för att förhindra att de glider ifrån varandra. Molift Easy amputationssele har ett magbälte med två spännen. Belastning och vikt fördelas jämnt. Dessutom kan bältesspännena dras åt växelvis så att brukaren sitter så stadigt och säkert som möjligt under lyftet. Molift Easy amputationssele finns både med och utan huvudstöd. Den är mycket enkel att använda och kan tvättas vid 80°C samt autoklaveras vid 85°C i 30 minuter.



Trasiga, fransiga eller på annat sätt skadade lyftselar/stroppar kan haverera och orsaka personskador. Använd därför endast lyftselar som är i gott skick. Förstör och kasta gamla, oanvändbara lyftselar.




*Lyft och förflyttning av en patient innebär alltid en viss risk. **Läs alltid noggrant igenom användarmanualen för lyften!** Det är viktigt att du har god kunskap om utrustningen och till fullo förstår hur du ska använda den. Utrustningen får endast användas av utbildad personal. Förvissa dig om att lyftselen passar till den lyft du har valt och för det slags lyft som ska utföras. Var försiktig och noggrann när du använder lyft och tillbehör. Kom ihåg att du som vårdgivare är ansvarig för patientens säkerhet.*


Molift Basic amputationssele är utformad för att passa till Molift fyrpunktsupphängning och är avsedd som tillbehör för Molifts lyftar. Av lyftens användarmanual framgår vilken lyftselse som passar till vilken lyft.

Använda lyftselen

Före användning viks lyftselen upp enligt bilden. Vid placering av selen vänds den grå sidan bort från personen (brukaren) som ska lyftas. Håll lyftselen med ena handen och använd den andra handen för att stödja patienten. Vid placering av lyftselen ska den röda sidan vändas mot brukarens rygg.

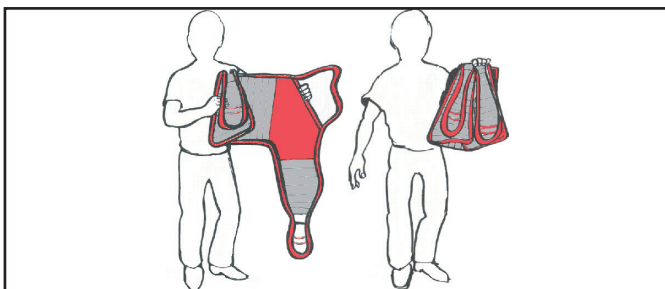


Lyftupphängningen ska alltid ställas på tvären över brukaren. Se till vänster på bilden nedan.

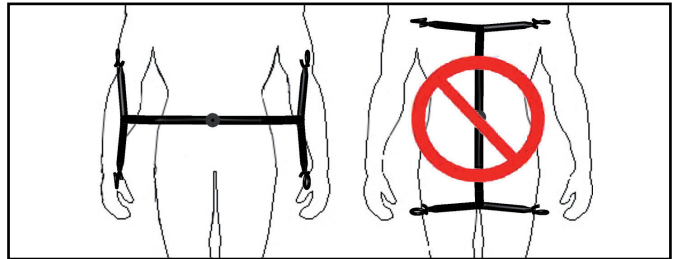

Om man använder en lyftselse för tvåpunktsupphängning ska denna användas diagonalt, dvs. öglorna från selen ska hängas på krokar diagonalt ovanför varandra.

Lyft och förflyttning till och från sittande

Det är enklare att lyfta från sittande än från liggande position.

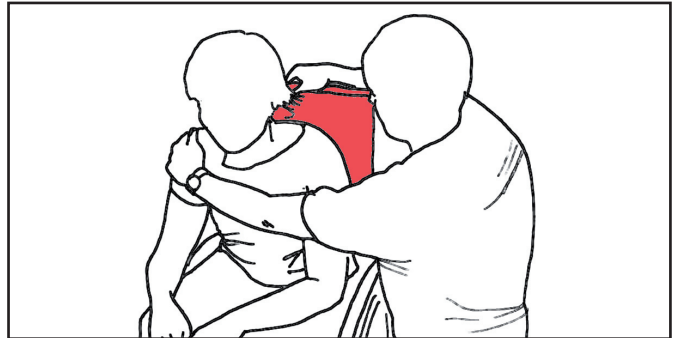

Om brukarens fysik och förmåga tillåter bör man uppmuntra henne/honom till att delta aktivt när lyftselen placeras. Brukaren kan t.ex. själv lyfta låren, dra fram benflikarna, luta sig framåt, etc.

- Luta brukaren framåt medan du håller en arm runt henne/honom. För ner den vikta lyftselen bakom brukarens rygg **tills den når sätet**. Lyftselen kan skjutas bättre på plats om man använder en flat hand i positioneringsfickan baktill på selen.




Kom ihåg att använda en korrekt arbetsställning så att du skonar din rygg!



- Dra fram benstöden och trä in det ena stödet i öglan på det andra så att de inte glider ifrån varandra. Fäst magbäl-

tet ordentligt genom att först spänna det ena spännet och sedan det andra. Magbältet kan också efterspännas under själva lyftet.

- Det är viktigt att överkroppen sitter så stadigt och säkert som möjligt.
- Häkta fast öglorna på lyftkrokarna. Vid lyft från sittande till sittande kan du "låsa" sittpositionen med upprätt rygg genom att använda den extra öglan på skulderstroppen.
- Om du lyfter från rullstol måste du aktivera bromsen så att rullstolen inte trillar. Lyft brukaren så att hon/han kommer upp från underlaget. Utför sedan förflyttningen. Man behöver inte lyfta särskilt högt.

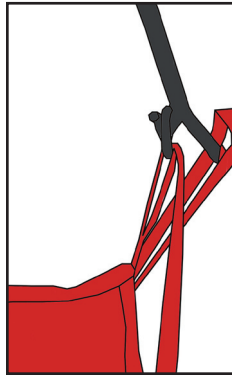


Se noga till att upphängningsöglorna är ordentligt fästa på lyftupphängningen innan du börjar lyfta. Lyftselen får INTE hänga i de svarta spännstropparna för huvudstödet

- Sänk ner brukaren försiktigt i stolen, ta av öglorna från krokarna och dra bort lyften. Om förflyttningen sker till en rullstol måste bromsarna vara på så att rullstolen inte trillar. Du kan använda följande tekniker, eller en kombination av dem, för att få brukaren att sitta så långt bak i sätet som möjligt.
- dra i öglan baktill/på sidorna av lyftselen
- luta stolen bakåt



Kom ihåg att använda en korrekt arbetsställning så att du skonar din rygg!

- Dra bort lyftsels benflikar under brukaren. Ställ dig vid sidan om stolen och luta brukaren framåt medan du stöder med en hand. Dra upp lyftselen bakom brukarens rygg. Luta brukaren tillbaka i stolen.

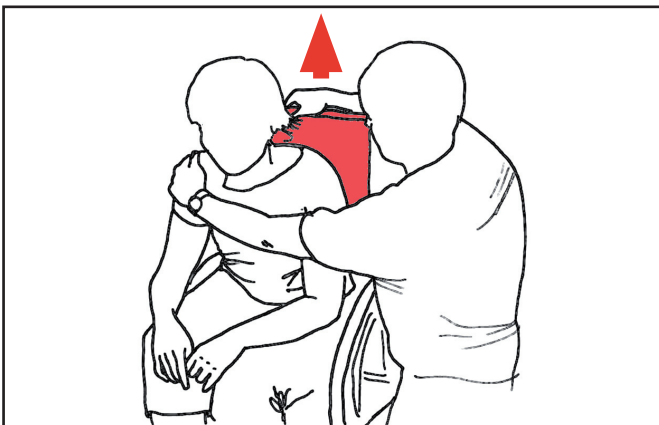


Om du drar lyftselen hårt uppåt kan brukaren falla framstupa och skada sig. Håll alltid en hand runt henne/honom, som på bilden.

Lyft och förflyttning från/till liggande position

Om sängen har ett sängryggstöd bör detta användas. Följ instruktionerna för lyft och förflyttning från sittande position. Vid lyft från liggande rekommenderar vi en lyftsele med huvudstöd.




Vid lyft från säng med höjdjustering bör sängen justeras till korrekt arbetshöjd.

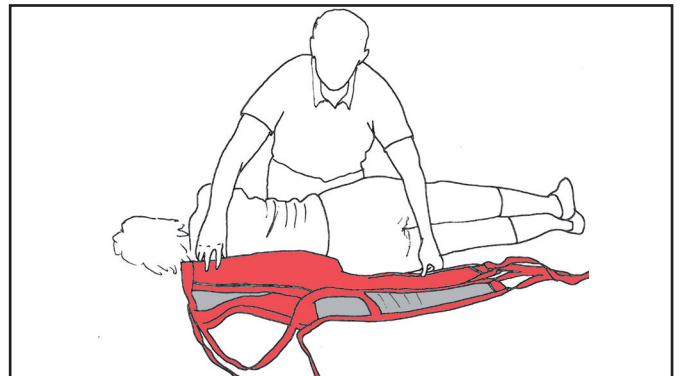

- Om möjligt bör brukaren vändas till stabilt sidoläge. Vik upp lyftselen på mitten och lägg den bakom ryggen på brukaren. Vänd sedan brukaren över på motsatt sida och dra fram lyftselen. Se till att brukaren placeras mitt på lyftselen.



Var försiktig när du lägger över brukaren på sidan. Se till att hon/han inte tippas runt och rullar av sängen på motsatt sida.

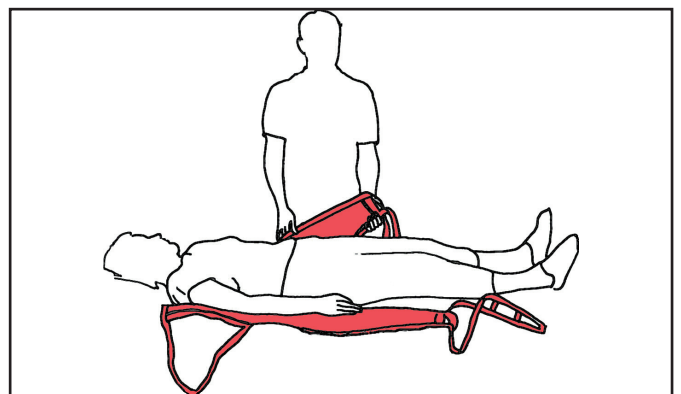

- Dra fram benflikarna och trä in den ena fliken i öglan på den andra så benstöden inte glider ifrån varandra. Fäst magbältet. Kom ihåg att spänna bältet så att brukaren sitter så stadigt och stabilt som möjligt.
- Kors benöglorna genom att dra den ena öglan genom den andra.
- Placera lyften med lyftupphängningen över brukaren. Var

försiktig så att du inte sänker ner lyftupphängningen på henne/honom. Se till att lyftupphängningen är centrerad över brukaren innan du lyfter. Kom ihåg att hjulen INTE ska låsas på en mobil lyft.



Se noga till att lyftselen ligger korrekt och att upphängningsöglorna är ordentligt fästa vid lyftupphängningen innan du börjar lyfta. Selen får INTE hänga i spännstroppen för huvudstödet. Vid lyft från säng med höjdjustering bör sängen sänkas så mycket som möjligt. Var särskilt försiktig med huvudet.

- För att brukaren ska få en så bekväm sittposition som möjligt kan denna justeras genom att man drar i handtagen baktill och på sidorna av selen. Justera huvudstödet till en behaglig position med hjälp av spännstroppen.
- Vid lyft från säng höjer du upp brukaren så mycket att stussen lyfter från madrassen. Sedan lyfter du benen och svänger brukaren mot dig så att fötterna hänger utanför sängkanten.
- Utför förflyttningen och sänk ner brukaren försiktigt. Lossa lyftselsens öglor från lyftupphängningen. Vänd brukaren mot dig och vik selen. Vänd brukaren över på motsatt sida (gärna i stabilt sidoläge). Dra ut selen och lägg brukaren tillrätta i sängen.



Var försiktig när du lägger över brukaren på sidan. Se till att hon/han inte tippar runt och rullar av sängen på motsatt sida.

Förlängningsstroppar

Vid behov kan man använda förlängningsstroppar för att uppnå ett större avstånd till lyftupphängningen. Stropparna används parvis på skulder- eller benöglor.


Art.nr: 3013000 (2 st)

Tvättanvisning

Molift Easy amputationssele är tillverkad i grått och rött polyamidmaterial (Cordura) med polyesterband. Den är polstrad med polyetylenskum och kan tvättas vid 80°C samt autoklaveras vid 85°C i 30 min.



Guide för val av storlek på lyftsele

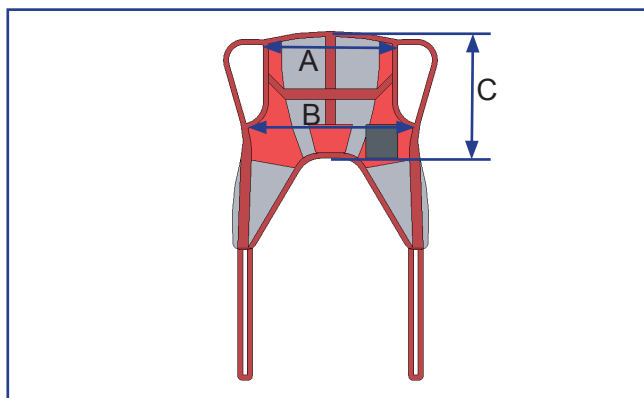

Storlek	Färgkod	Rek. personvikt (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
XXL	Vit	230-300	86	130	71
XL	Blå	160-240	76	115	68
L	Grön	90-160	66	100	65
M	Gul	45-95	56	85	62
S	Röd	25-50	51	75	56
XS	Ljusblå	17-25	46	65	50
XXS	Rosa	12-17	41	55	44

Wilken storlek man ska välja beror dels på personens vikt, dels på kroppsomfånget/storleken.

SWL (Safe Working Load) är 160 för XXS-S och 300 kg för M-XXL

molift[®]
designed for life

Molift AB

Industriområdet

SE - 693 73 Svartå

Tlf: 0585 - 50235

Fax: 0585 - 50095

www.molift.com

info@molift.com