

GelBodies

Til beskyttelse af udsatte hudområder og forebyggelse af tryksår


GelBodies anvendes til tryk- og friktionsudsatte hudområder, hvor man ønsker aflastning. Kan også anvendes til øm og sart hud for at skåne det udsatte område.

GelBodies består af en grøn silikone-gelpude indsat i et gråt coolband.

Coolbandet er lavet af 85% bomuld, 10% lycra og 5% polyester.

Materialet er åndbart og meget blødt og behageligt at bære.

GelBodies er lette, behagelige og diskrete i brug. Silikone-gelen fordeler trykket og vil ikke flyde ud.

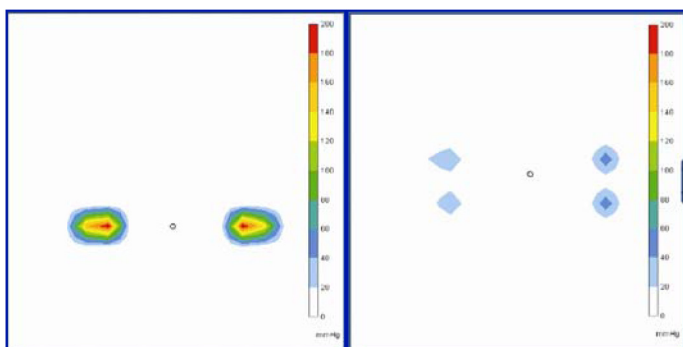

Uden aflastning

Med GelBodies efter 1 time

Dokumentation

Produktets trykaflastende effekt er dokumenteret i henhold til protokollen for trykaflastende måling, Ref. T0017.

Alle GelBodies er blevet testet og viser stor trykaflastende effekt.

Billedet til venstre viser forskellen i trykket over hælene uden og med hæl- og ankelbeskyttere.

Måltagning

GelBodies findes i et stort udvalg, således at de kan imødekomme krav til former og størrelser.

Målene skal tages forskellige steder alt efter hvilken GelBodies man vil bruge.

Størrelse og form på GelBodies er udviklet ud fra disse mål.

- Albue/Hæl: Mål omkredsen på det bredeste sted på hhv. overarm eller læg
- Hæl/Ankel: Mål omkredsen lige over anklen
- Knæ: Mål omkredsen lige over knæet
- Skinneben: Mål omkredsen det bredeste sted på læggen.

Er målet mellem 2 størrelser vælges den største af disse.

Vigtigt

GelBodies kan bæres i op til 12 timer pr. døgn. Det er vigtigt, at inspicere huden med jævne mellemrum og man anbefaler, at produktet ikke bæres på ødelagt hud eller over sårbandager.

Vask og Vedligehold

Coolbandet kan maskinvaskes ved 40° C. Må ikke tørretumbles.

Ved vask skal gelpuden fjernes. Denne kan aftørres med en fugtig klud og må ikke ligge i blød.

Gelpuderne tåler endvidere afspritning.

GelBodies

Til beskyttelse af udsatte hudområder og forebyggelse af tryksår

	Størrelse	Mål	Mindstekøb	HMI nr.	
Hæl- og albuebeskyttere					
	221830	Small	20-25 cm	1 par	30591
	221831	Medium	25-30 cm	1 par	30592
	221832	Large	30-36 cm	1 par	30593
	221833	X-Large	36-41 cm	1 par	38396
Skinnebensbeskyttere					
	221834	Medium	25-33 cm	1 par	53485
	221835	Large	33-41 cm	1 par	53486
Hæl- og ankelbeskyttere					
	221836	Small	20-25 cm	1 par	53404
	221837	Medium	25-30 cm	1 par	53405
	221838	Large	30-36 cm	1 par	53406
Knæbeskyttere					
	221839	Small	23-28 cm	1 par	53482
	221840	Medium	28-33 cm	1 par	53483
	221841	Large	33-41 cm	1 par	53484