

Brugsanvisning Posey Skridsikert underlag



Påføringsanvisning:

- 1) Rul Posey skridsikert underlag ud til den ønskede længde
- 2) Klip af i den ønskede længde - brug en skarp saks
- 3) Læg Posey skridsikert underlag hvor det skal bruges

Vaskeinstruktion:

Vaskes i maks. 38° varmt vand

Posey skridsikert underlag skal lufttørres

VIGTIGT!

Posey skridsikert underlag bliver glat når det er vådt

Må **IKKE** anvendes i badeværelse og andre våde områder

Må ikke anvendes på lakerede overflader

Latexfri



Opbevaring og håndtering:

Til brug i indendørs miljøer

Kan opbevares på lager ved omgivende lagertemperatur ved normal luftfugtighed - undgå fugt eller høj luftfugtighed