

Brugsanvisning Voyager toiletstol



Til brug over toilettet:

- 1) Skub Voyager tilbage over toilettet
- 2) Sørg for, at sædet er stabilt og placeret korrekt over toilettet

Til brug med bækkenet:

- 1) Før bækkenet ind i beslaget under sædet
- 2) Fjern bækkenet ved forsigtigt at trække i det bagerste håndtag
- 3) Læg låget på bækkenet, og løft metalhåndtaget for at låse låget
- 4) Hæld indholdet ud
- 5) Voyager må ikke sammenfoldes med bækkenet isat

Til brug som brusestol:

- 1) Stil Voyager under bruseren
- 2) Sørg for, at den står stabilt

Vægt: 4,75 kg.

Vedligeholdelse:


Efterse regelmæssigt sæde, låseclips, teleskopben og dupsko for skader - udskift hvis nødvendigt

Rengøring kan foretages med alle gængse- dog ikke ætsende rengøringsmidler

Maks. belastning: 125 kg.

Mål

Voyager toiletstol

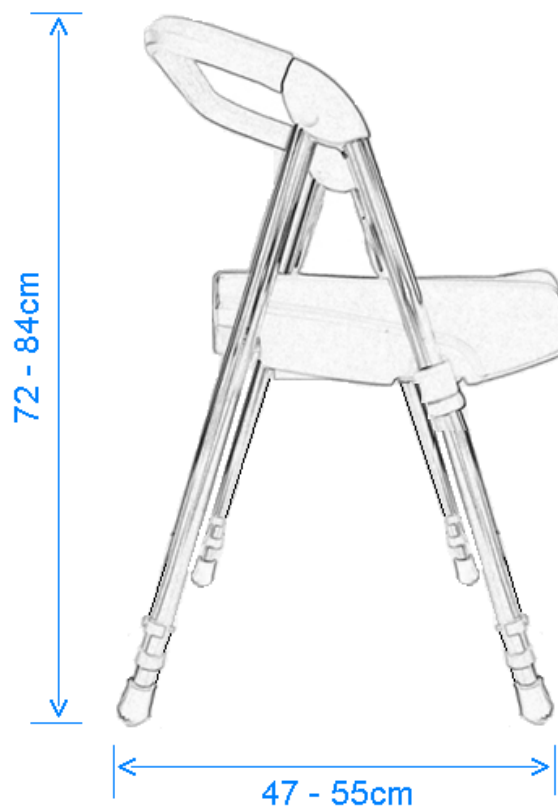

Mål Voyager toiletstol

