



SET 830-TV

Short Guide



Tillykke med dit nye trådløse Set 830-TV fra Sennheiser

Ved at følge nedenstående beskrivelse kommer du hurtigt i gang med at bruge dit nye TV sæt. Pak udstyret ud og læg alle dele foran dig. Sættet består af en mørkerød og sort sender/ladestation, en stethoset-modtager (ligner og anvendes på samme måde som et stetoskop, der sættes ind i ørerne), diverse adaptere og tilslutningskabler samt to forskellige sæt ørepropper, som evt. kan anvendes på stethoset'et i stedet for dem, der sidder på. Se evt. i den medfølgende manual "cordless TV listening system Set 830-TV" side 4 under "Delivery includes".

Undgå at anvende udstyret i direkte solskin. Solen indeholder infrarøde stråler, som vil give støj i modtagelsen.

1. Strøm til udstyr

- Først samles strømforsyningen for tilslutning i stikkontakt. Find - blandt de medfølgende stiktyper - det, der passer til din 230 V stikkontakt. Monter stikket ved at skyde det ned over adapterens front (det er den lille sorte plastboks med ledning, hvorpå der står "SWITCHING POWER SUPPLY NT-13" med små bogstaver). Når det er på plads, giver det et hørbart klik.
- Strømforsyning sættes i stikkontakten, og det gule runde stik i den anden ende af ledningen tilsluttes det gule stik bag på sender/ladestation mærket "DC IN 13,5V".
- Senderen/ladestationen er nu tændt. Et grønt lys ses foran. Lyset slukker igen efter ca. 3 minutter, hvis ikke man bruger sættet.

2. Oplad stethoset-modtageren

- Stethoset'et er nederst forsynet med et genopladeligt batteri.
- Placer stethoset'et i ladestolen – fordybningen - ovenpå sender/ladestation
- Et rødt lys - lige under Sennheiser logoet - lyser op, når stethoset'et er korrekt placeret og oplades.
- Første gang skal batteriet oplades i mindst 3 timer, men ellers er batteriet fuldt opladt, når det røde lys skifter til grønt. Stethoset'et kan herefter bruges i ca. 12 timer, før den skal oplades igen.
- Opbevar altid stethoset'et i ladestolen, når det ikke er i brug. Her oplades det hurtigt og er altid klar til brug. Man kan ikke komme til at ødelægge batteriet ved at oplade det for længe.

3. Tilslut Set 830-TV til dit TV

- Dette kan gøres på flere måder, men TV'et skal altid være slukket, når senderen tilsluttes.
- Den ene ende af lydkalet med de blå mini-jack stik tilsluttes lydkildens hovedtelefon-udgang. Den anden ende tilsluttes bag på sender/ladestation i det blå stik mærket "AUDIO".
- Hvis "stik-hullet" i TV'et er for stort til mini-jack stikket, anvendes det medfølgende større jack stik. Det lille stik kan skubbes ind i det store.
- Man kan også tilslutte TV'et ved at bruge en af de andre muligheder enten phono-stik eller SCART, men som regel er hovedtelefonstikket det mest praktiske.
- På bagsiden af sender/ladestation sidder en lille switch mærket "ST/MO" (stereo eller mono). Hvis dit TV kan gengive stereo, kan du høre TV lyden i stereo gennem Set 830 ved at stille switchen i position hen mod det blå AUDIO-stik. (Sættet leveres sådan fra fabrikken).
- Endelig findes bag på en lille drejeknap som justerer bas gengivelsen. Denne knap kræver en skruetrækker og behøver normalt slet ikke at justeres.

- Tænd TV'et igen og indstil lydniveauet til medium.


4. Brug af Set 830 TV

- Senderen/ladestationen tænder automatisk, når den får lyd fra TV'et.
- Placer stethoset'et i ørerne, så drejeskiven kan "se" TV og sender. Sættet tænder automatisk, når de to buer eller "arme" trækkes fra hinanden. Der kan nu høres lyd i sættet, hvis TV'et er tændt.
- Lydniveauet kan justeres på drejeskiven (med tallene 0 – 6), der befinder sig lige under hagen, når stethoset'et hænger i ørerne. Undgå at dække drejeskiven med hånden, når dette gøres. Man kan komme til at skygge for det infrarøde modtagerøje, så der opstår udfald i lyden.
- Hører du 6 korte bip-lyde, betyder det, at der ikke kommer lyd fra TV'et til senderen. Check at ledningen er monteret korrekt.
- Hører du 2 lange bip-lyde, betyder det, at det genopladelige batteri er ved at være fladt.
- Til venstre set forfra på senderen/ladestationen er en sort knap (tegn med lille øre). Ved at trykke gentagne gange på knappen skiftes mellem forskellige indstillinger, der måske kan forbedre taleforståeligheden for dig.
 - 1: Der skrues automatisk op for svage passager i lyden
 - 2: Giver mere diskant
 - 3: Begge dele samtidigt
- Prøv selv hvilken, der passer bedst. Er der hverken lys i 1, 2 eller 3, gengives lyden som den modtages fra TV'et.
- Endelig justeres balancen mellem højre og venstre øre ved at skrue på det lille hjul på stethoset'ets bagside.

5. Sluk Set 830 TV

- Stethoset'et sættes i ladestolen og alt slukker automatisk efter 3 minutter, når det ikke er i brug.

God fornøjelse med dit Sennheiser Set 830 TV sæt. For en mere detaljeret funktionsbeskrivelse se venligst den medfølgende manual "*cordless TV listening system Set 830-TV*".

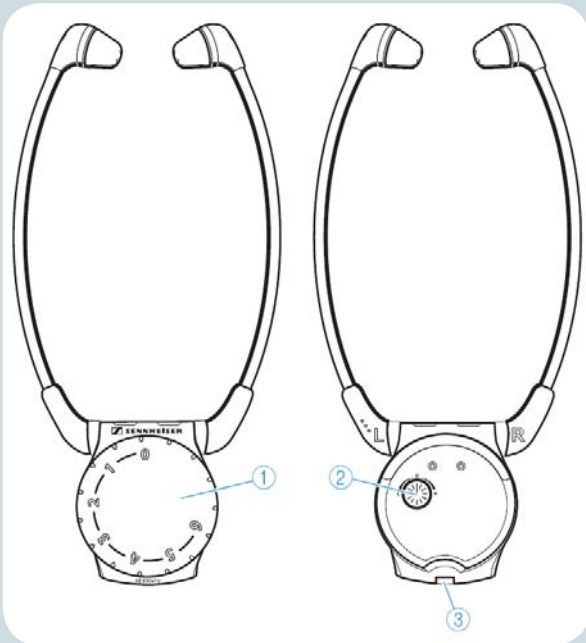

Modtager

1. Kontrol af lydstyrke/volumen
2. Balance
3. Holder til genopladeligt batteri

Sender

4. Ladestol til opladning af modtager med batteri
5. Lader til evt. ekstras batteri
6. Indikator for ladestatus på ekstras batteri
7. Indikator for ladestatus på modtagerens batteri
8. Tænd/sluk indikator
9. Knap til valg af forskellige måder at øge taleforståelighed på
10. Indikator for de forskellige taleforståeligheds indstillinger
11. Stik (blå markering) for tilslutning af TV eller anden lydkilde (også mikrofon)
12. Mono/stereo vælger/switch
13. Indstilling af diskant/bas
14. DC stik (gul markering) for tilslutning af strømfor syning

