

Brugsanvisning

Blue Line mobil bade-/toiletstol

Ergotip EI 2-4

Tipning - bagover:

- 1) Tryk på den af fjernbetjeningens knapper, der viser en pil nedad - stolen tipper hermed roligt bagover
- 2) Slip tasten når den ønskede position nås - stolen er hermed fastlåst i den ønskede position

Tipning - fremad:

- 1) Tryk på den af fjernbetjeningens knapper, der viser en pil opad - stolen tipper hermed roligt forover
- 2) Slip tasten når den ønskede position nås - stolen er hermed fastlåst i den ønskede position

Opladning:

- 1) Træk stikket fra hinanden
- 2) Placér den medfølgende laders ene stik i batteristikket - og det andet i en stikkontakt
- 3) Efter opladning samles stikket igen

Oplad batterierne så ofte som muligt - herved opnås en længere levetid for batterierne


Obs! Hvis batterierne tømmes helt, vil det ikke være muligt at genoplade dem - batterierne SKAL oplades mindst hver 3. måned

Opladning må ikke foretages hvis stolen er våd, eller med en bruger i stolen

Ved sidelæns forflytning:

- 1) Slå stolens armlæn op og lås ALLE hjulene
- 2) Slå armlænet ned igen, når brugeren sidder bekvemt på stolen
- 3) Til urolige brugere anbefales at anvende en armlænslås, så armlænet ikke utilsigtet slås op

Ved forflytning:

- 1) Låsemekanismen  på de 4 hjul skal altid pege udad, så låsning af hjulene kan foretages inden forflytning
- 2) Sørg for at ALLE hjulene er låst, inden brugeren tager plads i stolen



Ved toiletbrug:


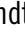
- 1) Stolen placeres over toiletkummen, og hjulene låses - eller hjulene låses, og et bækken placeres i bækenophænget under sædet - de specielle bækkenglidere sørger for at bækkenet ikke falder ud ved tipning



Ved badebrug:

- 1) Hjulene låses
- 2) Stolen kan forsynes med et sædelåg, som passer i sædets åbning

Fodhvilere:

- 1) Anbring fodhvileren i beslaget  som er påsvejet stolens forben
- 2) For at svinge fodhvileren til side, løftes den ca. 1 cm. lodret, og drejes herefter
- 3) Fodhvileren kan indstilles i længden ved at fjerne dens låseclips  - træk/skub herefter inderrøret indtil den ønskede længde nås



Vedligeholdelse:

Kontrollér jævnligt hjulene - efterspænd hvis nødvendigt samt efterse regelmæssigt sæde, ryg og armlæn for skader - udskift hvis nødvendigt

Rengøring kan foretages med alle gængse- dog ikke ætsende rengøringsmidler

Maks. belastning: 150 kg.