


## Brugsanvisning Blue Line badekarstrin



### Vejledning:

- 1) Placér badekarstrinnet foran badekarret
- 2) Løsn fingerskruen **A** som holder sikkerhedsbøjlen **B**
- 3) Skub sikkerhedsbøjlen ned over badekarrets kant, og sørg samtidigt for, at badekarstrinnet står stabilt
- 4) Spænd fingerskruen igen for at fastlåse sikkerhedsbøjlen, og dermed badekarstrinnet

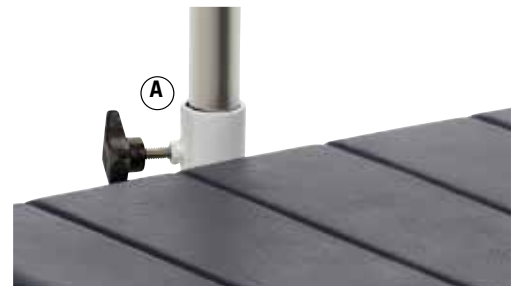

### Vedligeholdelse:

Kontrollér jævnligt stel og fodplade for skader og korrissionsangreb  
Badekarstrinnet tåler rengøring med almindelige ikke-ætsende og ikke-ridsende rengøringsmidler  
Den efterfølgende aftørring sker bedst med en tør og blød klud

**Maks. belastning: 150 kg.**

