


# BRUGSANVISNING FOR sengelæsebord **HANDI 1**

(HMI-nummer 14485)

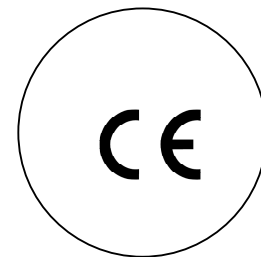

Ved udpakning af kassen vil De finde:

1. Understel med fire hjul.
2. Overdel med to træplader monteret på stålstativ. Et spænde håndtag er isat dette.
3. To mellemrør, hvoraf det ene (X=det forkromede) er indsat i det andet (Y=det malede).  
Det forkromede rør har isat en 10 x 20 mm bolt i den yderste ende. Det malede rør har isat en 10 x 50 mm bolt og en spændeskive i den yderste ende - i den anden ende et spænde håndtag (D).
4. En 10 mm unbracho-nøgle.

Montering af sengelæsebordet sker nemmest på følgende måde:

- a. Tag X-røret ud af Y-røret.
- b. Skru 10 x 50 mm bolt (med spændeskive) ud af Y-røret.
- c. Placér Y-røret oven på den lille firkantede studs, som er svejset på understellet (med hjulene).
- d. Indsæt 10 x 50 mm bolt (med spændeskiven) fra undersiden af understellet op i Y-røret og spænd dette fast med unbrachonøglen.
- e. Læg bordets overdel med træpladernes overside nedad. Placér X-røret oven på den lille firkantede studs, som er svejset på overdelens stel.
- f. Spænd X-rørets 10 x 20 mm bolt fast med unbracho-nøglen.
- g. Vend derefter overdelen og stik X-røret ned i Y-røret. Bordet er nu klar til brug.

Indstilling af sengebordet:

- A. Træk overdelen (A) op i den foretrukne brugshøjde.
- B. Fastspænd indstillingen med Y-rørets spænde håndtag (B).
- C. Ønskes den store træplade vinklet, løsnes overdelens spænde håndtag (C) - pladen vinkles - spænde håndtaget strammes igen.
- D. Vinkel- og højdeindstillingen foregår uafhængigt af hinanden.

## VEDLIGEHOELDELSE:

\*\* Efterse jævnligt træpladerne og deres fastspænding. Hjulene holdes fri af bl.a. hår for at bevare den maksimale køreevne og efterspændes om nødvendigt.

Udskift slidte eller ødelagte dele:

**Hellere én gang for meget end én for lidt !**

\*\* Bordet rengøres med almindelige *ikke-ætsende* rengøringsmidle.  
Den efterfølgende aftørring sker bedst med en blød klud.

Vi – dan-rehab a/s, Messingvej 13-15, DK-8900 Randers – erklærer på eget ansvar, at **HANDI 1** er i overensstemmelse med European Standard EN 1441 (1997) i henhold til bestemmelserne i EU Direktiv 93/42 EEC.

[www.danrehab.dk](http://www.danrehab.dk)

Tlf. 8644 7355