

Brugsanvisning

Sikkerhedsmæssige advarsler:

- ▶ Betrækket på dette produkt er dampgennemtrængeligt, men ikke luft-gennemtrængeligt og kan udgøre en kvælningsrisiko. Det er brugerens/plejepersonalets ansvar at sikre, at puden anvendes på forsvarlig vis.
- ▶ Der må kun anvendes de kombinationer af pude og betræk, som Voss HealthCare angiver. Det kan ikke garanteres, at produktet fungerer korrekt, hvis der anvendes ukorrekte kombinationer af pude og betræk eller brug af andre tæpper, lagner etc.
- ▶ Brug eller efterlad aldrig puden tæt ved åben ild eller kraftig varme.
- ▶ Ventilene, der giver adgang til kamrene, må under ingen omstændigheder åbnes eller forsøges åbnet, idet der er tale om en nøjagtigt udmålt mængde væske i kamrene.
- ▶ Puden skal opbevares inden døre i stuetemperatur ca. 20 °C.

Forholdsregler:

Tag altid følgende forholdsregler af hensyn til din egen og pudens sikkerhed:

- ▶ Brug aldrig skarpe genstande eller elektriske varmetæpper (over 48 volt) på eller under puden. Bruges varmetæppe, fjernes dette ved brug af puden

Tak fordi du har valgt en Walux™-pude. Vi er sikre på, at du hurtigt vil lære at sætte pris på dens enkle udførelse, pålidelighed og effektive virkning. Denne instruktionsmanual er en instruktion til Walux™-pude.

Om Walux™-puden:

Walux™-puden kan trykfordele og trykaflaste. Puden er udviklet til anvendelse i alle stole typer, også kørestole.


Produktbeskrivelse:

Walux™-puden består af:

- ▶ en siddepude
- ▶ et stk. vaskbart betræk - standard eller inkontinens

Ibrugtagning af puden:

- 1) Tag puden ud af æsken
- 2) Din Walux™-pude er leveret med standard- eller inkontinensbetræk, som er monteret, når du modtager den. Tjek at betrækket er monteret korrekt på puden – at A-mærket på pudens underside står korrekt overfor A-mærket på betrækket
- 3) Før du tager puden i brug, fjernes den klare plastpose, som pude og betræk ligger i
- 4) Puden kan anvendes straks
- 5) Når puden ikke er i brug, anvendes emballage-æsken som opbevaringsæske

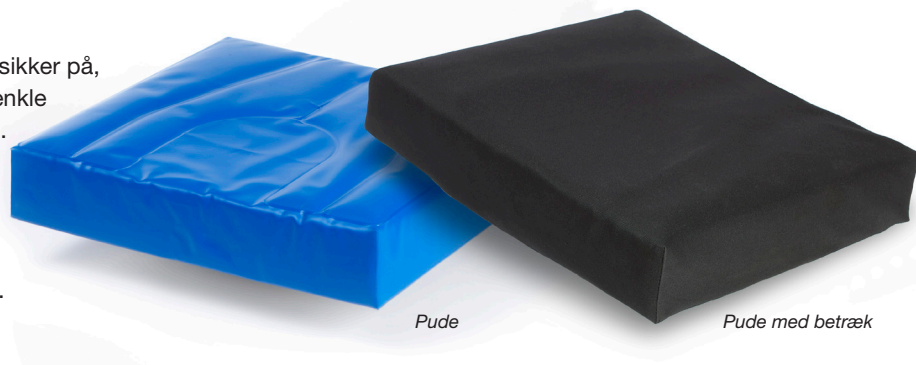

- 2) Der må ikke skures ved rengøring af produktet
- 3) Produktet skal være helt tørt, før det tages i brug
- 4) Må ikke komme i autoklave

Vask af betræk:

Følg instruktionerne anført på vaskelabel i betrækket

Tekniske data:

Størrelse:	Bredde: 46 cm
	Højde: 8 cm
	Dybde: 42 cm
Pudemateriale:	Plastik
Betrækmateriale:	Standard: 100 % polyester
	Inkontinens: 100 % polyester/
	Coating: 100 % polyurethaan
Vægt:	1,2 kg

Miljøbeskyttelse:

Ved evt. bortskafning skal pude og betræk bortskaffes i henhold til gældende regler (spørg evt. genbrugsstationen).

Rengøring:

- 1) Puden rengøres med sæbe/rengøringsmiddel opløst i vand ifølge sygehusstandard for rengøring af puder/madrasser



Udviklet og fremstillet af:

VOSS HEALTHCARE APS

Solvangsvvej 12 . 4681 Herfølge . www.walux.dk