



Anvendelse

Denne stok er beregnet som et ganghjælpemiddel og kan bruges til kort tids siddende.

Brug

Til at gå fold stokken op og sørg for, at den er låst. Til siddende foldes sædestokken ud og placeres på et vandret underlag. Sædehøjde 54 cm. Vi anbefaler at sidde på sædet med håndtaget mellem benene.

Sikkerhedsinstruktioner

Maks. brugervægt **120 kg!**
Brug ikke sædestokken til en fodskammel. Brug den kun på jævne overflader, men IKKE på sne og is.
Kontroller sædestokken regelmæssigt for skader, og brug den ikke, hvis den er beskadiget.

Rensning

Sædestokken kan rengøres med husholdningsrengøringsmidler og vand.

Dimensioner og vægt

Vægt: ca. 800 g
Højde: ca. 82 cm
Sædehøjde: ca. 54 cm
Maks. Kapacitet: 120 kg
Materiale: Aluminium
Farve: grå/krom