



## **Installering af USB Alert S**

- 1. Gå ind på TDC's hjemmeside www.tdcwebtekst.dk
- 2. Gå ind under hjælp og find afsnittet Lyskaldeanlæg.



3. Klik på linket Download USB-Alert S

Filoverfø	rsel	×			
Vil du i	åbne eller gemme denne fil?				
	Navn: usbalertv2.4.16.zip Filtype: ZIP-komprimeret mappe, 836 KB Fra: <b>10.102.32.32</b>				
	Åbn Gem Annuller	]			
🔽 Spø	rg altid, før filer af denne type åbnes				
2	Selvom filer fra internettet kan være nyttige, kan nogle filtyper være potentielt skadelige for din computer. Hvis du ikke har tillid til kilden, skal du ikke åbne eller gemme denne fil. <u>Hvad er risikoen?</u>				

4. I pop-up vinduet **Filoverførsel** skal du vælge: Åbn.

usbalertv2.4.16[1].zip			_ 🗆 ×
iler Rediger Vis Foretr	ukne Funktioner Hjælp	)	
🔵 Tilbage 🔹 🅥 🔹 ಶ	🔎 Søg 🛛 🍋 Mapper	r 🛄 •	
iresse 🚺 C:\Documents and	f Settings\a58995\Local Set	tings\Temporary Internet Files\Content.IE5\8NCLA7CZ\usbalertv2.4.16[1].zip	💌 🄁 Gå
M			
Mappeopgaver	CDM 2.04.16 USB Alert		
Andre placeringer	*		
8NCLA7CZ			
📋 Dokumenter			
🧐 Netværkssteder			
Detalier	*		
•			

5. Klik med musen på **Udpak alle filer** i menuen til venstre.



6. Klik med musen på **Næste** for at udpakke filerne.

Guiden Udpakning	×				
Vælg en destination           Filer i ZIP-arkivet vil blive pakket ud på den placering, du vælger.					
	Vælg en mappe, som filerne skal pakkes ud til. Filerne pakkes ud til denne mappe:				
	c:\alert				
	Gennemse				
	Adgangskode				
4	Pakker ud				
	< Tilbage Næste > Annuller				

7. Husk at gemme filerne et sted du kan huske igen. Du kan også vælge at skrive stedet hvor filerne skal gemmes: f.eks. **c:\adapter** 

Guiden Udpakning	×				
Udpakningen er fuldført Filerne er blevet pakket ud fra ZIP-arkivet.					
	Filerne er blevet pakket ud til følgende mappe: c:∖alert Marker feltet nedenfor for at se de udpakkede filer: I vis udpakkede filer Klik på Udfør for at fortsætte.				
	< Tilbage Udfør Annuller				

8. Klik med musen på **Udfør** 

alert		
er Rediger Vis Foretru	Ikne Funktioner Hjælp	_
) Tilbage 👻 🌖 👻 🤧	🔎 Søg 🔊 Mapper 📰 🗸	
resse 🛅 C:\alert		💽 🔁 Gå
Fil- og mappeopgaver Opret en ny mappe Udgiv derne mappe på World Wice Web Del denne mappe	CDM 2.04.16 USB Alert	
Andre placeringer	*	
🗎 Dokumenter		
💡 Denne computer 🍕 Netværkssteder		
Detaljer	*	

9. Klik med musen på  $\mathbf{x}$  i øverste højre hjørne for at lukke vinduet.

Hvis du vil sikre en hurtigere opdatering af computeren, så skal du nu fjerne netværkskablet fra computeren. 10.Tilslut USB Alert S til en USB-port på computeren.



11.Computeren har fundet ny hardware. Vælg at **installere fra en liste eller en bestemt placering**. Klik på **Næste**.

Guiden Ny hardware fundet
Vælg indstillinger for søgning og installation.
Søg efter den bedste driver på disse placeringer
Brug afkrydsningsfelterne nedenfor til at begrænse standardsøgningen, som medtager lokale stier og flytbare medier. Den bedste driver, der bliver fundet, installeres.
🔲 Søg på flytbart medie (diskette, cd-rom)
🔽 Medtag denne placering i søgningen:
C:\alert\CDM 2.04.16 USB Alert Gennemse
Søg ikke. Jeg vælger driveren, der skal installeres
Brug denne indstilling til at vælge enhedsdriveren på en liste. Windows kan ikke garantere, at den valgte driver er den, der passer bedst til hardwaren.
< Tilbage Næste⇒ Annuller

12.Vælg at installere software eller driver fra et bestemt sted. Find nu mappen hvor du gemte driver filerne, f.eks. c:\adapter\CDM.2.04.16. USB Alert.

## 13.Klik på Næste.



14. **Vent**...hvis du huskede at fjerne netværkskablet går det rimelig hurtigt ellers skal du huske at vente tålmodigt ( ..5 minutter)

Guiden Ny hardware fundet		
Vent, mens guiden installerer softwaren		
USB Alert S		
6		
	< <u>T</u> ibage <u>N</u> æste >	Annuller



- 15.I pop-up vinduet kommer der en advarsel om at USB Alert S ikke er kompatibel med Windows. Vælg fortsæt eller fortsæt alligevel.
- 16.Hvis du tidligere har haft installeret driveren får du følgende meddelelse:

Bekræft erstatning af fil			
Kilde: c:\alert\cdm 2.04.16 usb alert\i386\ftd2xx.dll. Destination: C:\WIND0WS\system32\ftd2xx.dll.			
Destinationsfilen findes og er nyere end kildefilen.			
Skal den nyere fil overskrives?			
Ja Nej Nej til alle			

17.Klik ja til at overskrive filen.

Guiden Ny hardware fundet				
	Fuldfører guiden Ny hardware fundet.			
	Guiden er færdig med at installere softwaren til:			
	USB Alert S			
	Klik på Udfør for at afslutte guiden.			
	< Tilbage <b>Udfør</b> Annuller			

- 18.Klik på **Udfør** for at afslutte **første del** af installationen.
- 19.Når installationen er udført, åbnes Enhedshåndtering. Enhedshåndtering kan findes under kontrolpanel eller kontrolpanel/hardware&lyd.

Ports (COM & LPT)     Processors     Secure Digital host controllers     Smart card readers     Sound, video and game controllers     System devices     System devices		9
Generic USB Hub Generic USB Hub Standard Enhanced PCI to USB Host Controller Standard Universal PCI to USB Host Controller USB Andard Universal PCI to USB Host Controller USB Andard Universal PCI to USB Host Controller USB Root Hub USB Root Hub Standard Ub SB Root Hub USB Root Hub SB Ro	Generek Advanced Driver Detaljer USB Alert S Configuration Use these settings to override normal device behaviour.   Load VCP OK Annuller	Hjælp

20.Under Enhedshåndtering finder du USB-controllere. Find enheden USB Alert S og åbn for egenskaber (evt. højreklik med mus). Under advanceret skal du markere Load VCP. Luk Enhedshåndtering. 21.**Tag USB Alert S ud** af computeren og sæt den i med det samme igen (samme USB-port).



22.Gentag punkt 11-17.

Guiden Ny hardware fundet			
	Fuldfører guiden Ny hardware fundet.		
	Guiden er færdig med at installere softwaren til:		
	USB Alert S		
	Klik på Udfør for at afslutte guiden.		
	< Tilbage <b>Udfør</b> Annuller		

- 23.Klik på **Udfør** for at afslutte installationen af USB Alert S.
- 24.Hvis du har taget netværkskablet ud af computeren, så skal du sætte det i igen.

25.Anvendes **Windows Vista**, skal du huske at køre sikkerhedsprogrammet som du finder på hjælpesiden. Klik på linket **Vista-sikkerhedsprogram** og følg anvisningen på skærmen.



- 26.Luk vinduet med TDC Webtekst hjælp.
- 27.Start TDC Webtekst, www.tdcwebtekst.dk

28.Log på og gå derefter ind under Værktøjer-instillinger-comport.

TDC Afslut Va	erktøjer	Om				
		COM3 COM3 COM4 COM1	nger Comport Test	Ok	Fortryd	
Tilless						<u> </u>

29.Vælg comport og klik på Test for at se der sendes signal ud på USB Alert S.