



JYSK HANDI

hjælpemidler til børn og voksne siden 1990

FLEXARM

Flexarm med Ring og Tudkop 500 mm

Flexarm med Ring og Tudkop 600 mm

Flexarm med Flaskeholder og Tudkop 500 mm

Flexarm med Flaskeholder og Tudkop 600 mm

Brugervejledning (DK)

Rev.02 – Juni 2015



Brugervejledningen kan downloades på www.jyskhandi.dk





Indholdsfortegnelse

1. Generelt	4
1.1. Produktbeskrivelse	4
1.1.1. Identifikation	5
1.2. Produktformål	5
1.2.1. Formål	5
1.2.2. Målgruppe	6
1.2.3. Anvendelse	6
1.3. Produktafgrænsning	6
1.3.1. Sikkerhedsadvarsler	6
1.3.2. Sikkerhedsgrænser	6
1.3.3. Levetid	7
1.3.4. Maksimal belastning	7
1.4. Produkt certificering	8
1.4.1. Lovgivning	8
1.4.2. Standarder	8
1.4.3. ISO Klassifikation	8
1.4.4. Testrapporter	8
2. Produkt oversigt	9
2.1. Flexarm med Ring og Tudkop	9
2.2. Flexarm med Flaskeholder og Tudkop	10
3. Produktanvendelse	11
3.1. Fastgørelse af beslag	12
3.1.1. Skruetvinge	12
3.2. Skruebeslag	13
3.2.1. Montering på kørestol	14
3.2.2. Montering på møbler	14
3.3. Flexarm	15
3.3.1. Fastgørelse til beslag	15
3.3.2. Afmontering fra beslag	15
3.3.3. Positionering	16
3.4. Ring	17
3.5. Flaskeholder	17
3.6. Tudkop	18
3.7. Efter brug	18
3.8. Opbevaring	18
4. Vedligeholdelse	19
4.1. Vedligehold	19
4.2. Rengøring	20
4.2.1. Rengøring af tudkop	20
4.2.2. Rengøring af flexarm og beslag	20
4.3. Eftersyn	20
5. Fejlsøgning	21
6. Reservedele	22
7. Tilbehør	23



Flexarm



Brugervejledning

7.1. Glødesikkert cigaretrør til Flexarm	23
8. Tekniske data	24
8.1. Specifikationer	24
8.1.1. Flexarm	24
8.1.2. Tudkop	25
8.2. Vægt.....	26
8.3. Materialer	26
8.4. Miljømæssige forhold	26
9. Bortskaffelse	27
10. Garanti	27





1. Generelt

Du har valgt en **Flexarm med Ring og Tudkop/Flexarm med Flaskeholder og Tudkop** fra Jysk Handi.

Læs hele brugervejledningen, så du får størst mulig glæde af din Flexarm med Ring og Tudkop/ Flexarm med Flaskeholder og Tudkop. Opbevar brugervejledningen et sted, hvor den er tilgængelig for alle personer, der anvender produktet. Brugervejledningen kan også downloades på vores hjemmeside **www.jyskhandi.dk** under REHAB produkter.

Vær opmærksom på, at der kan forekomme afsnit i denne brugervejledning, der ikke er relevant for deres produkt.



Dette ikon finder du de steder i brugervejledningen, hvor der er forholdsregler og informationer som har sikkerhedsmæssig betydning.







Her skal brugervejledningen læses omhyggeligt for, at opnå korrekt og sikker brug af produktet.

1.1. Produktbeskrivelse

Flexarm med Ring og Tudkop samt Flexarm med Flaskeholder og Tudkop er et hjælpemiddel udviklet til brugere med nedsat funktion som ønsker, at være mere selvhjulpne ved indtag af drikkevarer.

De forskellige modeller af Flexarmen fremgår af denne oversigt:

Flexarm			
Med Ring og Tudkop 500 mm	Med Ring og Tudkop 600 mm	Med Flaskeholder og Tudkop 500 mm	Med Flaskeholder og Tudkop 600 mm
			
Vare nr. 21 60 50	Vare nr. 21 60 60	Vare nr. 21 60 51	Vare nr. 21 60 61
HMI nr.: 48 332	HMI nr.: 48 331	HMI nr.: 48 330	HMI nr.: 29 851





1.1.1. Identifikation

Produkterne er pakket i en enhedsemballage med produktlabel.



Enhedsemballage



Produktlabel

1.2. Produktformål

I det følgende afsnit beskrives formål, målgruppe og anvendelse af Flexarm med Ring og Tudkop samt Flexarm med Flaskeholder og Tudkop.

1.2.1. Formål

Systemet er udviklet som en fleksibel holder til en tudkop, en flaske eller dåse samt et glødesikkert cigaretrør til Flexarm.

Flexarmen giver personer med nedsat funktion mulighed for, at være mere selvhjulpne i drikke- og rygesituation.





1.2.2. Målgruppe

Børn og voksne med følgende diagnoser:
Parkinson, CP (spastikere – Cerebral parese), ALS, Sclerose, muskelsvind, gigt, lammelser, begrænset funktion i arm/ skuldre, HS (Huntington), Hjerneskade, rygmarvsskadet, personer med funktionsbegrænsninger.

1.2.3. Anvendelse

Flexarm anvendes til:

- at holde den medleverede tudkop
- at holde en almindelige flaske eller en dåse
- at holde et Glødesikkert cigaretrør til Flexarm fra Jysk Handi

1.3. Produktafgrænsning

Flexarm med Ring og Tudkop / Flexarm med Flaskeholder og Tudkop er udelukkende beregnet til, at holde den medfølgende tudkop, drikkevarer i standard flaske eller dåse samt et Glødesikkert cigaretrør til Flexarm fra Jysk Handi.

1.3.1. Sikkerhedsadvarsler



Flexarm med ring må ikke anvendes sammen med andre kopper, krus eller tudkopper anvist af Jysk Handi.



Flexarm må ikke anvendes sammen med andre fastgørelses komponenter end anvist af Jysk Handi.



Jysk Handi påtager sig intet ansvar, hvis produktet anvendes, forandres eller sammensættes på anden vis, end angivet i denne brugervejledning.

1.3.2. Sikkerhedsgrænser



Udskift altid tudkoppen, hvis den virker uhygiejnisk eller ustabil.



Dåser med et indhold som er mindre end den almindelige 0,33 liter standard dåse eller flaske, kan falde ud af flaskeholderen.





1.3.3. Levetid

Den forventede levetid på dette produkt er mellem 2 og 5 år, når det anvendes dagligt og i overensstemmelse med sikkerhedsanvisningerne, vedligeholdelsesintervallerne og den korrekte brug, der fremgår af denne brugervejledning.

Den effektive levetid på flexarmen kan variere afhængigt af hyppighed og intensitet af brugen.

Tudkoppen har en forventet levetid på 6 – 8 måneder med et dagligt brugsmønster, hvor brugeren anvender tudkoppen til indtag af 3 og 6 kopper, samt en daglig maskinopvask.

Levetiden på tudkoppen vil afhænge af det individuelle formål og brugs mønster.

Udskift altid tudkoppen hvis den virker uhygiejnisk.

1.3.4. Maksimal belastning

Flasken eller dåsen som anvendes i Flexarmen må maksimalt veje **600 gram**.





1.4. Produkt certificering

Produktet er udviklet, fremstillet og afprøvet med baggrund i følgende dokumenter:

1.4.1. Lovgivning

Produktet er i overensstemmelse med Direktiv 93/42/EØF- 21.09.2007 – Medicinsk udstyr.

Udstyret er CE mærket og er i overensstemmelse med de væsentlige krav i bekendtgørelsen 1263 af 15. december 2008 om medicinsk udstyr.

Klassificering: Medicinsk udstyr Klasse 1

1.4.2. Standarder

Produktet er udarbejdet efter og lever op til følgende standarder og dokumenter.

Standard	Beskrivelse
DS/EN 12182 3. Udgave - 2012.06.29	Hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelse Generelle krav og prøvningsmetoder
DS/EN ISO 14971 6. Udgave - 2012.12.21	Medicinsk udstyr Anvendelse af risikoledeelse i forbindelse med medicinsk udstyr
DS/EN ISO 15233-1 2. Udgave - 2012.08.01	Medicinsk udstyr Symboler til mærkning af medicinsk udstyr samt tilhørende information
DS/EN 980.2008	Del 1: Generelle krav
DS-EN ISO 9999 8. Udgave - 2012.11.15	Hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelse Klassifikation og terminologi

1.4.3. ISO Klassifikation

Flexarm med Ring og Tudkop / Flexarm med Flaskeholder og Tudkop er klassificeret i henhold til DS-EN ISO 9999.

ISO Klassifikation: **24 – 24 – 03 - 04**

1.4.4. Testrapporter

Der er gennemført og lavet rapporter på følgende test:

- Vægtbelastningstest
- Vaske og rengøringstest
- Fastholdelsestest
- Tudkop mikrobølgeovn
- Levetidstest
- Transporttest





2. Produkt oversigt


De forskellige dele af Flexarm med Ring og Tudkop / Flexarm med Flaskeholder og Tudkop har følgende benævnelser:

2.1. Flexarm med Ring og Tudkop

1. Flexsokkel
2. Svanehals
3. Skruetvinge
4. Tudkop
5. Skruebeslag
6. Ring

Position nummer 1, 2 og 6 er også omtalt som Flexarm.

Position nummer 3 og 5 er også omtalt som beslag.

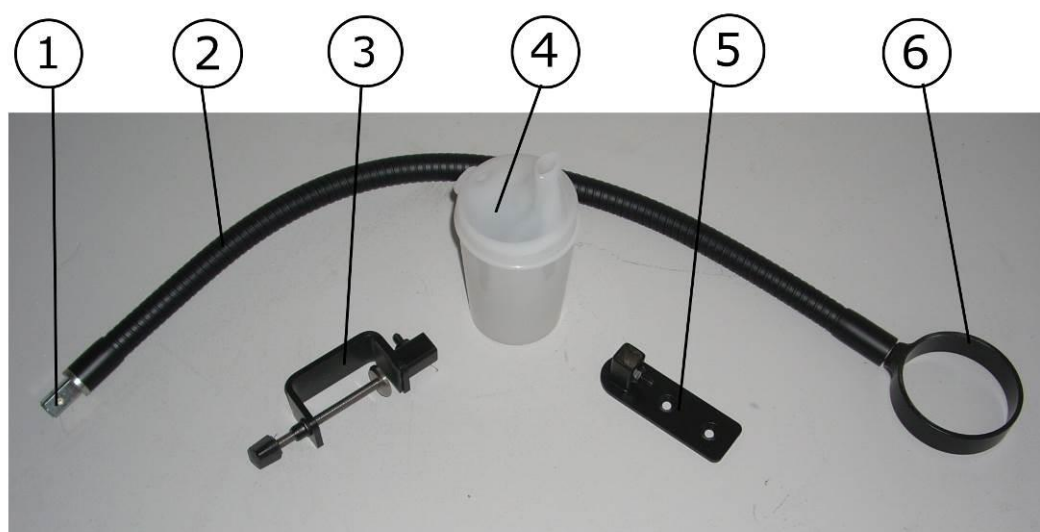




2.2. Flexarm med Flaskeholder og Tudkop

1. Flexsokkel
2. Svanehals
3. Skruetvinge
4. Tudkop
5. Skruebeslag
6. Flaskeholder

Position 1, 2 og 6 er også omtalt som Flexarm.

Position nummer 3 og 5 er også omtalt som beslag.

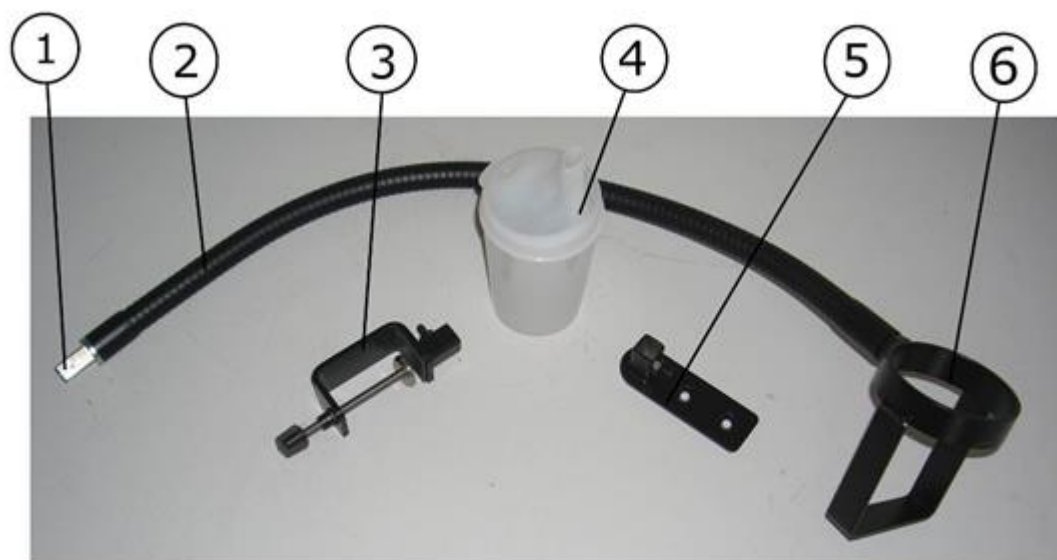



3. Produktanvendelse

De følgende afsnit beskriver installation og betjening af Flexarm med Ring og Tudkop samt Flexarm med Flaskeholder og Tudkop.

Afhængig af brugerens evner kan der være behov for hjælp til, at klargøre de ønskede drikkevarer.

Flexarmen sættes fast i den ønskede holder, tilrettes og formes til den ønskede position, de klargjorte drikkevarer placeres i ringen eller flaskeholderen.

Der skal anvendes et sugerør for, at kunne indtage drikkevarer placeret i flexarmen.

Samme Flexarmen kan anvendes i flere forskellige holdere. Brugeren kan eksempelvis have en holder placeret på sin kørestol. Brugeren kan ligeledes have en holder placeret på et bord ved en hvilestol eller ved sin seng.

Flexarmen og drikkefunktionen flyttes således med brugeren, til det ønskede opholdssted.

Før anvendelse og brug skal følgende sikkerheds anvisninger følges.

	Kontroller at kanten på tudkoppen er hel og intakt. En defekt kant på tudkoppen kan medføre, at tudkoppen falder ud af ringen.
	Kontroller at skruebeslaget er korrekt fastspændt, det må ikke sidde løs.
	Kontroller at skruetvingen er korrekt fastspændt, den må ikke sidde løs.
	Tudkoppen tages ud af ring eller flaskeholder, når varme drikke hældes op. Derved undgås risiko for, at spille varme drikke på brugeren. Varme drikke bevirker, at tudkoppen bliver varm at håndtere.
	Kan Flexarmens positionen ikke fastholdes under brug, skal Flexarmen udskiftes.





3.1. Fastgørelse af beslag

Før Flexarmen kan tages i brug skal et af de holdende beslag fastgøres.

Det holdende beslag monteres på en vandret flade, således Flexarmen står lodret når den er monteret i beslaget.

Vælg det beslag som er bedst egnet til det sted, hvor brugeren skal anvende Flexarmen.

3.1.1. Skruetvinge

Skruetvingen er anvendelig til midlertidig fastgørelse på en bordkant eller lignende.

Fordelen ved skruetvingen er, at den let kan flyttes til et andet bord uden brug af monterings værktøj.



Ved montering på bordkant sikres, at skruetvingen er skubbet helt ind til bordkanten.

Skruetvingen fastspændes ved hjælp af fingerskruen.

Skruetvingen kan spænde på en bordplade som er max. 48 mm tyk.

OBS: Skruetvingen kan efterlade spændemærke.



Monteres kun på plane vandrette flader.

Ved montering på skæve eller runde flader, opnås der ikke en stabil fastholdelse. Der er stor risiko for, at skruetvinge går løs eller falder af under tilretning og brug.





3.2. Skruebeslag

Skruebeslaget er beregnet til en fast og blivende montage.

Når skruebeslaget er monteret med 2 skruer, er det en meget stabil holder til Flexarmen.

Fordelen ved skruebeslaget er, en meget stabil fastgørelse samt et minimum af pladsbehov. Det gør skruebeslaget velegnet til brug på kørestole og lignende udstyr.



Skruebeslaget fastgøres med 2 stk. undersænkede skruer.

Skruestørrelse:
Ø4x20mm – Ø5x20mm



Til træ anbefales spånskruer.

Til plast eller tynd plade anbefales en selvskærende skrue.



Skruebeslaget kan monteres og anvendes på 2 forskellige måder.

1. Montering under en plan flade, vil skjule en stor del af beslaget og montage skruerne.
2. Montering oven på en plan flade, kan anvendes når beslaget skal placeres midt på en plan flade.

Skruebeslaget anvendes så den bedste løsning og placering til brugeren opnås.




Monteres kun på plane vandrette flader.





3.2.1. Montering på kørestol

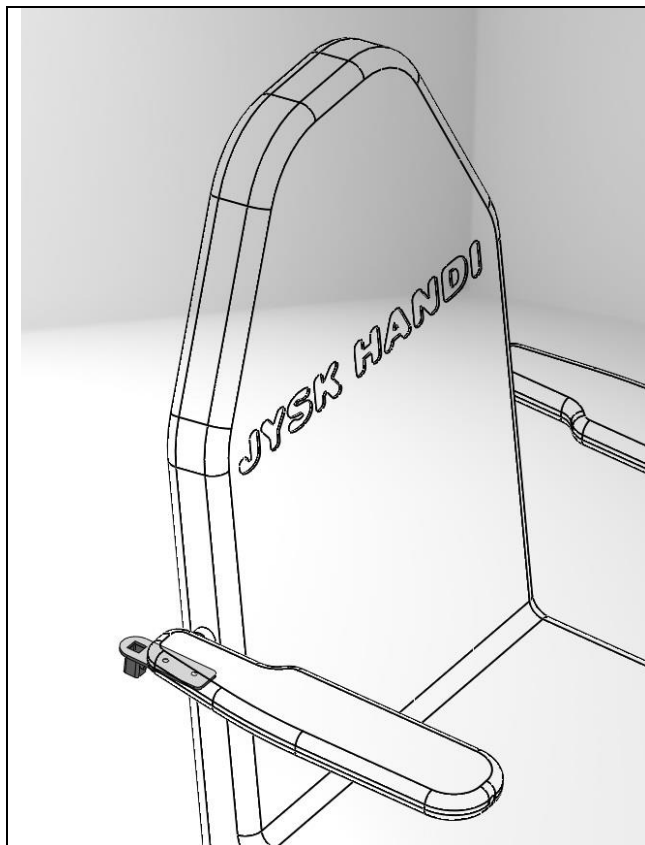

Ved montage på kørestol anbefales en fast montering med skruebeslag.

En god placering på mange kørestole er under et armlæn, hvor skruebeslaget monteres, så det vender bagud. Se tegningen.

Skruebeslaget kan også monteres på andre lignende vandrette plane flader.

3.2.2. Montering på møbler



Skruebeslaget kan monteres på bordplader, sengemøbel, sengekant og andre lignende steder.








3.3. Flexarm


Før Flexarmen kan anvendes, placeres den i det ønskede beslag.
Flexarmen formes, drejes og vrides herefter rundt til den ønskede position opnås.

3.3.1. Fastgørelse til beslag

	<p>Flexarmen fastgøres til beslagene ved, at trykke den firkantede flexsokkel ned i beslaget.</p> <p>Flexarmen klikker fast og holdes nu på plads i beslaget.</p>
--	---

		<p>Kontroller, at Flexsokkelen er trykket helt ned i holderen før brug. Pilen angiver hvor det ses, om flexsoklen er korrekt trykket ned i holderen.</p> <p>Kan den ikke trykkes ned skal evt. skidt eller andre forhindrenger fjernes fra holderen.</p>
---	---	--

3.3.2. Afmontering fra beslag

	<p>Flexarmen afmonteres ved at trække den op og fri af beslaget.</p> <p>Den samme Flexarm kan således bruges i flere forskellige beslag.</p>
---	--





3.3.3. Positionering

	<p>Flexarmen kan formes i alle retninger.</p> <p>Flexarmen bringes i den ønskede position ved, at trykke, trække og vride.</p> <p>Bedste resultat opnås ved, at bruge begge hænder til formning af forløbet, frem til den ønskede position.</p> <p>Flexarmens fleksibilitet gør det muligt hurtigt, at ændre indstilling og position efter brugerens ønsker og behov.</p>
---	---

	<p>Eksempel på Flexarme med forskellig funktioner og med forskellig form til forskellig position.</p>
--	---

Det anbefales, at Flexarmen helt afmonteres fra beslaget, når brugeren skal forflyttes til og fra kørestolen.





3.4. Ring

Der kan kun anvendes en tudkop eller et Glødesikkert cigaretrør i Flexarm med ring.



Før tudkoppen sættes i ringen skal ringen være indstillet i vandret position.

Tudkoppen placeres i ringen.

3.5. Flaskeholder

Der kan anvendes tudkop, flaske, dåse og Glødesikkert cigaretrør i Flexarm med flaskeholder.



Før tudkop, dåse eller flaske sættes i flaskeholderen skal flaskeholderen være indstillet i vandret position.


Tudkop, dåse eller flaske placeres i flaskeholderen.





3.6. Tudkop

For klargøring og servering af drikkevare.

	<p>Låget tages af.</p> <p>Drikkevare hældes op.</p> <p>Låget sættes på og trykkes fast.</p> <p>Tudkoppen sættes derefter ned i Ring eller Flaskeholder.</p> <p>For at drikke når tudkoppen er placeret i Flexarmen, skal der anvendes et sugerør.</p> <p>Sugerøret skal sættes ned i gennem drikke tuden.</p>
---	---

Tudkoppen kan også anvendes uden brug af Flexarm.

Til brug ved liggende personer, kan mængden af væske begrænses ved, at sætte en finger for hullet oven på låget.

3.7. Efter brug

1. Tudkop fjernes og rengøres / flaske eller dåse fjernes.
2. Flexarmen afmonteres eller bringes til en passiv position.

Se afsnit om rengøring og vedligeholdelse for yderlig information.

3.8. Opbevaring

Flexarmen kan opbevares f.eks. i passiv position på kørestolen eller helt afmonteres.

Der er ingen specielle krav til opbevaring af Flexarm og Beslag.

Tudkoppen bør ikke opbevares i direkte sollys.





4. Vedligeholdelse

For at sikre, at Flexarmen fungerer sikkert og optimalt er det nødvendigt med en løbende vedligeholdelse, rengøring og funktionskontrol.

4.1. Vedligehold

Ved normalt daglig brug udføres følgende vedligehold og rengøring:

Dagligt:

Rengøring af tudkop

Kvartalsvis:


Grundig rengøring af alle dele

Årligt:

Hovedrengøring af alle dele

Ved behov:

Vedligeholdelse af skruetvinge foretages efter grundig afvaskning / iblødsætning.

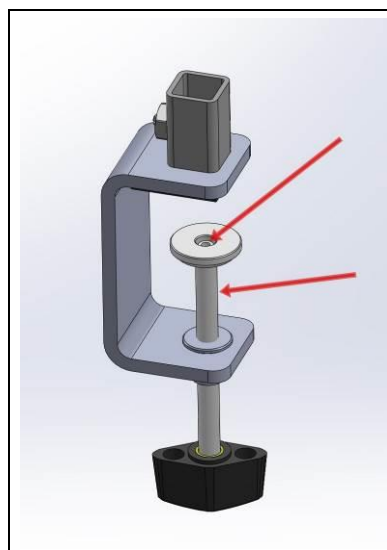

Det er nødvendigt, at smøre spændeskiven og spændeskruen på skruetvingen, efter det har været i kontakt med rengøringsvand.

Smøres med få dråber almindelig symaskineolie der hvor pilene angiver.

Smøring af skruetvingen sikre, at tilstrækkelig fastspænding kan opnås.





4.2. Rengøring

Ved almindelig og daglig brug rengøres Flexarmen hver dag.

Anvendes Flexarmen i perioder foretages rengøring, hver gang Flexarmen har været i brug.

	Brug aldrig sprit, syrer, baser eller opløsningsmidler.
--	---

4.2.1. Rengøring af tudkop

Tudkoppen rengøres daglig som andet almindeligt service.

Der kan med fordel anvendes opvaskemaskine.

4.2.2. Rengøring af flexarm og beslag

Flexarmen og beslag vaskes med en våd svamp, klud eller børste.

Brug almindelige rengøringsmidler til husholdning.

Er Flexarm eller beslag meget snavset, kan den med fordel lægges i blød i 2 min. i en opvaskebalje og rengøres med en almindelig opvaskebørste.

Tør Flexarmen af med en tør blød klud efter rengøring.

4.3. Eftersyn

Følgende ting skal med drift og sikkerhed for øje kontrolleres i de angivende intervaller.

Eftersyn	Beskrivelse	Interval
Skruetvinge og Skruebeslag	Skal sidde fast og være stabil.	Daglig før brug
Tudkop / Ring / Flaskeholder	Skal være hel og uden skader.	Daglig før brug





5. Fejlsøgning

Skemaet indeholder en fejlbeskrivelse, en mulig årsag samt en instruktion til håndtering af fejlen.

Skemaet indeholder de fejlbeskrivelser som kan have sikkerhedsmæssig relevans.

Fejlbeskrivelse	Mulig årsag	Håndtering
Flexarmen holder ikke sin position.	Slidtage af svanehalen.	Flexarm udskiftes.
Flexsokkel klikker ikke fast i holderen til flexsoklen. (skruebeslag eller skruetvinge)	Skidt eller snavs i selve holderen til flexsoklen. Fjedrende låseskrue er ødelagt.	Rengør holderen. Udskift holderen om nødvendigt.
Tudkop sidder ustabil.	Slidtage eller beskadiget kant.	Udskift tudkoppen.
Skruetvinge kan ikke fastspændes.	Spændeskiven på enden af spændeskruen er løs eller skæv.	Udskift skruetvingen.
Skruebeslaget vrikker og sidder løs.	Fastspændingsskruerne sidder løs.	Fastskrues et andet sted med nye skruehuller.
Flaskeholder eller ring er blevet skæv.	Flexarmen har været i klemme.	Flexarm med ring eller flaskeholder udskiftes.








Se afsnit 6 for liste med reservedele.





6. Reservedele

Til Flexarm med Ring og Tudkop og Flexarm med Flaskeholder og Tudkop findes følgende reservedele:

Vare nr.:	Varenavn:	Foto
21 65 50	Flexarm med ring 500mm	
21 65 60	Flexarm med ring 600mm	
21 65 51	Flexarm med flaskeholder 500mm	
21 65 61	Flexarm med flaskeholder 600mm	
21 30 00	Skruetvinge	
21 31 00	Skruebeslag	
21 00 00	Tudkop	

Reservedele kan bestilles ved Jysk Handi.





7. Tilbehør

Der findes følgende tilbehør til Flexarm.

7.1. Glødesikkert cigaretrør til Flexarm

Glødesikkert cigaretrør	
Standard til Flexarm	Solid til Flexarm
	
Vare nr. 21 03 10	Vare nr. 21 03 20
HMI nr.: 72 202	HMI nr.: 73 989

Det Glødesikkert cigaretrør anbringes i Flexarmen og brugere med ufrivillige bevægelser kan ryge uden selv, at skulle fastholde det Glødesikre cigaretrør.



For yderligere oplysninger om brug og placering af Glødesikkert cigaretrør til Flexarm, henvises til den separate brugervejledning fra Jysk Handi der omhandler.

"Glødesikkert cigaretrør"





8. Tekniske data


Produktet er sammensat af flere forskellige dele med forskellige data, som det fremgår af de nedenstående tabeller og skemaer.

- Alle længdemål er angivet i mm.
- Alle rummål er angivet i ml.
- Alle vægtmål er angivet i g.

8.1. Specifikationer

8.1.1. Flexarm

Dimensioner for de forskellige modeller af Flexarmen

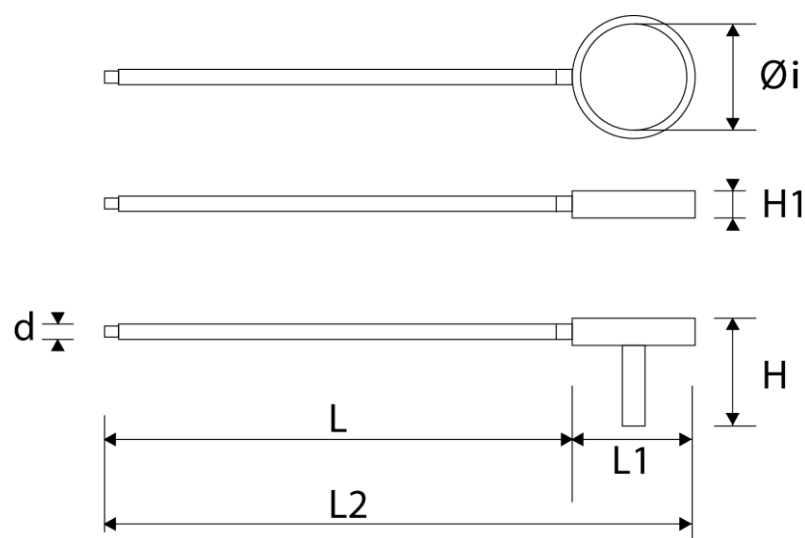

Vejledende målskitser

Model	L	L1	L2	H	H1	Øi	d
Flexarm med Ring og Tudkop 500 mm	500	90	610		20	69	20
Flexarm med Flaskeholder og Tudkop 500 mm				95			
Flexarm med Ring og Tudkop 600 mm	600		680		20		
Flexarm med Flaskeholder og Tudkop 600 mm				95			





8.1.2. Tudkop

Beskrivelse:

Flergangsbæger halvtransparent mælkevid.

Låg med tudkop og Ø8 hul til doseringsbegrænsning ved sengeliggende brug.

Bæger og tudlåg er steriliserbare.

Tåler kolde og varme drikke.

Tåler opvarmning i mikrobølgeovn.

Tåler maskinopvask.


Specifikationer:

Materiale: Polypropylene, godkendt til kontakt med fødevarer.

Indhold: 200 ml

Vægt: 40 gram

Mål: Alle mål i mm, se målskitse.

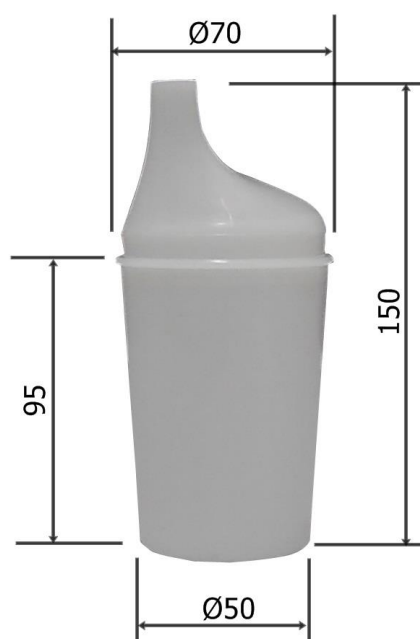

Vejledende målskitse



Må ikke anvendes til smeltning af smør og lignende i mikrobølgeovn, da temperaturer over 130°C vil ødelæge tudkoppen.





8.2. Vægt

Egenvægt for delkomponenter	gram
Flexarm med Ring 500 mm	650
Flexarm med Flaskeholder 500 mm	720
Flexarm med Ring 600 mm	660
Flexarm med Flaskeholder 600 mm	770
Skruebeslag	70
Skruetvinge	160
Tudkop	40

8.3. Materialer

Flexsokkel, svanehals, ring, flaskeholder, skruebeslag og skruetvinge er fremstillet af messing, stål og aluminium, som er overfladebehandlet med ugiftig maling og pulverlak.

Tudkoppen er fremstillet af et plastmateriale som er godkendt til kontakt med levnedsmidler.

8.4. Miljømæssige forhold

	Opbevaring	Brug og Transport
Temperaturer	-10°C til +50°C	+5°C til +40°C
Luftfugtighed	20% til 75%	
Luftryk	800 hPa til 1060 hPa	





9. Bortskaffelse

Vi opfordrer til miljøbevidsthed og at genbruge dette produkt via nærmeste genbrugsstation, når dets levetid er opbrugt.

Produktet består af flere forskellige materialer som bortskaffes og genbruges på forskellig vis.

Flexarm og beslag er lavet af metal og skal bortskaffes som affaldsmetal gennem den lokale genbrugsstation.

Tudkoppen er lavet af plastmateriale og skal bortskaffes som hårdt plastmateriale gennem den lokale genbrugsstation.

Bortskaffelse af affald skal altid ske i overensstemmelse, med den gældende lovgivning vedrørende håndtering af affald i det enkelte land.

10. Garanti

Garantien dækker:

- Alle materiale- og produktionsfejl i to år fra leveringsdatoen, forudsat at sådanne fejl fandtes før leveringen.
- Alle produktionsfejl- og mangler skal omgående indberettes.
- Jysk Handi kan vælge at reparere fejlen eller at udskifte komponenten. Den garanti, som Jysk Handi yder, dækker ikke yderligere omkostninger (transport, emballage, arbejdstid, diverse udgifter osv. er for kundens regning).

Garantien dækker ikke:

- Skader, der er opstået under transporten, som ikke anmeldes til speditøren straks ved leveringen.
- Reparationer udført af uautoriserede centre og personale.
- Dele, der udsættes for almindeligt slid.
- Forsætlig ødelæggelse eller skader, der forårsages af ukorrekt brug af produktet.
- Jysk Handi forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel.

