

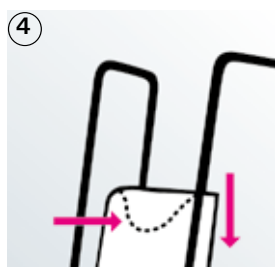
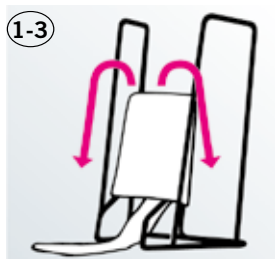


Påtagning:

- 1) Sæt metalstativet på en fast flade med den brede side af bunden vendt mod Dem selv, og åbningen i den halvrunde ramme vendt fremad
- 2) Sæt kompressionsstrømpen i bøjljen med strømpeåben vendt fremad
- 3) Vend indersiden ud og over rammen på den øverste kant af strømpen
- 4) Før strømpen ned over bøjljen, indtil hælen kommer til syne ved kanten af bøjljen
- 5) Før foden med tæerne først ind i tåen på strømpen - støt Dem evt. til bord eller lign.

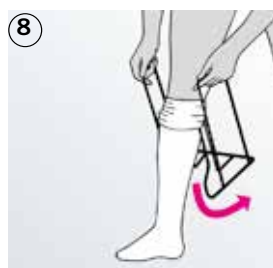

- 6) Træd nu ind i stativet - kontrollér at tåen og hælen er korrekt placeret
- 7) Ved skiftevis at trække i håndtagene, kan De nu føre strømpen op mod knæet
- 8) Når strømpen er lige under knæet, skal De vippe metalstativet let tilbage og fjerne det fra strømpen
- 9) Slut af med at glatte kompressionsstrømpen jævnt opad - sørg for at trække strømpen op stykke for stykke, uden at samle den sammen eller trække i kanten

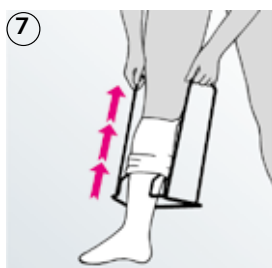

Butler metalstativ til strømpebukser



- Mål

Butler metalstativ til strømpebukser

Mellem håndtagene bagerst = 42 cm.

Mellem håndtagene forrest = 38,5 cm.

Højde A_1 = 49 cm.

Bredde A_2 = 42 cm.

Dybde A_3 = 18 cm.

Bredde strømpeareal A_4 = 10 cm.

Vægt: 1,3 kg.

