

Brugsanvisning

Etac Socky Strømpepåtager

Socky strømpepåtager kort




Strømpepåtager til at tage korte og lange strømper og sokker på.

Socky strømpepåtager lang




Strømpepåtager til at tage korte og lange strømper og sokker på.


Socky strømpepåtager, støtte og kompression

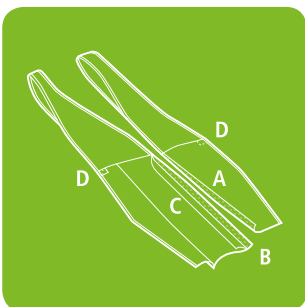


Klæb velcrobåndene sammen (A mod B).
Fold flappen over (C).

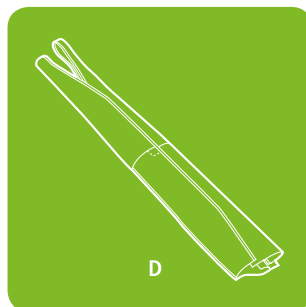

Fold og fastgør velcrobåndet (D).

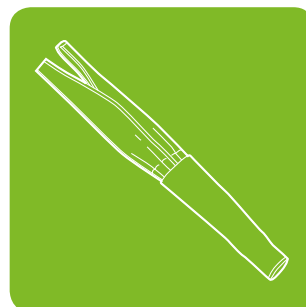

Træk strømpen over Socky i hele strømpens længde med hælen nedad.

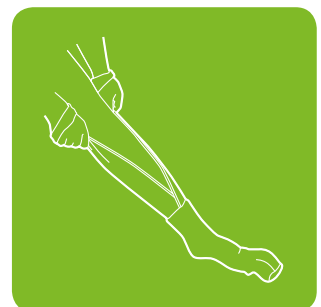

Træk i begge håndtag på samme tid. Foden skal være tør, når strømpen tages på.

Beskrivelse	Varenr.	Vægt	Længde
Socky strømpepåtager, kort	80601002-2	94 g	40 cm
Socky strømpepåtager lang	80601001-2	146 g	60 cm
Socky Strømpepåtager, støtte og kompression	80601003-2	90 g	100 cm

Mål

Passer til alle skostørrelser. Normal til stor lægstørrelse.

Materiale

Stof: Polyamid, plastdele: Polypropylen

Design

HM Center

Rengøring

Produktet kan tørres af og vaskes i hånden. Rengør med almindelige rengøringsmidler uden silbemidler med en pH-værdi på 5-9. Desinficer med 70% sprit.

