



Sonic Alert

America's Leader in Visual Alerting Systems.

Sonic Boom rejse- & hjemmevækkeur med sengevibrator

Model SB200ssea



- Vigtigt:** - Venligst læs disse instruktioner grundigt før brug og gem instruktionerne til fremtidig brug. Se brugsvejledningen senere i instruktionen.
- Brug kun den vedlagte Sonic Alert strømforsyning til produktet.

Advarsel: For at forhindre ildebrand eller risiko for elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugtighed.

Før det tilsluttes: Vær opmærksom på, at de specificerede krav til apparatet svarer til den lokale strømforsyning f.eks. 230V vekselstrøm (50Hz).

- Ventileringen af produktet skal ikke være hindret ved at dække ventilationsåbningerne med ting som aviser, borddug, gardiner, etc.
- Man må ikke placere produktet nær åbent ild, som eks. stearinlys.
- Produktet skal ikke være udsat for dryp eller stænk og ingen objekter fyldt med væske, som eksempelvis vaser, skal være placeret ved apparatet.
- Placer ikke produktet i lukkede reoler eller hylder uden ordentlig ventilation.
- Strømkablet skal være placeret nær produktet og der skal være let adgang til det.

Fremstillet i Kina

Sonic Alert 1050 East Maple Rd. Troy, MI 48083

www.SonicAlert.com 1-800-566-3210 V/TTY



Ovenstående symbol er et advarselssignal til brugeren om tilstedeværelse af farlig spænding indeni produktet, der kan være af en størrelse, der kan udgøre en risiko for at personer kan få stød.

VÆR FORSIGTIG: FOR AT FORMINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD, FJERN IKKE DÆKSLET (ELLER BAGKLÆDNINGEN) FRA PRODUKTET. INGEN INDVENDIGE DELE KAN REPARERES AF FORBRUGER. LAD DIN SONIC ALERT FORHANDLER OM SERVICERING.



Udråbstegnet i trekanten er et advarselssignal, der gør opmærksom på vigtige instrukser i den medfølgende brugervejledning, om betjening og vedligeholdelse af produktet.

ADVARSEL: FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND ELLER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ DETTE APPARAT IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGTIGHED



Sonic Alert

America's Leader in Visual Alerting Systems.

Fremstillet i Kina


Sonic Alert 1050 East Maple Rd. Troy, MI 48083

www.SonicAlert.com 1-800-566-3210 V/TTY

LED VÆKKEUR MED VIBRATOR MODEL SB200sseu

VEJLEDNING

VIGTIGT - læs venligst vejledningen omhyggeligt før brugen og gem den til senere brug.

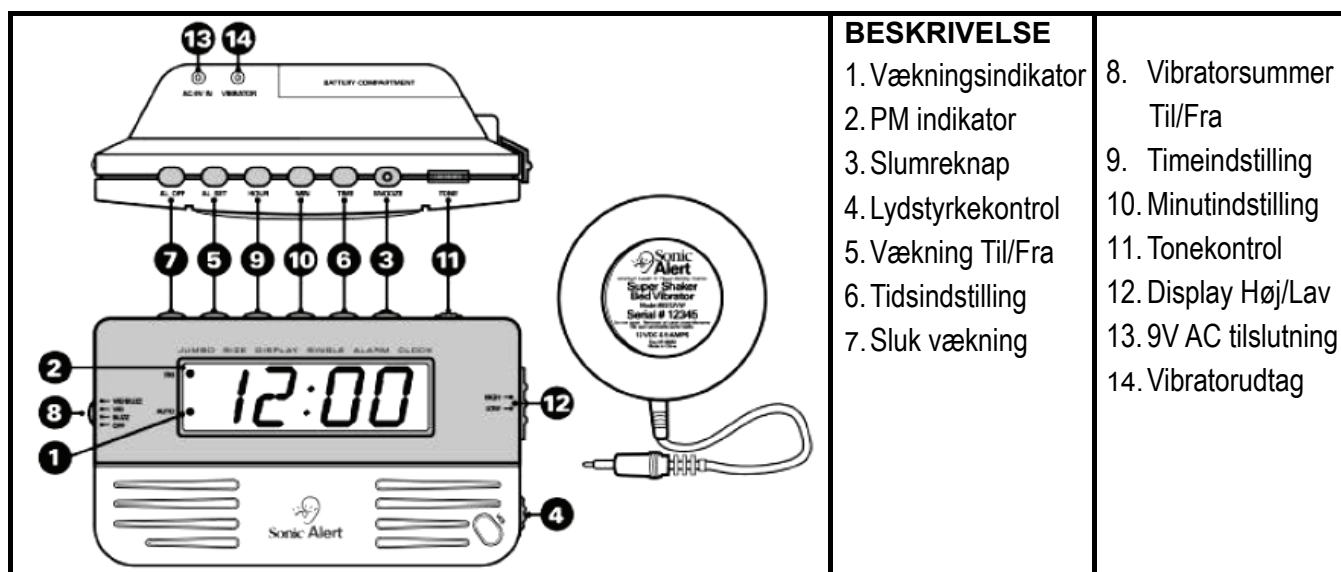

Indstilling af korrekt tid-

- 1) Tryk og hold TID knappen nede (6) og tryk samtidigt på TIME knappen (9) for hurtigt at få urets display hen på det korrekte timetal.
- 2) Tryk og hold TID knappen nede (6) og tryk samtidigt på MIN knappen (10) for hurtigt at få urets display af minutter hen på det korrekte minuttal.
- 3) En lysende prik (2) øverst til venstre i urets display indikerer om den viste tid er PM. For AM tid er prikken ikke tændt.

Indstilling af vækningstid-

- 1) Følg instrukserne som nævnt under "Indstilling af korrekt tid" med undtagelse af, at du skal trykke på Vækning Til/Fraknappen (5) i stedet for TID knappen.
- 2) Forvis dig om, at vækningstiden er indstillet korrekt på AM eller PM; lysende prik (2) indikerer PM. Husk at give slip på indstillingsknapperne TIME og MIN før du slipper Vækning Til/Fraknappen (5).

Slumrefunktion-

SLUMRE knappen (3) trykkes efter uret har ringet. Lyden vil være slået fra, for at give 9 minutters ekstra søvn, hvorefter den kommer igen. Uret er sat til, at du kan gentage dette flere gange, i op til 30 minutter.

Justering af varigheden af slumretiden-

Som udgangspunkt er varigheden sat til 9 minutter men du kan justere tiden af varigheden fra 1 minut til 30 minutter som ønsket. For at justere slumretiden:

- Pres og hold Slumreknappen (3) i 4 sekunder. Urets display vil vise standardindstillingen '9'. Slip Slumreknappen.

-Tryk Minutindstillingsknappen (10) for at justere varigheden af slumretiden til det ønskede niveau fra 1 til 30 minutter.

-Når displayet viser den ønskede varighed af slumretiden, vil den vende tilbage til normal urindstilling efter 3 sekunder. Den ny indstillede varighed af slumretiden er nu standard og bliver i hukommelsen indtil du ændrer den igen.

Vækning-

Indstil den ønskede vækningstid og skub VIB / BUZZ, VIB, BUZZ, OFF (8) knappen til den ønskede position. VIB / BUZZ for både vibrator & lyd, eller VIB kun for vibrator eller BUZZ kun for lyd. For at slå vækkeuret fra, vælg OFF positionen.

Sluk alarmen-

Alarmen kan blive slået midlertidigt fra for dagen eller permanent.

- 1) Når alarmen starter, tryk på Sluk vækning knappen (7). Alarmen vil slukke sig selv for dagen og starte næste dag samme tid hvis indstillingen ikke har været ændret.
- 2) For at slukke alarmen permanent, tryk Vibratorsummer Til/Fra knappen over på OFF-position. Alarmen vil ikke vende tilbage før den samme knap igen er sat til enten "VIB", "BUZZ" eller "VIP/BUZZ" position.

Tone-

Reguler tonen (11) ved at dreje på tonehjulet, der sidder på siden øverst til højre.

Reguler fra venstre til højre for ønsket tonehøjde.

Lydstyrke-

For at regulere lydstyrken (4) drej hjulet, der er på siden nederst til højre for hjørnet.

Jo højere nummeret er, jo højere er lydstyrken.

Sengevibrator - se Figur B

- 1) Tilslut sengevibratorens stik til urets bagside i VIBRATOR udtaget (14).
- 2) For at indstille vibrator til vækning - skub kontakten (8) til den ønskede position "VIB".
- 3) Læg vibratoren under madrassen eller puden.

12/24 timevisning-

For at ændre tidsdisplayet fra 12 timer til 24 timer, flyt kontakten oppe på bageste, højre hjørne til den foretrukne tid, 12 eller 24.

110 volt eller 220 volt (50 / 60 Hz kontakt)-

Afhængigt af den spænding dit ur bruger, skal Hz 50 / 60 kontakten indstilles korrekt. For 110 volt sæt kontakten til 60 Hz, for 220 volt sæt kontakten til 50 Hz. Hz kontakten findes i batterirummet. Denne indstilling regulerer uret, så det fungerer med den korrekte hastighed, der passer til den spænding, der bruges.

Vekselstrøm 9V strømtilførsel-

Forbind vekselstrømsledningen til bagsiden af uret ved AC-9V IN, ved siden af VIBRATOR udtaget.

Reservebatteri-

For at bruge reservebatteri kan du indsætte et 9-volt alkalisk batteri bagi uret. Skub batterirummets låg, som findes under urets venstre side, til venstre, og sæt batteriet i. Batteriet er ikke inkluderet. Bemærk LED displayet vil ikke være aktivt ved strømnedbrud men uret vil stadig køre med den rigtige tid, indtil strømmen kommer tilbage. Ved strømnedbrud kan alkaline batteriet kun holde uret kørende i op til 30 dage. Bemærk for det bedste resultat er det anbefalet at skifte batteriet hver 6 måned. Hvis uret ikke bruges i en periode anbefales det at fjerne batteriet for at undgå skade på uret ved batteri lækage.

INFORMATION-

Strømforsyning: 9V AC~800mA

CE mærket strømforsyning 230V AC



GENERELT

Anvisninger for genbrug:

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med en overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Ved udviklingen og fremstillingen af dette produkt er der anvendt materialer og komponenter, som kan genanvendes. Ved bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.



Garanti

Phonic Ear yder 2 års begrænset garanti på dette produkt.

Dog således, at der på sengevibratoren kun ydes den efter købelovens fastlagte reklamationsret og for handelskøb 1 års reklamationsret.

Garantiperiode

Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.

Hvad dækker garantien

Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejllens opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil dette blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt.

Hvad dækker garantien ikke

- 1) Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
- 2) Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse emner er returneret mere end 90 dage fra faktureringsdatoen.
- 3) Alkaline batterier (hvis disse anvendes).
- 4) Produkter tilsluttet, brugt eller ikke installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/installatøren.
- 5) Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti.
- 6) Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren.

Phonic Ear forbeholder sig ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte eksemplarer. Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår ovenfor.

Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven. Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere information.

Hvad gør du, hvis du har brug for service

Hvis du har brug for service under denne garanti, skal du henvende dig direkte til producenten. Er produktet ikke under garanti, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte forhandleren for yderligere information og rådgivning.