



## Breeze

- brugervejledning



**OBS ! VIGTIGT**  
Læs denne brugervejledning  
før Breeze tages i brug.

Dato: 26.05.2008 Version 2

**ergolet**  
løft verden

**Producent**  
Ergolet A/S  
Tårnborgevej 12 C  
DK - 4220 Korsør

Tlf.: + 45 58 37 37 20  
Fax: + 45 58 37 31 72  
Email: [ergolet@ergolet.dk](mailto:ergolet@ergolet.dk)  
Hjemmeside: [www.ergolet.dk](http://www.ergolet.dk)



**93/42/EØF CLASS I**  
**EN ISO 10535**  
**EN 60601-1-2**

1. INTRODUKTION	3
2. KOM GODT IGANG	
2.1 HØJDEJUSTERING	4
3. HÅNDBETING	
3.1 BREMSER	5
3.2 VEDLIGEHOLDELSE AF BREMSER	5
3.3 FORCERING AF KANTER	6
4. PARKERING	
4.1 SAMMENFOLDNING	7
4.2 SLÅ OP	7
5. KOMFORTDETALJER	
5.1 SÆDE	8
5.2 KURV	8
6. SIKKERHED	9
7. RENGØRING	9
8. TILBEHØR	10
9. TEKNISKE SPECIFIKATIONER	11

## 1. INTRODUKTION

Tillykke med din nye Breeze rollator.

Breeze er praktisk og let, og har et moderne og elegant udseende. Rollatoren er udviklet for at hjælpe brugeren i de fleste daglige situationer.

Vi i Ergolet mener at alle bør have muligheden til at nyde en spadser tur ude i det fri, og muligheden for selv at kunne komme rundt i eget hjem og ude i det offentlige. Rollatoren forenkler brugerens hverdag og ved hjælp af fremragende funktioner og samtidig et moderne udseende.

Breeze er enkel at justere, har 3 forskellige sædehøjder og egner sig særdeles godt ved transport i bus, bil o.lign.

Alle Breeze rollatorer er udviklet og testet efter gældende standarder for medicinsk udstyr og er CE-mærket. Breeze rollatoren er et attraktivt produkt med skandinavisk design, og en god følgesvend både ude og inde.

### Ergolet A/S




## 2. KOM GODT IGANG

### 2.1 HØJDEJUSTERING

Første gang rollatoren tages i brug, skal rollatoren indstilles rigtigt til brugeren. Højdejusteringen er så enkel, at flere brugere selv kan klare det. Det anbefales alligevel, at en kyndig person bistår indstillingen for at opnå den rigtige højde for brugeren.

Vip tungen på indersiden af styrets rør ud, og hæv/sænk styret til ønsket højde. Fjedertungen skyder en låsepind ind i det rigtige hul. Gør det samme på modsatte styr, og sørg for at højden bliver den samme ved hjælp af tallene. Husk at tjekke bremserne efter højderegulering

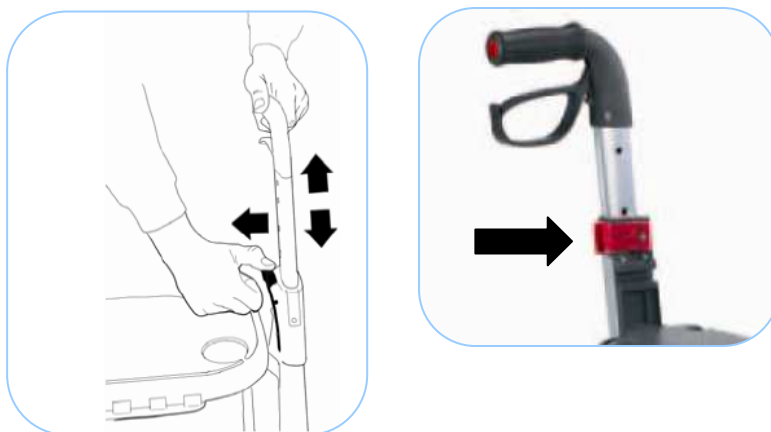

Sædet kan også justeres i højden. Under sæderammen sidder der på hver side en lille plast arm. Klem armene ind, og skub sædet forover til det går ud af sporet. Flyt sædet til den ønskede position og træk sædet mod dig til det låses i den rigtige position.



## 3. HÅNDBTERING

### 3.1 BREMSER

Bremserne på Breeze håndteres meget let ved at klemme håndtaget ind. Højre bremsehåndtag bremser højre baghjul, og venstre bremsehåndtag bremser venstre baghjul. Bremserne fungerer efter et velkendt princip med en arm, der presser ned mod dækkets yderkant. En driftssikker og effektiv bremseløsning. For parkering låses bremserne ved at skubbe grebet på hvert håndtag ned, til man hører et klik. Husk altid at aktivere begge parkeringsbremser.



### 3.2 Vedligeholdelse af bremser

Før du tager Breeze rollatoren i brug skal du kontrollere at bremserne virker hensigtsmæssigt. Bremserne bør kontrolleres og justeres med jævne mellemrum, da slidtage på bremsesystem og hjul kan føre til svækkelse af bremserne.

Skulle bremserne begynde at blive svage, bør de justeres. Dette gøres meget enkelt med en 5 mm sekskantsnøgle. Læg rollatoren forover på gulvet. Juster skruen så den er ca. 3mm fra hjulet. Juster skruen ind (mod højre) for at øge distancen, og ud (mod venstre) for at mindske afstanden til hjulet.



### 3.3 FORCERING AF KANTER

Rollatoren er udstyret med en "vippehjælp", som gør det nemmer at komme over hindringer. Pres foden på vippehjælpen, og træk lidt tilbage i håndtagene for at løfte forhjulene over hindringen.



## 4. PARKERING

### 4.1 SAMMENFOLDNING

For at folde rollatoren sammen ved parkering eller transport, træk i det røde håndtag, og rollatoren er slået sammen. Breeze kan dog kun stå sammenklappet som vist nedenfor, op af en væg eller lign.



I sammenklappet tilstand er rollatoren let at transportere med offentlige transportmidler eller i bagagerummet på en bil. Takket været den kompakte facon uden løse wirer og ender, der stikker ud, hægter den sig ikke fast i omgivelserne.



### 4.2 SLÅ OP

For at folde rollatoren ud presses håndtaget op mod sædet, og Breeze foldes ud, og rollatoren er klar til brug.

## 5. KOMFORT

### 5.1 SÆDE

Sædet på rollatoren kan justeres i højden, og justeringen er beskrevet i kapitlet "kom i gang". I rigtig højde giver sædet brugeren en komfortabel hvilemulighed.

Til brug indendørs er det vigtigt, at sædet er fladt og stabilt for at kunne fragte kaffekop, kedel o.l., som man ønsker at tage med.



### 5.2 KURV

Foran sædet hænger en smart indkøbskurv (valgfri) Kurven kan max. indeholde 10 kg.





## 6. SIKKERHED

Det er ikke tilladt at stå på rollatoren.

Det er heller ikke tilladt at bruge rollatoren til persontransport.

## 7. RENGØRING

Fjern indkøbskurven, før du starter rengøring af rollatoren. Rollatoren kan vaskes med børste, vandslange eller højtryksspuler. Rollatoren tåler alle almindelige rengøringsmidler.

## 8. EKSTRA TILBEHØR



Bakke/bordplade



Rygrem



Beslag til stok



Handlekurv



Ekstra taske

## 8. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Standard specifikationer for Breeze rollator

1. T-6061 aluminium ramme
2. Højdejusterbare håndtag
3. Skjult bremsesystem med låsbar parkeringsbremse
4. Store (20 cm) forhjul og vippehjælp
5. Højdejusterbart sæde med håndtag

### Tekniske data

Type	Breeze
Maks. brugervægt	125 kg
Håndtagshøjde	77-95 cm
Sædehøjde	46-62 cm
Mål i cm (bxl)	60x84 cm
Mål sammenfoldet	60x50x89
Vægt	< 7 kg
Materiale	Aluminium og fiberarmeret plast
Rengøring	Sæbe, vand eller højtryksspuler



#### Breeze Brochurer

- Breeze salgsbrochure

#### Producent :

Ergolet A/S  
Tårnborgevej 12C  
4220 Korsør  
Danmark

Telefon: +45 58 37 37 20  
Fax: +45 58 37 31 72  
e-mail: [ergolet@ergolet.dk](mailto:ergolet@ergolet.dk)  
Hjemmeside: [www.ergolet.dk](http://www.ergolet.dk)

#### Forhandler :