



Danish **CARE** Supply  
- fremtidens hjælpemidler

# SLIP-ÅBEN - TÅ

Beregnet til på- og afgang af støtte- og kompressionsstrømper med åben tå.  
Vi anbefaler brug af handsker sammen med slip i forbindelse med på- og afgang af kompressionsstrømper. Den findes i 5 størrelser.

SÆT X	HMI-nr.	Varenr.	Varetekst	Sko - størrelse
	72526	3020	SLIP-ÅBEN - TÅ - EKSTRA SMALL - XS	33 - 36
	72527	3021	SLIP-ÅBEN - TÅ - SMALL - S	37 - 39
	72528	3022	SLIP-ÅBEN - TÅ - MEDIUM - M	40 - 42
	72529	3023	SLIP-ÅBEN - TÅ - LARGE - L	43 - 45
	72530	3024	SLIP-ÅBEN - TÅ - EKSTRA LARGE - XL	46 - 48



[www.danishcaresupply.dk](http://www.danishcaresupply.dk)

Danmarks største udvalg af strømpe på- og afgangere



## > Påtagning



**1.** Start med at folde de to ender ind, så der dannes en lille pose.



**2.** Sæt benet over kors eller buk dig frem og træk slippen på foden.



**3.** Sæt strømpen på foden og træk strømpen op ad benet.



**4.** Tag handsker på og gnid med flad hånd strømpen op langs benet.



**5.** Træk strømpen op.



**6.** Træk i løkken, så slippen kommer ud af strømpen. Hold også fast om strømpen med den anden hånd, så strømpen bliver på sin plads.



## > Aftagning



**1.** Sæt foden ind i slippen og sæt velcrobåndet fast om benet.



**2.** Fold slippen ud over velcrobåndet.



**3.** Træk i strømpen til den når ud over foden.



**4.** Tag handsker på og glid strømpen rundt om hælen til strømpen kommer af.

## > Hvis det kniber med på- og aftagning?



Hvis det kniber med at få strømpen rundt om hælen i på- og/eller aftagning af kompressionsstrømper, kan vi anbefale at anvende en blå friktionsplade.



**Rengøring:** Vaskes i hånden ved max 30° C.

**Materiale:** Spilerdug



Youtube  
Video





Vi har markedets største sortiment og know-how indenfor på- og aftagning af kompressionsstrømper. Vi hjælper dig gerne med at udvælge det rette hjælpemiddel, som passer bedst til dine behov.

Kontakt os på telefon: 221 18616 eller på mail: [dcs@danishcaresupply.dk](mailto:dcs@danishcaresupply.dk)


#### ➤ På- og aftagere



#### ➤ Doff N' Donner



#### ➤ Glidestykker - på/af

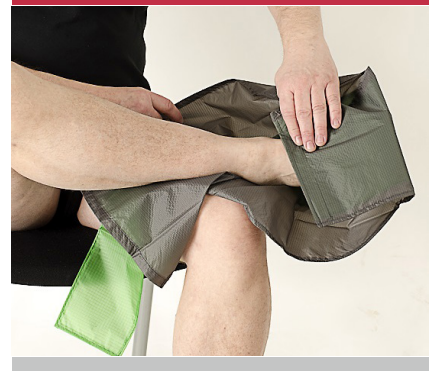

#### ➤ Elektrisk aftager



#### ➤ Handsker



#### ➤ Spilerdug



Få mere inspiration på vores webshop [www.danishcaresupply.dk](http://www.danishcaresupply.dk) eller besøg gerne vores fysiske butik i Randers på Agerskallet 1 – 8920 Randers NV. Vi har et stort program indenfor småhjælpemidler, som kan gøre hverdagen lidt lettere.

**På gensyn...**

### Danish CARE Supply

Agerskallet 1

8920 Randers NV

Telefon: +45 2211 8616

E-mail: [dcs@danishcaresupply.dk](mailto:dcs@danishcaresupply.dk)

[www.danishcaresupply.dk](http://www.danishcaresupply.dk)



Følg os på  
**facebook**

[facebook.com/danishcaresupply](https://facebook.com/danishcaresupply)