

# MEMOactive P2

Varenummer: 402 720





# Indhold

1	Indledning	5
2	MEMOactive	6
2.1	Indhold	6
2.2	Oversigt	7
3	Inden du tænder Memoactive	8
4	Bæltetaske	9
5	Dvale-knappen	9
5.1	Slukke skærmen	9
5.2	Sluk for baggrudsbelysningen	9
6	Sluk for Memoactive	9
6.1	Sluk via afslut i systemopsætningen	9
7	Klokkeslæt og dato	11
8	Brug af Telefon- og SMS-funktionerne.	13
8.1	SIM-kort indstillinger	13
8.2	Import af SIM-kontakter	14
9	Opladning af batteriet	15
9.1	Batteri indikator	16
9.2	LED indikator	16
10	Indstillinger for talesyntese	18
11	Overførsel af egne billeder til albummet Mine fotos	19
12	Customer Feedback	20
13	Synkronisering af Memoactive og Memoplanner	21
14	Genstart og fabriksindstillinger	22
14.1	Genstart	22
14.2	Gendan fabriksindstillinger	22
15	Automatisk backup	24
16	Slet alle brugerdata	24
17	Fejlsøgning	25
18	Rengøring	26
19	Tekniske data	26
20	Sikkerhed og ansvar	26
21	Miljø	27



# 1 Indledning

Memoactive og Memoplanner er digitale kalendere med påmindelsesfunktion.

Memoactive er bærbar, mens Memoplanner er stationær.

Memoactive og Memoplanner hjælper dig med at huske aftaler, strukturere dine dage, døgn, uger, måneder og/eller år. Påmindelse kan modtages som lyd og/eller talemeddelelse.

En tidslinje i form af en lyssøjle eller lysprik viser, hvad tid på dagen det er, med rød farve for dag og blå farve for nat.

Memoactive og Memoplanner er udviklet i samarbejde med fagfolk inden for områderne demens, udviklingshæmmede, erhvervet hjerneskade, neuro-psykiatri og psykiatri i Norge, Sverige og Danmark.

Memoactive og Memoplanner er udviklet med støtte fra Norges forskningsråd IT Funk.

Memoactive og Memoplanner kan bidrage til at gøre hverdagen nemmere for personer med kognitive svigt.

Personer med udfordringer i at planlægge og strukturere deres hverdag eller har hukommelsesproblemer, kan få meget hjælp fra Memoactive og Memoplanner.

## **Vigtigt:**

**Memoactive skal stå til opladning uafbrudt i 48 timer før brug.**

Dette er for at sikre at backup-batteriet er fuldt opladet. Backup-batteri sikrer at dato og tid ikke nulstilles når det primære batteri løber ud.

For at sikre, at MEMOactive har nok batterikapacitet, skal den oplades hver nat.

## 2 MEMOactive

### 2.1 Indhold

Æsken indeholder:

a)



b)



c)



d)



e)



f)




g)



h)




i)

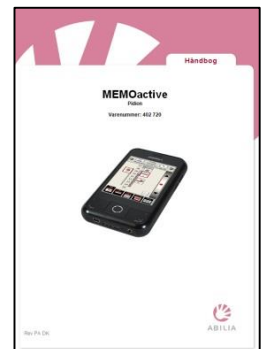

- a) MEMOactive
- b) Bæltetaske
- c) Fingerguide
- d) Oplader
- e) USB/opladerledning
- f) Høretelefoner
- g) Hukommelseskort (sidder i MEMOactive)
- h) Batteri
- i) Brugervejledning (denne)

## 2.2 Oversigt

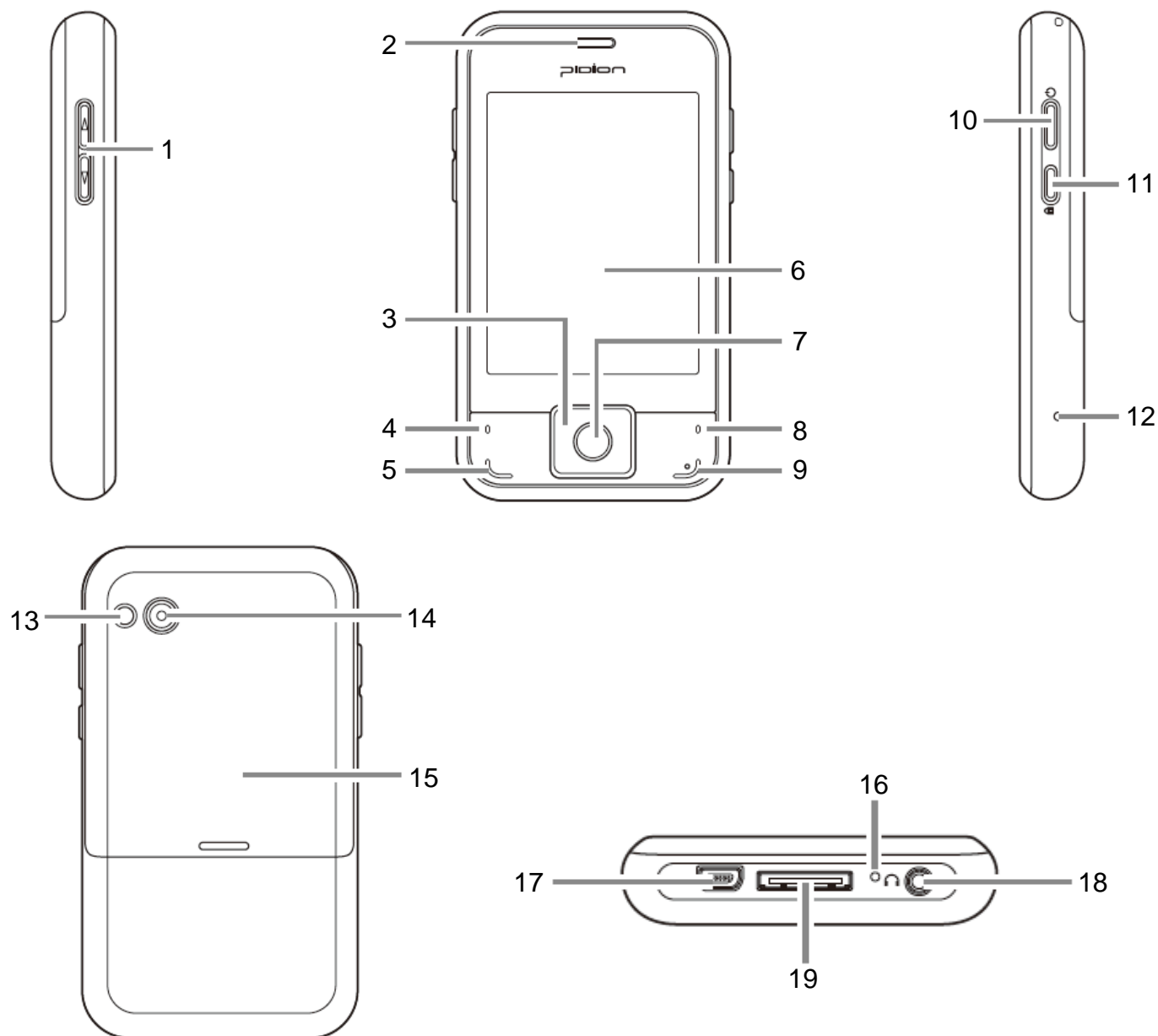

1	Ikke i brug	11	Ikke i brug
2	Højtaler	12	Genstart/resetknap
3	Navigationsknap	13	Blitz
4	Ikke i brug	14	Kameralinse
5	Ikke i brug	15	Bagdæksel
6	Berøringsskærm	16	Mikrofon
7	OK-knap (kun til brug ved Hard reset)	17	USB-stik (synk)
8	Ikke i brug	18	Tilslutning af ørepropper
9	Ikke i brug	19	24 pins USB kabel (oplading + synk)
10	Dvale-knap		


### 3 Inden du tænder Memoactive

Isæt batteriet i Memoactive, hvis telefonfunktionen i Memoactive skal bruges, så skal SIM-kortet også sættes i.

#### Fjern bagcoveret

Fjern bagcoveret for at få adgang til batterirummet, SIM-kortsporet og lagringskortsporet.

- Hold telefonen med fronten vendt nedad.
- Skub bagcoveret op

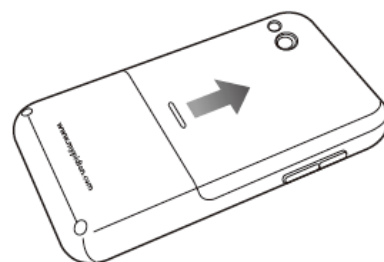


#### Sæt SIM-kortet i

Hvis telefonfunktionen i Memoactive skal bruges, kan SIM-kortet sættes ind nu.

**NB!** PIN-koden på SIM-kortet skal være slået fra. Det gøres på en almindelig mobiltelefon – se evt. i brugervejledningen til mobilen eller spørg telefonselskabet, hvordan du skal gøre.

Memoactive støtter både 1,8-volt og 3-volt SIM-kort. Nogle ældre SIM-kort vil muligvis ikke fungere sammen med telefonen. Du bør kontakte mobiludbyderen for at få et nyt SIM-kort. Der kan være gebyrer forbundet med denne tjeneste.


- Sæt SIM-kortet i med guldkontakterne vendt nedad og det skrå hjørnet vendt opad.
- Skub SIM-kortet helt ind i sporet.

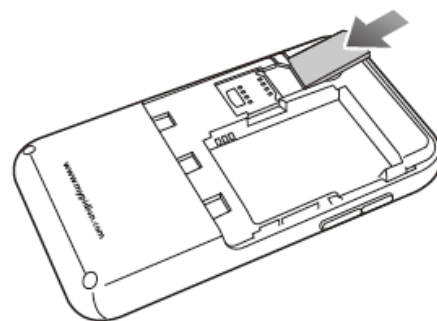

#### Sæt batteriet i

- Skub batteriet ned i batterirummet som vist.


**NB!** Kontakterne på batteriet skal være nederst til venstre, når batteriet skubbes i.

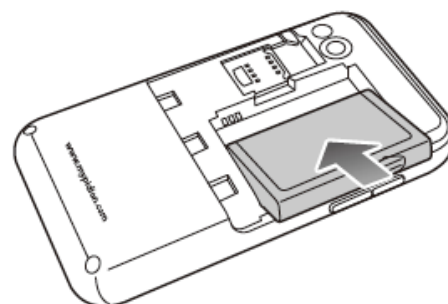

#### Sæt bagcoveret på

- Skub bagcoveret på plads som vist.

Tænd Memoactive ved at trykke let på Dvale-knappen.  
*Se kapitel 5.*

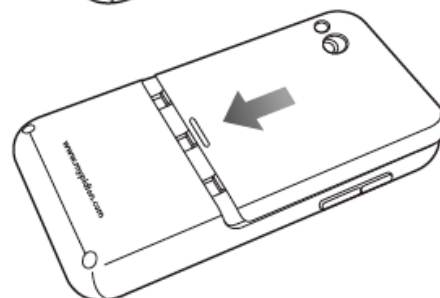



## 4 Bæltetaske

Hvis Memoactive skal bruges med bæltetaske, skal fingerguiden bruges. Fingerguiden fastgøres på Memoactive, før den sættes ind i bæltetasken.

## 5 Dvale-knappen


Dvale-knappen har to funktioner, disse beskrives nedenfor.

### 5.1 Slukke skærmen

Skærmen på Memoactive tændes og slukkes ved at trykke på Dvale-knappen på højre side.

### 5.2 Sluk for baggrundsbelysningen

Baggrundsbelysningen på Memoactive kan tændes og slukkes ved at holde Dvaleknappen inde i mere end 3 sekunder.

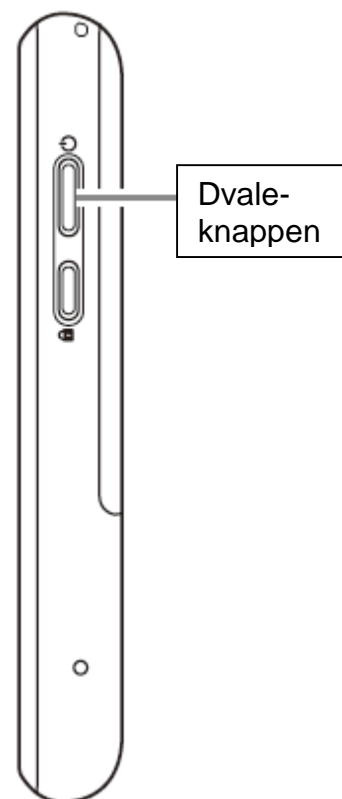

## 6 Sluk for Memoactive


For at slukke helt for Memoactive skal batteriet tages ud.

Før batteriet tages ud må Memoactive programmet afsluttes, hvordan det gøres beskrives i kapitlet nedenfor.

### 6.1 Sluk via afslut i systemopsætningen


**NB!** Hvis Memoactive-programmet afsluttes, vil ingen aktiviteter blive varslet.




Tryk  på *menu*, så vises denne side hvis beskyttelse med adgangskode er slået til. Hvis adgangskode ikke er valgt kommer man direkte ind i Indstillinger.


Adgangskode						
<input type="text"/>						
Indstillinger		Menu		Ny aktivitet		
a	b	c	d	e	f	g
h	i	j	k	l	m	n
o	p	q	r	s	t	u
v	w	x	y	z	æ	ø
å	.	↑		123	←	🗑️
← Tilbage						

Ved levering er beskyttelse med adgangskode slået fra. Standard kodeord er "abc".

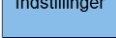Når adgangskoden skrives ind, og  trykkes, vises siderne herunder.

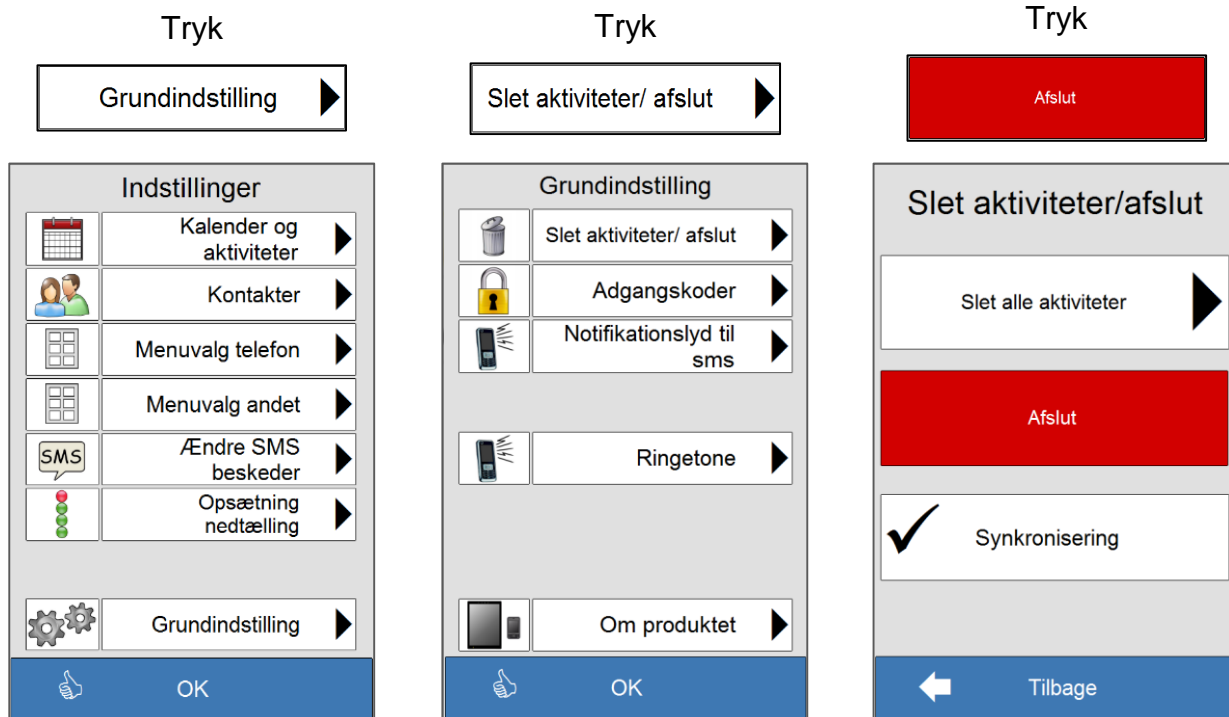

Når du trykker på *Afslut* vises denne side:

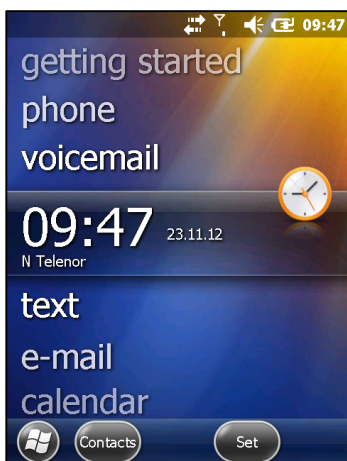

Tag bagcoveret af og tag batteriet ud for at slukke helt for Memoactive.


Memoactive tændes igen ved at sætte batteriet i igen og trykke på *Dvale*-knappen.

## 7 Klokkelæt og dato


Hvis Memoactive har ligget et stykke tid med tomt batteri, kan det ske, at dato og klokkelæt skal indstilles igen. Det gøres på følgende måde:

Afslut Memoactive programmet.


Tryk Windows flaget.

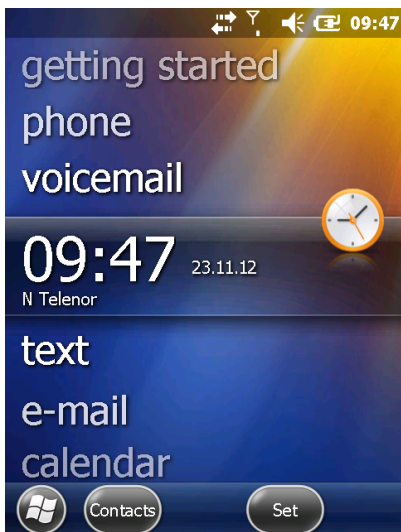

Tryk *Settings*.

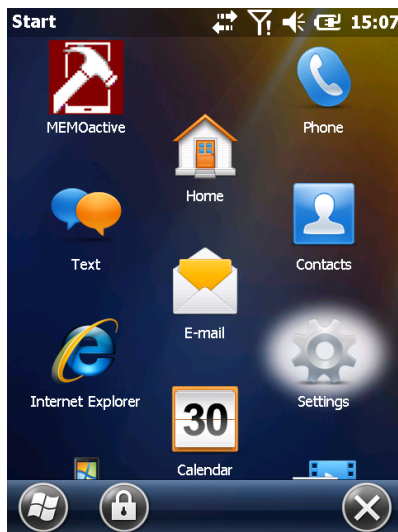

Tryk *Clock & alarms*.

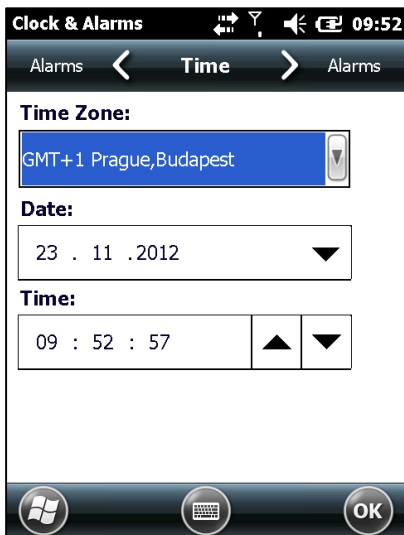

Sørg for, at der står GMT+1 i feltet, hvis det ikke er tilfældet, skal der trykkes på pilen, og man vælger en af de byer, der ligger inden for GMT+1.

Datoen indstilles ved at trykke på pilen ved siden af datoen. Der vil så komme en kalender frem. Der bladrer man sig frem til det rigtige år og måned og vælger så rigtig dag ved at trykke på den. Eller man kan markere et af tallene og bladre op og ned med Navigations-knappen.


Uret stilles ved at markere time, minut eller sekund. Man kan så bladre op eller ned med pilene ved siden af klokkelættet, eller man kan trykke på tastaturknappen



nederst på siden eller man kan bruge Navigations-knappen

Når tidszone, klokkelæt og dato er indstillet, trykkes  i nederste højre hjørne.

Tryk på Yes, når dette billede vises.

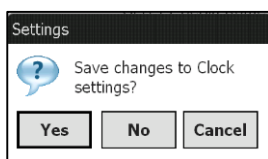

Tryk X i nederst til højre hjørne.



Tryk på Windows flaget.



Tryk på Memoative-ikonet for at starte programmet igen.



## 8 Brug af Telefon- og SMS-funktionerne.

For at telefon og sms-funktionerne skal kunne bruges, skal der foretages nogle operatørindstillinger. Normalt gøres dette automatisk, når Memoactive startes op første gang efter SIM-kortet er blevet sat i.

PIN-koden på SIM-kortet skal være deaktiveret (se kapitel 3).

Hvis man ikke kan ringe eller sende SMS og Flymodus er slået fra (se i kapitel *Teknisk i Brugervejledning for Menufunktionerne*) skal punktene nedenfor checkes:

### 8.1 SIM-kort indstillinger


SIM-kort indstillingerne checkes på følgende måde:

Afslut Memoactive programmet.


Tryk på Windows flaget.




Tryk på *Phone*.

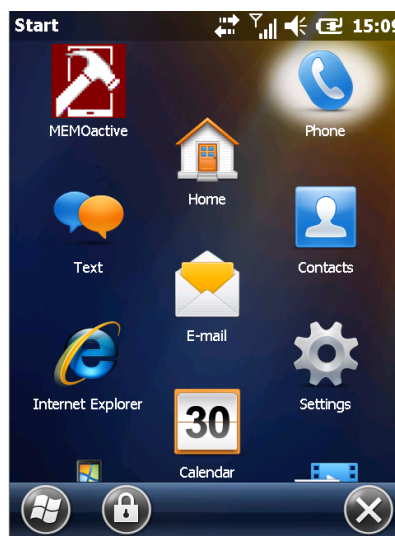


Tryk på *Menu*-knappen.

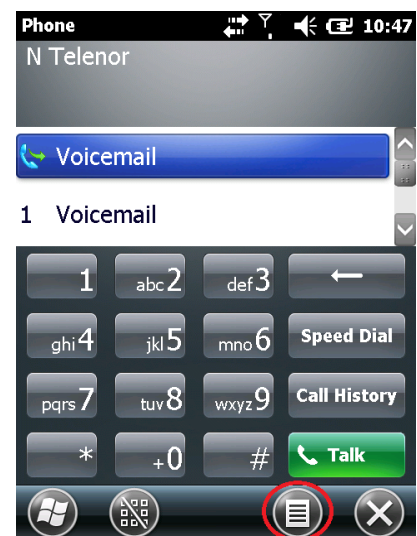


Tryk *Options*.

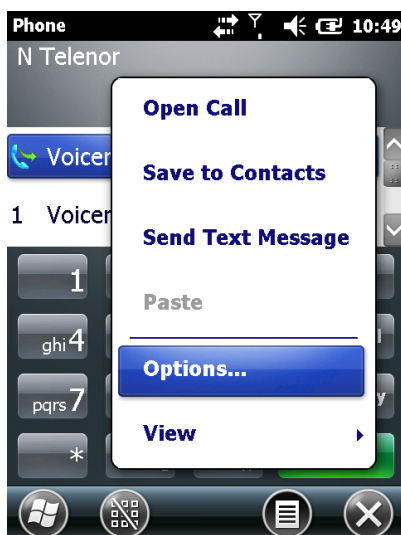

Tryk på en af pilene øverst indtil der står *Network* mellem pilene.

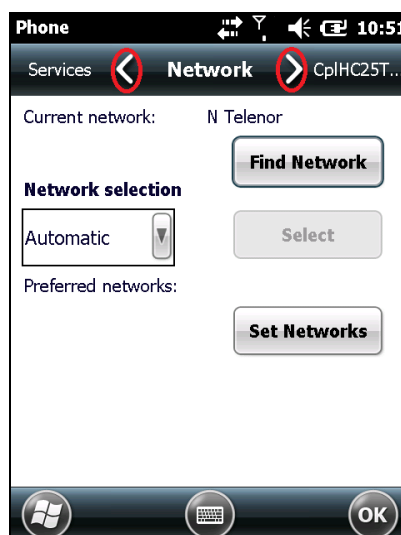

Kontroller at der står *Automatic* under Network selection. Hvis der står *Manual* skal det ændres til *Automatic* ved at klikke på den og vælge *Automatic*.

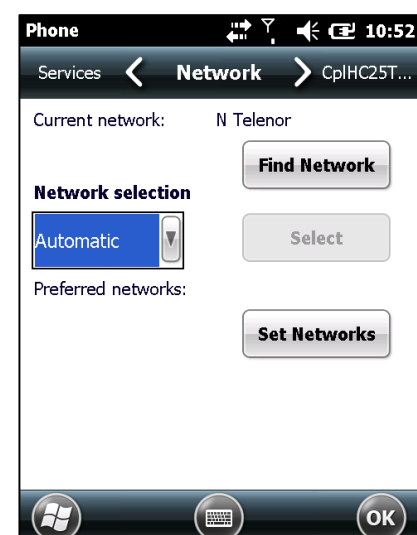

Tryk på *OK* nederst i højre hjørne.

Tryk på Windows flaget nederst i venstre hjørne.

Tryk på *Memoactive* ikonet for at starte programmet.



## 8.2 Import af SIM-kontakter

Hvis man har et SIM-kort med gemte kontakter, kan de importeres til *Kontakter*.



Sådan gøres det:

Afslut Memoactive.

Tryk på Windows flaget.

Tryk på *Memoactive*-ikonet.




Tryk *Cancel*.

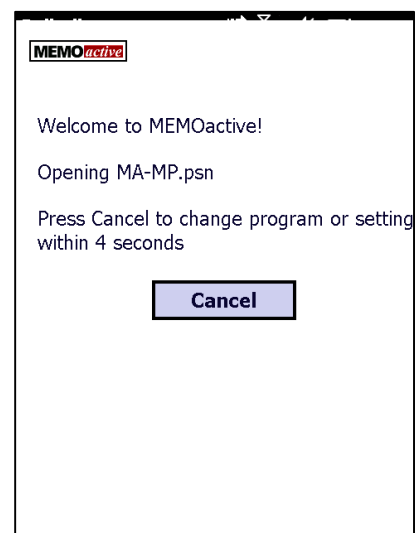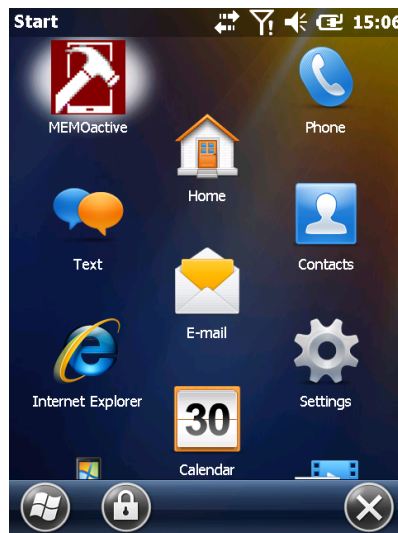

Tryk *File* nederst til venstre, og vælg "Import SIM contacts".

Tryk på MA-MP.psn for at starte Memoactive.

SIM-kontakterne er nu importeret til *Kontakter*.

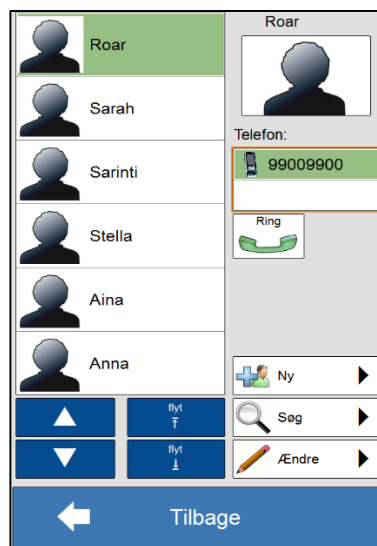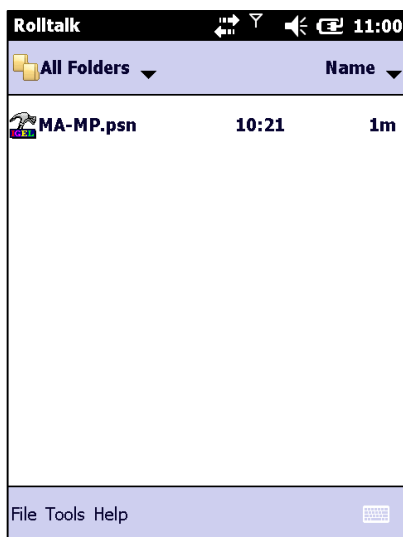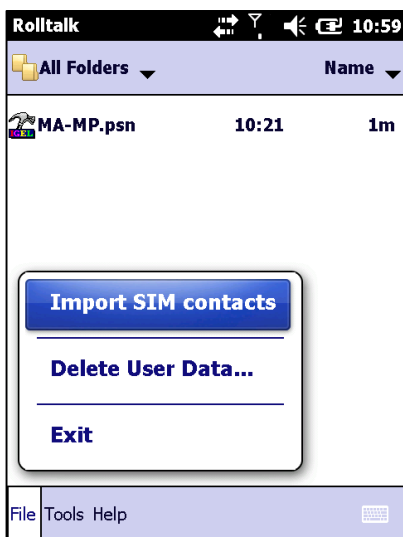

Kontakterne kan redigeres i funktionen *Kontakter*, se kapitel 6 i *Brugervejledning til menufunktionerne*.

## 9 Opladning af batteriet


Ved levering er batteriet ladet helt op.

Batterikapaciteten i MEMOactive er tilstrækkelig til en dags normal brug.

For at sikre, at MEMOactive har nok batterikapacitet, skal den oplades hver nat.

- Tilslut 24 pins USB-kablet til telefonen.
- Tilslut opladeren ladestikket på 24 pins USB-kablet.
- Sæt opladeren i en stikkontakt for at oplade batteriet.



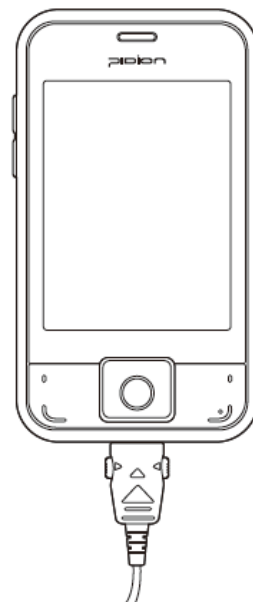





Under opladningen lyser batteri indikatoren (på venstre side øverst) kontinuerligt orange. Lyset bliver kontinuerligt grønt, når Memoactive er færdig opladet.



## 9.1 Batteri indikator

På menusiden vises et batteri ikon, der angiver batteri kapaciteten.



- Batteriet oplades 
- Batteri kapacitet 100 % 
- Batteri kapacitet 80 % 
- Batteri kapacitet 60 % 
- Batteri kapacitet 40 % 
- Batteri kapacitet 20 % 
- Batteri kapacitet 10 % 
- Batteri kapacitet 0 % 

Når batteri kapaciteten når 20 %, vises batteri ikonet øverst til højre på dagkalenderen.



## 9.2 LED indikator

Der er to dioder på forsiden af enheden, disse ændres ud fra hvilken status Memoactive har.

### Batteri indikator LED

Lader nu	Orange
Fuldt opladet	Grøn


### Radiofunktioner

	WLAN	Bluetooth	GSM
I Brug	Blå	Blå	Blå
Modtag	-	-	Blinker som svar på opkald
Accesspunk Søger	Blinker indtil tilkobling er aktiveret	-	-
Søger	-	Blinker Kontinuerligt	-



Bluetooth og WLAN er deaktiveret ved levering. For at tænde eller slukke de forskellige radiofunktioner gøres følgende:

Tryk på Settings

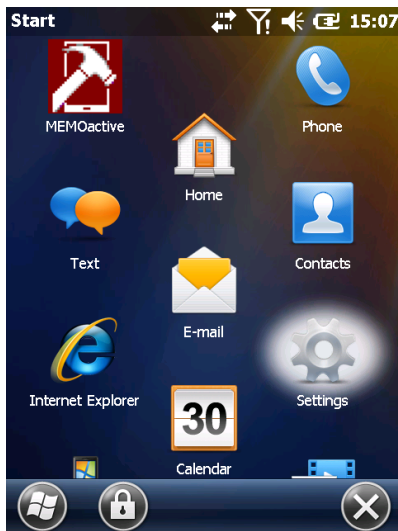

Tryk på Connections



Tryk på Wireless Manager



Tryk på on eller off på funktionen som skal aktiveres eller deaktiveres.




## 10 Indstillinger for talesyntese

Talesyntesens hastighed og volumen kan justeres.

Sådan gøres det:

Afslut Memoactive.


Tryk på Windows flaget.

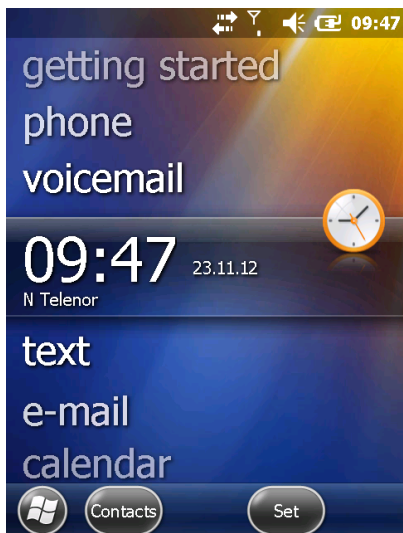


Tryk på *Memoactive*-ikonet.




Tryk *Cancel*.

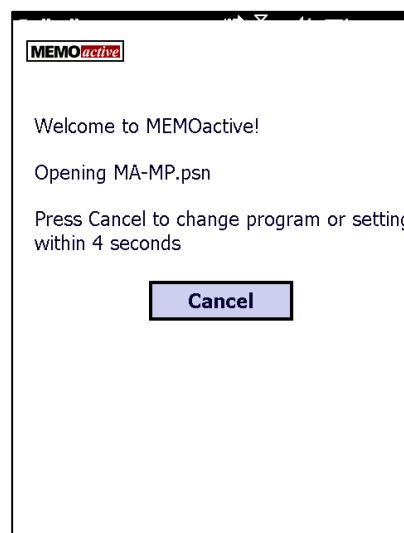


Tryk på *Tools* nederst til venstre, og vælg "Options".

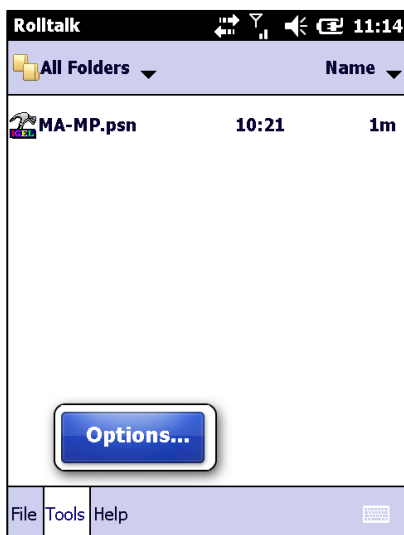

Tryk på fanen Options nederst til højre. Juster hastighed og/eller volumen. Tryk Test for at lytte. Tryk Ok, når du er færdig.

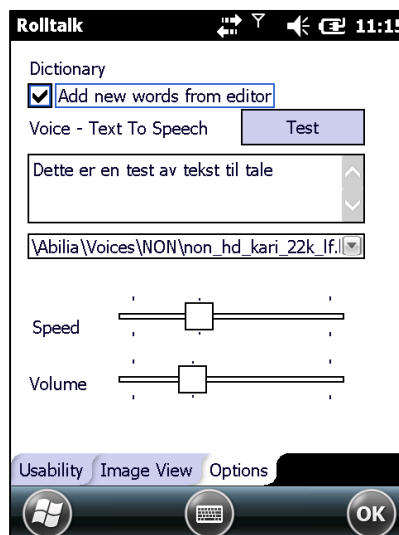

Tryk på *ma-mp.psn* for at starte Memoactive.

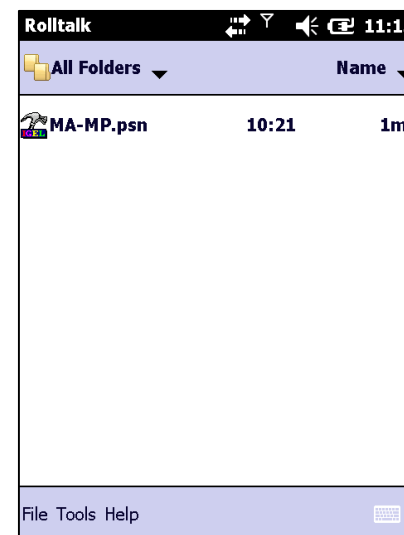

## 11 Overførsel af egne billeder til albummet Mine fotos

Egne billeder kan overføres til albummet *Mine fotos*.

Vi anbefaler, at antallet af billeder holdes på et lavt niveau, da det kan være vanskeligt at finde billederne, hvis albummet indeholder mange billeder.

Billederne skal være i formatet jpg, og billederne kan ikke være større end 480 x 640 pixel. Hvis billederne er for store, bliver de ikke vist rigtigt.

Størrelsen på billederne kan ændres i billedbehandlingsprogrammer som f.eks. Microsoft-programmet Paint, der følger med alle Windows pc'er.

For at overføre billederne fra pc'en til Memoactive, skal Memoactive tilsluttes pc'en med USB-kablet, og man skal have ActiveSync eller Mobile Device Center.

I Windows 2000/XP kommunikerer pc'en og Memoactive ved hjælp af programmet *ActiveSync*.

ActiveSync kan hentes fra <http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=15>.

I Windows Vista og Windows 7 kommunikerer pc'en og Memoactive ved hjælp af det indbyggede program Windows Mobile Device Center for at kunne kommunikere med Memoactive.

Når du tilslutter din Memoactive til pc'en første gang, vises billedet til højre automatisk. Klik på "Registrer ikke" nederst til højre.

Nu vises billedet herunder, luk det ved at klikke på krydset øverst til højre.


Det er vigtigt, at du **ikke** vælger *Konfigurer enheden*.

Hvis der ikke sker noget, når du tilslutter din Memoactive, skal du hente sidste version af Windows Mobile Device Center.

Det gør du enklest ved at starte Windows update, efter at have tilsluttet Memoactive til pc'en. (Pc'en skal være tilsluttet internettet)


Hvis det ikke fungerer, kan man hente programmet *Windows Mobile Device Center* på følgende link:

<http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp6/sync/installing-wmdc.aspx>

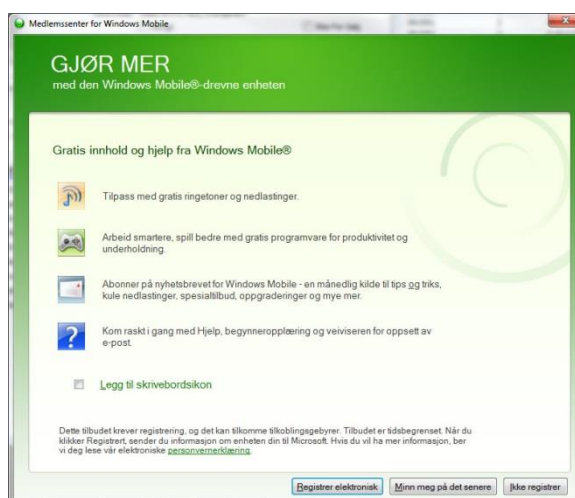

Gør følgende for at overføre billederne:

1. Afslut Memoactive-programmet.
2. Tilslut Memoactive til pc'en med USB-kablet.
3. Billederne skal overføres til mappen *My photos* på hukommelseskortet i Memoactive. Se billede:
4. Når billederne er overført, startes Memoactive igen, og billederne vises nu i albummet *Mine fotos*.

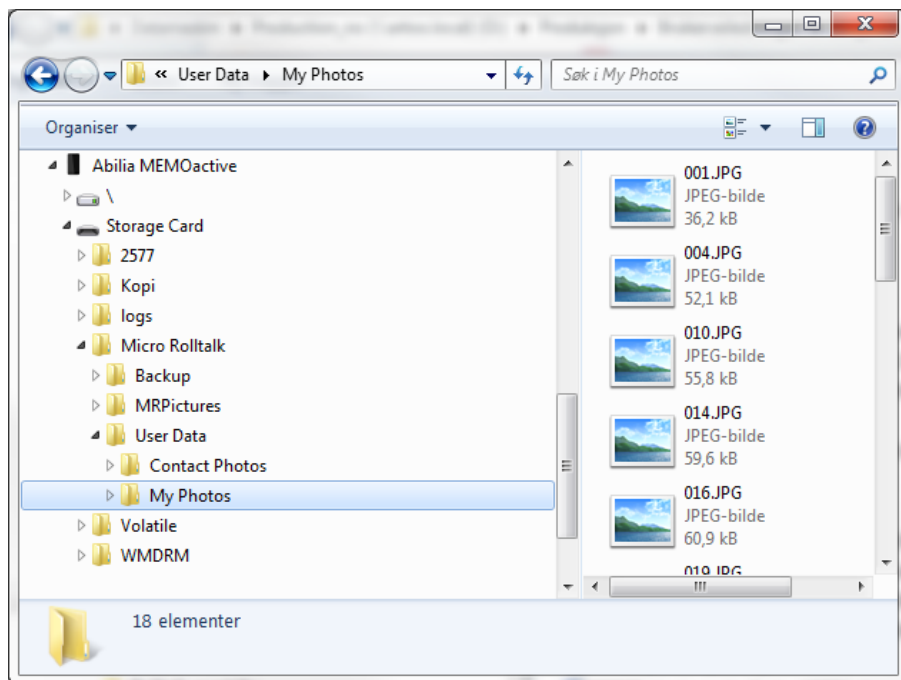

## 12 Customer Feedback

En besked Customer Feedback kan dukke op på Memoactive. Hvis den gør det, er det enklest at gennemgå den. Check at "Don't send Feedback" er markeret. Tryk dig herefter igennem resten af den.

## 13 Synkronisering af Memoactive og Memoplanner

Hvis man har både Memoactive og Memoplanner kan aktiviteter og kontakter synkroniseres via USB/ladekablet.


NB! Memoactive og Memoplanner må have samme version hvis man ønsker at benytte synkronisering.

For at tjekke hvilken version enheden har, gør følgende på Memoactive og Memoplanner:


Tryk på *Indstillinger*.



Tryk på *Grundindstilling*.

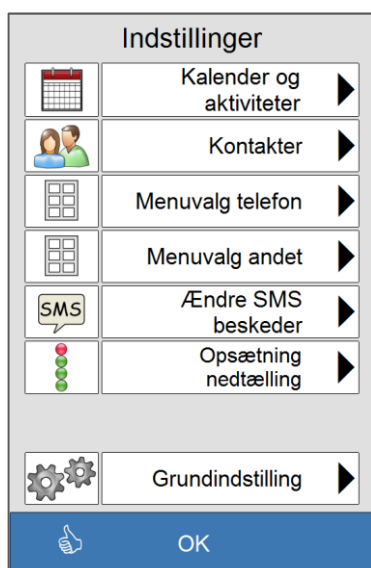

Tryk på *Om produktet*.

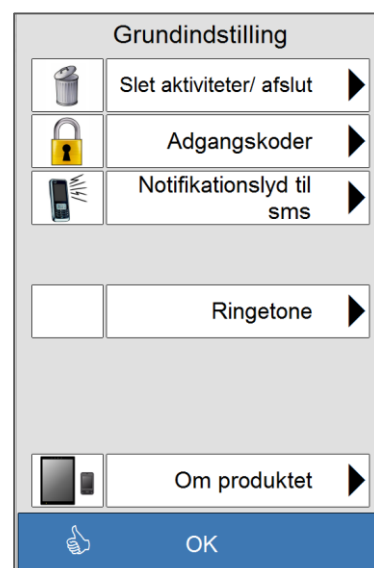


Versionen vises her:



## 14 Genstart og fabriksindstillinger

### 14.1 Genstart

Hvis Memoactive programmet er stoppet/eller hænger, kan det hjælpe at lave en omstart/reset. Dette gøres ved at trykke på Genstart-knappen med en spids genstand, se billedet.

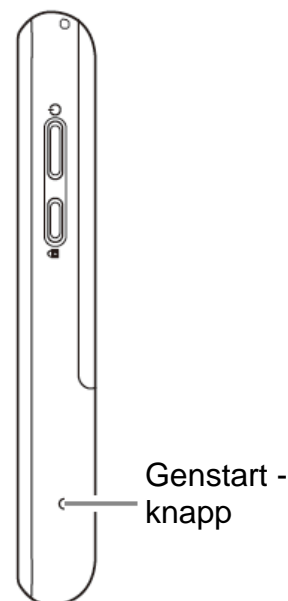

### 14.2 Gendan fabriksindstillinger

Hvis en genstart ikke hjælper, kan det hjælpe at gendanne fabriksindstillinger. En Hard reset sletter alt, hvad der er installeret og gemt på apparatet. Aktiviteter og billeder, der er lagt ind, bliver ikke slettet, da de ligger på hukommelseskortet.


Sådan gendannes fabriksindstillinger på Memoactive:

1. Afslut Memoactive programmet hvis det kan lade sig gøre, se kapitel 6.1
2. Sæt pinden ind i Soft Reset-hullet
3. Hold OK-knappen inde.
4. Fjern pinden fra Soft Reset-hullet, mens du stadig holder OK-knappen inde indtil Windows logoet vises i skærbilledet.
5. Hard Reset – processen er startet. Følg anvisningene på skærmen.


Følgende opstarts rutine skal gennemgås på Memoactive, når hukommelsen er slettet (efter hard reset):

1. Tryk på skærmen for at opsætte enheden.
2. Brug pinden og tryk i midten af krydsene som vises, for at kalibrere skærmen.
3. Vælg indstillinger for lokaltid. Vælg først rigtig tidszone.
4. Indstil klokken ved at trykke på op/ned tasterne ved siden af tallene. Vælg korrekt dato ved først at trykke på dato og derefter i kalenderen til korrekt måned vises.  
(Rigtige tidsindstillinger er specielt vigtige til brug af funktioner til tidsvisning og påmindelser).
5. Vælg SKIP for at springe over opsætning af password.
6. Spring over konfigurationen af e-mail.
7. Tryk på skærmen for at fuldføre opstarts- rutinen. Enheden konfigurerer de resterende punkter automatisk.

8. Hvis der er isat SIM-kort, vil disse to vinduer vises, hvis ikke, så gå til punkt 9.

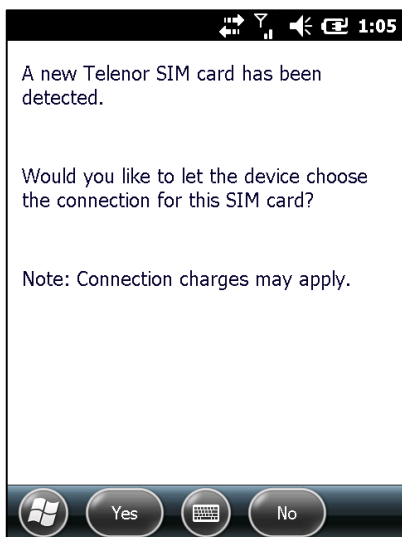

Tryk Yes

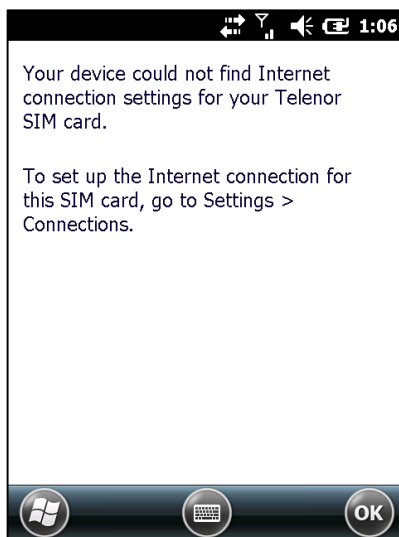

Tryk OK

9. Hvis vinduet nedenfor vises, så lav en Omstart (se kapitel 14.1)



10. Tryk Yes for at starte installationen, når denne side vises.



Programmet installeres, og apparatet genstarter, før Memoactive-programmet starter op.

11. Memoactive er klar til brug.

## 15 Automatisk backup

Der køres automatisk backup af Memoactive hver nat. Det gør det muligt, at hente data fra dagen før eller ugen før, frem igen.

Backup-filerne gemmes på hukommelseskortet i Memoactive under mappen backup.

## 16 Slet alle brugerdata

Alle brugerdata kan slettes, men så bliver de slettet for altid.

Alle brugerdata slettes på følgende måde:

Afslut Memoactive.


Tryk på Windows flaget.




Tryk på Memoactive-ikonet.




Tryk *Cancel*.

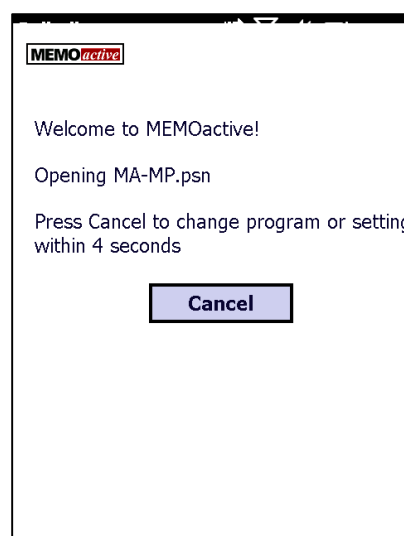


Tryk *File* nederst til venstre, og vælg "Delete user data".

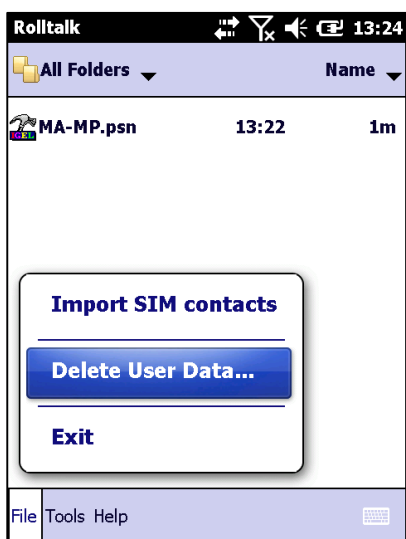

Tryk *Yes*.

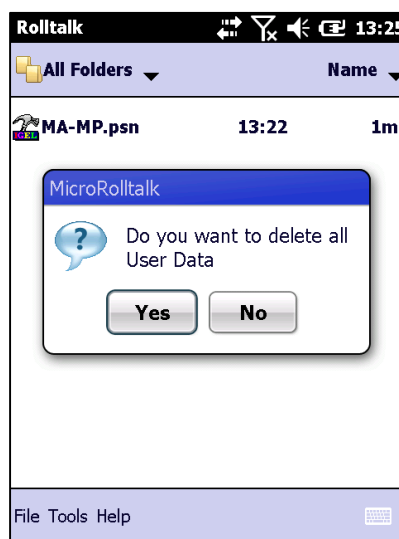



Tryk *Yes* én gang mere.

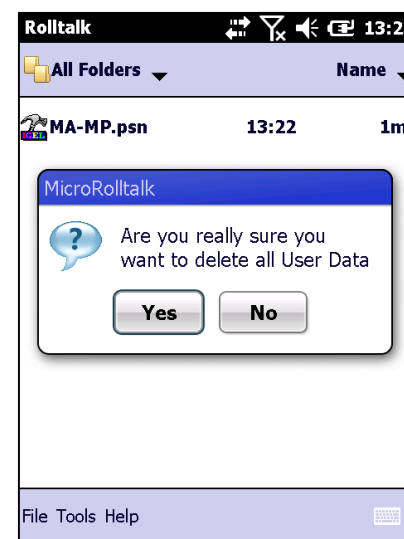



Når denne side vises, er alle brugerdata slettet. Tryk *Ok*.

Tryk *File* nederst til venstre, og vælg "Exit".

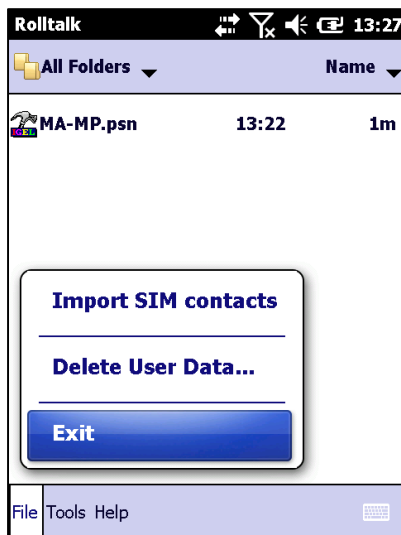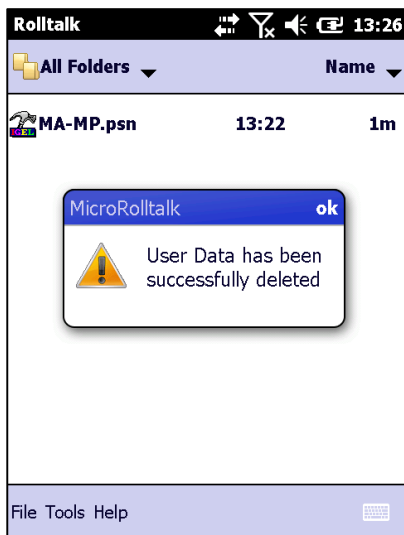

**NB!** Nu skal Memoactive sættes tilbage til fabriksindstillinger. Se kapitel 14.2, punkt 4.

## 17 Fejlsøgning

Fejlbeskrivelse	Løsning
Maskinen er slået fra eller kan ikke startes.	Sæt opladeren i, hvis Memoactive kører på batteri
Memoplanner-programmet er låst eller afsluttet.	Kør genstart, se kapitel 14.1.  Hvis det ikke hjælper, køres tilbagesetting til fabriksindstillinger, se kapitel 14.2.
Intet af ovenstående hjælper	Kontakt Abilia, tlf 70 22 98 08

## 18 Rengøring

Memoactive kan rengøres med en klud *let fugtet* i sæbevand, men må ikke nedsænkes i væske. Slå opladeren fra under rengøring.

## 19 Tekniske data

<b>Processor:</b>	PXA320 806MHz
<b>Ram:</b>	256 MB
<b>Rom:</b>	512 MB
<b>Styresystem:</b>	Windows Mobile® 6.5 Professionel
<b>Batteri:</b>	3,7 V 3200 mAh. Li-ion
<b>Skærm:</b>	3,5 tommer TFT-LCD flat touch-sensitiv skærm, 480 x 640 VGA opløsning
<b>Udvendige mål:</b>	72 x 130,5 x 17 mm
<b>Vægt:</b>	226 g

## 20 Sikkerhed og ansvar

Abilia AS har udarbejdet en risikoanalyse for produktet i henhold til NS-EN 14971 for medicinsk udstyr. Produktets brugervejledning og tekniske specifikationer er udarbejdet med tanke på de sikkerhedsvurderinger, der er angivet i dette dokument.

Ved ibrugtagning og daglig brug af produktet er det altid vigtigt, at tænke på sikkerheden. I en brugervejledning er det ikke muligt at beskrive alle de måder, hvorpå man ikke må bruge produktet. Hvis du er i tvivl, om du har indstillet eller taget produktet i brug korrekt, anbefaler vi, at du kontakter din leverandør.

Vær specielt opmærksom på, at selv om Memoplanner giver besked om, at udføre handlinger, er det ikke nogen garanti for, at de pågældende handlinger rent faktisk bliver udført. Memoplanner må derfor ikke anvendes, som den eneste kanal til formidling af beskeder, fordi det kan medføre skader, hvis en given handling ikke bliver udført, eller bliver udført flere gange (hvis det drejer sig om en besked med gentagelse). Vær i denne sammenhæng specielt forsigtig med beskeder, der vedrører indtagelse af medicin.

Abilia AS påtager sig ikke noget ansvar for evt. skader, følgeskader eller tab som følge af brug, forkert brug, manglende opfølgning, forkerte indstillinger, forkert opkobling eller lignende. Abilia AS' økonomiske ansvar er i alle tilfælde begrænset til værdien af selve produktet.

**NB! Hvis strømforsyningen bliver skadet, så må den ikke længere bruges. Tag kontakt med Abilia for at få fat i en ny.**

## 21 Miljø

Den udvendige emballage genbruges som papiraffald.

Den indvendige emballage genbruges som plastaffald.

Produktet skal genbruges som elektronikaffald ved bortskaffelse. Det kan indleveres i alle forretninger, der sælger elektronikprodukter, hos leverandøren eller på kommunale genbrugsstationer.



Abilia ApS, Krakasvej 7c, st, 3400 Hillerød, Denmark

Telefon +45 70 22 98 08 | Fax +45 48 24 98 08 | [info@abilia.dk](mailto:info@abilia.dk) | [www.abilia.dk](http://www.abilia.dk)