



Lejring med Soft-Lift puder.

Anvend to puder på én gang placeret direkte under kroppen eller under topmadrassen. 🕒➡️🕒➡️🕒➡️🕒➡️... Flyt med uret.

Anvendes med GUL side op, fordi det er den bløde side. Den rosa side er også formbar og trykfordelende. Det vil også fungerer, men for den umiddelbare følelse af at det er behageligt – også mod ømme punkter af kroppen, så er det GUL side op.

I rygleje placeres to puder under henholdsvis skulder og hoft skiftevis på enten højre side eller venstre side. I sideleje placeres én Soft-Lift pude ind under abdomen/maven på personen og skiftevis ud.

Kan anvendes uden betræk eller med **Soft-Cell hvidt betræk nr. 104TEN.2515, HMI-nr. 88669**