

Amigo Travelmate

Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende.

- I hjemmet eller på arbejdspladsen
- Medtages på udflugter og rejser
- Godkendt til flytransport
- Også udendørs på jævnt og fast terræn
- Lille venderadius
- Manøvredygtig på små arealer
- Lille totalvægt
- Let at folde sammen
- Håndtag, så man kan trække el-scooteren efter sig



Tekniske specifikationer:

Længde/bredde:	102,8 cm/56,8 cm
Højde styr (opret position):	96,5 cm
Længde lagt ned:	107 cm
Højde lagt ned:	39 cm
Totalvægt med batterier:	29 kg
Totalvægt uden batterier:	24 kg
Batterier (forseglede, syrefri):	2 x 7 Ah gel
Forhjul (massiv gummi):	8" (22x5 cm)
Baghjul (massiv skum):	9" (23x7 cm)
Hastighed:	max. 5,6 km/t
Kørestrækning (teoretisk):	op til 8 km
Lastevægt:	Max. 113 kg
Sæde:	Sort vinyl, ryg kan klappes ned

Farvemuligheder: **Blå** el. **grøn**

Varenr. **100703**, **100826**

HMI nr. 77335



AMIGO TRAVELMATE III, BRUGSANVISNING


Inden du kører ud på din AMIGO TRAVELMATE III - venligst læs denne vejledning nøje igennem.

GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER:

- Sluk altid din AMIGO TRAVELMATE III inden af- og påstigning
- Sid altid ned, når du kører på AMIGO TRAVELMATE III
- Hold benene på fodpladen når du kører på AMIGO TRAVELMATE III
- Lad AMIGO TRAVELMATE III bremse helt op, inden du bakker
- Kør efter forholdene og kør stille og roligt, når du færdes mellem fodgængere
- Kør i lav fart, når du drejer
- Kør altid vinkelret på op-/nedkørsler
- Kør altid i lav fart, når op-/nedkørsler forceres. Læn dig evt. lidt frem for bedre stabilitet
- Kør aldrig baglæns på op-/nedkørsler eller ramper
- Undgå pludselig opstart, når styret er drejet skarpt
- Sluk aldrig for tændingsnøglen, når AMIGO TRAVELMATE III er i fart, dette vil medføre et brat stop
- AMIGO TRAVELMATE III er kun til transport af en person (ligesom en cykel)
- Man må under ingen omstændigheder sidde i sædet på AMIGO TRAVELMATE III, hvis den står i en kørende bil
- Man må under ingen omstændigheder sidde i sædet på AMIGO TRAVELMATE III, mens den liftes op i en bil/ned fra en bil
- Kør ikke tæt på trapper, trin, kanter på terrasser o.lign, hvor du ved et uheld kan få et hjul ud over kanten
- AMIGO TRAVELMATE III har en max. hastighed på 5,6 km/t, hvilket betyder, at man skal færdes i trafikken på el-scooteren, som om man er fodgænger.



STYRET:

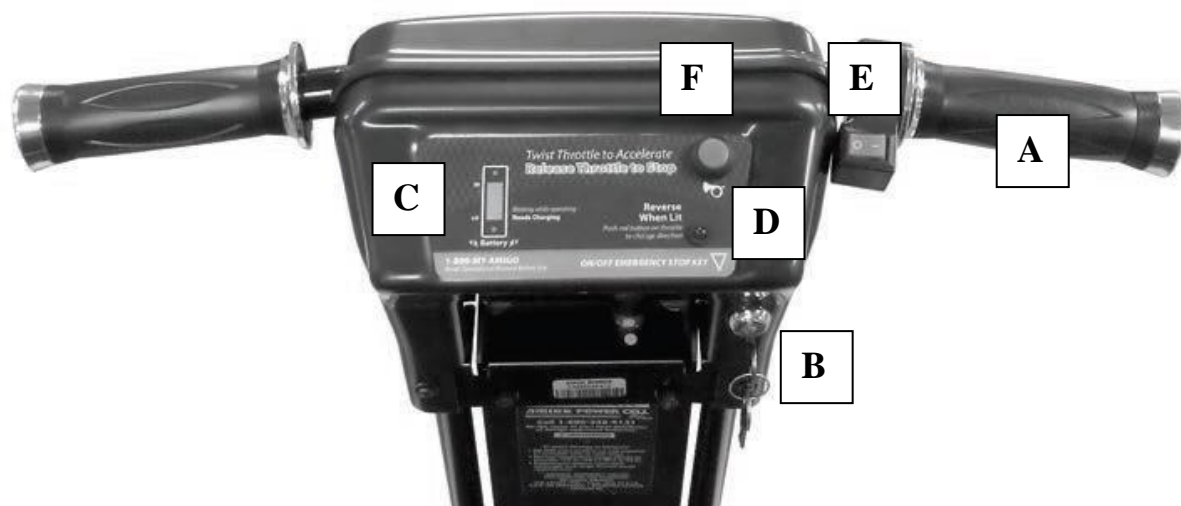

- A. Gashåndtag
- B. Tændingslås
- C. Batteriindikator
- D. Indikatorlys for baglæns kørsel
- E. Forlæns/baglæns kontakt
- F. Horn

IDENTIFIKATION AF DE ENKELTE DELE PÅ AMIGO TRAVELMATE III



1. Batteripakke
2. Styr
3. Fælg motor
4. Baghjul
5. Fodplade
6. Sæde
7. Håndtag til afbrydning/tilslutning af batteri strømforsyning
8. Håndtag til justering af sæde
9. Friløbs split
10. Fodpedal til frigørelse af styr
11. Kofanger, træk- og løftehåndtag

SAMMENKLAPNING OG OPKLAPNING AF AMIGO TRAVELMATE III

SAMMENKLAPNING:

Vigtigt! Tag nøglen ud af tændingslåsen, før du klapper din AMIGO TRAVELMATE III sammen.


1. Tag kurven af.
2. Tag batteriforbindelsen fra ved at bruge det sorte håndtag til batteri strømforsyningen. Tag et fast greb om håndtaget og løft lige op for at afbryde batteriforbindelsen (se figur 1). Venligst bemærk, at et greb udelukkende i enden af håndtaget ikke vil afbryde batteriforbindelsen.
3. Tag batteripakken ud og væk fra velcro bagsiden.
4. Hold fast i toppen af styret, og træng på fodpedalen til frigørelse af styret (se figur 2). Sænk styret ca. 5 cm, fold derefter sæderyggen ned.
5. Løft håndtaget til justering af sædet og læg sædet ned mod bundpladen (se figur 3). Læg styret ned, så det støtter mod sædet.
6. For at låse styret, læg elastikbåndet over den sorte knop placeret på toppen af styret (se figur 4).




Figur 1



Figur 2

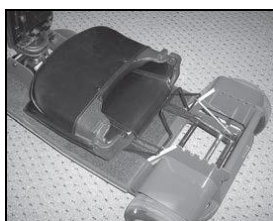

Figur 3

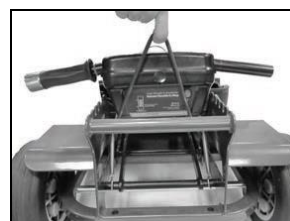

Figur 4

OPKLAPNING:

1. Tag elastikbåndet væk fra den sorte knop.
2. Løft styret indtil du hører den nedre lås falde på plads.
3. Rejs sædet op ved brug af sæde knappen eller ved at løfte håndtaget til justering af sædet (se figur 5).
4. Sæt batteripakken på plads, sæt strømtilslutningen til, sæt kurven på. Sæt nøglen i tændingslåsen.




Figur 5

BETJENING AF AMIGO TRAVELMATE III

For betjening af din AMIGO TRAVELMATE III, brug følgende procedure:

1. Tænd AMIGO'en med nøglen i tændingslåsen, der er placeret på højre side af styret.
2. Betjening af gashåndtag:
 - a. For forlæns kørsel:
Rød retningsvisende kontrol knap ved højre håndtag skal stå i position 0.
 - b. Drej gashåndtaget ind mod dig selv for at accelerere.
Hold den ønskede hastighed.
 - c. Når gashåndtaget slippes, stopper el-scooteren.
 - d. For baglæns kørsel:
Rød retningsvisende kontrol knap ved højre håndtag skal stå i position –

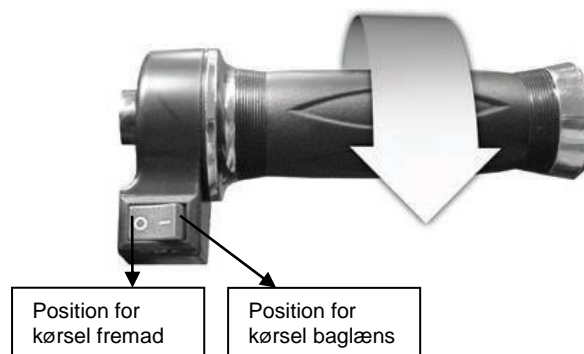

3. Hvis der er behov for at skubbe AMIGO'en manuelt, brug en finger til at skubbe enden af splitten for friløb nedad, så den står i lodret position (se figur 6). For at vende tilbage til kørsel på el-scooteren, skub splitten for friløb tilbage til vandret position. Før kørsel, check at styret er låst i opretstående position.



Figur 6

Sid ikke på AMIGO'en, når den står i friløb!

SKUB FOR HURTIGT (SFH) FUNKTION:

Når AMIGO'en står i friløb har den en SFH-funktion af sikkerhedsmæssige grunde, d.v.s. at el-scooteren kun kan skubbes ca. ½ meter. Når man rammer den forprogrammerede hastighed, vil AMIGO'en gå i sikkerheds-position og bestemme, hvor hurtigt og hvor nemt el-scooteren kan skubbes. Der vil være en periode på 10-15 sekunder inden AMIGO'en igen kan skubbes ca. ½ meter og cyklusen vil gentage sig. Hvis der er behov for at skubbe AMIGO'en over en længere distance, afmontér batteriforbindelsen, fjern batteripakken og vent 30 sekunder for at komme ud over SFH-funktionen.

KØRSEL PÅ AMIGO TRAVELMATE III:

Når du stiger på el-scooteren, så sørg for at det er på et jævnt underlag og sæt dig godt til rette inden kørsel.

Sørg for, at AMIGO TRAVELMATE III er fuldt opladet, inden du skal ud at køre.

Sørg altid for, at laderens stik er taget ud af batteripakkens strømforsyning, inden du kører på AMIGO TRAVELMATE III el-scooteren.

Drej nøglen i tændingslåsen, så el-scooteren tændes.

Check at den røde retningsvisende kontrol knap står i 0 position for fremad kørsel. Drej gashåndtaget bagud ind mod dig selv. Jo mere du drejer på håndtaget, jo stærkere kører el-scooteren. For at sagtne farten, drej gashåndtaget fremad væk fra dig selv. Slippes håndtaget, stopper el-scooteren.

For baglæns kørsel, sæt den røde retningsvisende kontrol knap på position -- . Drej gashåndtaget bagud ind mod dig selv. Jo mere du drejer på håndtaget, jo stærkere kører el-scooteren. For at sagtne farten, drej gashåndtaget fremad væk fra dig selv. Slippes håndtaget, stopper el-scooteren.

SIKKER KØRSEL:

Ved kørsel op/ned (kantsten o.l.) Altid lige op - og altid begge baghjul op/ned samtidig. Skæv vinkel kan medføre tipning!

Undgå tipning - skift ikke pludselig retning ved kørsel i fuld fart - eller på rampe/bakke. Kør aldrig baglæns ud over kantsten o.l.

BATTERIER – OPLADNING:

Sørg altid for, at AMIGO TRAVELMATE III er fuldt opladet, inden du kører ud.

Opladning foregår ved hjælp af medfølgende oplader, der tilsluttes i ladestikket øverst på batteripakken (forbindelses stikket tages forinden ud af batteripakken på el-scooteren). Tilslut laderens andet stik i stikkontakten i væggen (stikkontakten tændes).

Opladeren er fuldautomatisk og slår selv fra, når batterierne er fuldt opladet. Batterierne kan ikke overoplades.

Det anbefales at AMIGO TRAVELMATE III sættes til opladning hver dag/aften, når el-scooteren har været i brug, så er den klar til kørsel igen næste morgen.

Batterierne kan, hvis det ønskes, oplades hver gang AMIGO'en ikke bliver brugt.

Hvis el-scooteren henstår ubrugt over længere tid, bør den oplades i mindst 24 timer, hver 30. dag – dette for at "holde liv" i batterierne.

Bemærk: Der er hos nogle el-scooter brugere en udbredt misforståelse af, at batterierne skal køres helt tomme for strøm, før de oplades – det er IKKE godt for batterierne at blive kørt tør for strøm, og det kan medføre dybdeafledning og skade på batterierne.

Når du kører, vil AMIGO TRAVELMATE III bruge strømmen på batterierne, dette vises i displayet på el-scooteren ved at de 5 røde lamper slukker en efter en. Når der er 2 røde lamper tilbage i displayet bør man tænke på, at det er ved at være tid til opladning. Hvis den sidste røde lampe på displayet blinker vedvarende, så SKAL el-scooteren hurtigst muligt sættes til opladning.

Når du er færdig med at lade AMIGO TRAVELMATE III op, så sæt el-scooterens stik til strømforbindelse tilbage i batteripakken. Batteripakken kan falde ud af styret, hvis strømforbindelsen ikke er tilsluttet.

Hvis laderen slukkes i stikkontakten SKAL ladestikket tages ud af scooteren.

Sørg altid for, at laderens stik er taget ud af batteripakkens strømforsyning, inden du kører på AMIGO TRAVELMATE III el-scooteren.

Batterierne på AMIGO TRAVELMATE III er lukkede og kræver ingen vedligeholdelse.

Batterierne er godkendt til transport i fly.

Skulle du være uheldig f.eks. at tabe batteripakken, så check at der ikke er revner eller lign. på batterierne, og check, at de ikke lækker. Man må IKKE røre direkte ved lækkende batterier.

Vedligeholdelse.

AMIGO TRAVELMATE III er praktisk taget vedligeholdelsesfri.

- Vi anbefaler regelmæssig aftørring af AMIGO TRAVELMATE III med en hårdt opvredet klud. AMIGO TRAVELMATE III må ikke udsættes for rengøringsmidler fra sprayflasker, da dette kan påvirke det elektriske system.
- AMIGO TRAVELMATE III må ikke spules med en vandslange eller damprenses, da dette kan påvirke det elektriske system.

Praktiske råd.

AMIGO TRAVELMATE III er meget driftssikker. Skulle noget servicebehov opstå - venligst kontakt din kommune hvis AMIGO TRAVELMATE III er bevilget herfra.

Har du købt selv - kan du kontakte **BEK/DMV** direkte.