

MONTERINGS- / BRUGS VEJLEDNING

SITBACK-BECHTEREW NAKKEPUDE

Trin 1: Monterer clips om nakkestøtteholder, for at undgå at puden drejer om nakkestøtten.



Trin 2: Træk båndet rundt omkring nakkestøtten og fastgør velcro stropperne på båndet.



Trin 3: Monterer bagpuden med buen ind mod nakkestøtten ved hjælp af velcro stropperne. Bagpudens hældning og højde på nakkestøtten kan justeres



Trin 4: Monter nu frontpuden



Trin 5: Montering af afstands pude - løs velcro stropper på frontpuden og træk denne af. Sæt nu den eller de afstandspuder på som der er behov for og monter frontpuden igen.



Generelle oplysninger:

Stof består af 65% polyester og 35% bomuld.

Betrækket på frontpuden kan tages af og vaskes ved 30 grader. Bagpuder og mellem-puder kan også vaskes ved 30 grader. Må ikke centrifugeres eller komme i tørretumbler!