

# quick<sup>2</sup>go<sup>®</sup> Alurampen

## Betjeningsvejledning



## quick2go® Alurampen



Vores ramper er afprøvet hos



Statisk testet!



Mange tak fordi De valgte vores produkt! Venligst gennemlæs betjeningsvejledningen nøje inden De tager Ramperne quick2go i brug første gang. Tjek også produktet for evt. transportskader.

### Område/formål:

**quick2go®** er aluramper af høj kvalitet, til forcering af forhindringer, såsom trapper og trin. Ramperne er anvendelige for manuelle og el-kørestole, samt plænetraktorer og quads. Den specielle hulprofil på kørefladen giver dækkene et sikkert greb, og profilens udformning gør sideværts udskridning umulig.

### Tekniske data:

Materiale:	Anodiseret aluminium	
Design:	Ét stykke, ikke teleskoperbar,	RAMPE-T1
	Todelt teleskoperbar,	RAMPE-T2
	Tredelt teleskoperbar,	RAMPE-T3
	Kompakt tredelt teleskoperbar,	RAMPE-T2/3
Sælges parvis:	1 par	



quick2go®	Vægt pr. stk. (kg)	Vægt parvis (kg)	Belastning pr. stk. (kg)	Belastning parvis (kg)	Min. Længde (cm)	Max. Længde (cm)	Max. Højde (cm)*	Sporvidde (cm)	Højde på sideprofilen (cm)
Rampe-T1	3,4	6,8	150	300	110	110	20	21	5
Rampe-T2	6,5	13,0	150	300	110	200	40	19,5	5
Rampe-T3	9,3	18,6	130	260	110	285	60	18	5
Rampe-T2/3	6,8	13,6	130	260	87	200	40	18	5

\*Bemærk: Den angivne max. Højdeforskel gælder kun for el-kørestole. For manuelle kørestole se: Maximalt tilladt niveau forskel (Side 22).


### Sikkerhedsanvisning:





- Denne betjeningsvejledning skal læses før ibrugtagning og efterfølgende overholdes. De generelle oplysninger i tabellen skal overholdes. Bruges ramperne til at komme op i et køretøj som fx en trailer, skal dette sikres.
- Et stabilt og fast underlag skal sikres, så anlægsfladerne understøttes helt.
- Der skal bruges en jævn hastighed ved forcering af ramperne. Kraftig acceleration eller bremsen skal undgås.
- Ved parvis brug, skal ramperne ligge parallelt med hinanden, og en ensartet belastning skal overholdes.
- Benyt kun rampen med stor forsigtighed når der er sne, frost eller vådt (*se "egnede underlag"*).

## Anvendelse:

### Ibrugtagning:

- Fjern venligst transporten låsen på den bærende flade før den første brug.
- Hold rampen i håndtaget i vandret position. For at låse rampens teleskop mekanisme op, drejes sikringsstiften og trækkes ud ( **1** )
- Hold rampen så den bevægelige del peger væk fra kroppen, og i vandret position. Træk i rampen til den ønskede længde er opnået
  - > Uden sikringsstiften i låst position kan profilerne bevæge sig frit!
  -  -> Tag aldrig sikringsstiften ud mens rampens bevægelige del peger nedad!
- Det anbefales at trække ramperne ud til max. længde ved brug
- De bøjede ender med gummibelægning lægges på et fast underlag, så de understøttes helt ( **2** + **3** )

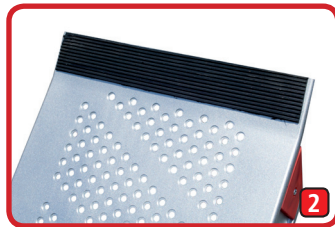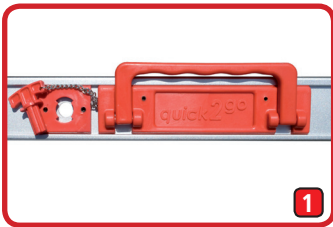


### Egnede underlag:

- Bruges ramperne til at komme op i et køretøj som fx en trailer, skal dette sikres
  - > De gummi belagte anlægsflader skal ligge helt an på et fast underlag, og ramperne må ikke kunne vippe
  - > Et stabilt og fast underlag skal sikres
- Ramperne skal have skridsikker kontakt til fast underlag ( **5** )
- Ved parvis brug skal ramperne ligge parallelt ved siden af hinanden i overensstemmelse med bredden af køretøjet ( **3** )
- Max niveau forskel i cm må ikke overskrides! ( *se tabel* )
- Hvis ramperne benyttes til forcering med manuel kørestol, er max forholdet mellem højden og længden 1:7 ( *se side 22* )

### Sammen pakning af ramperne:

- Er ramperne snavsede rengøres disse ( *se "rengøring"* )
- Fjern rampen fra underlaget og skub den forsigtigt sammen
- Isæt sikringsstiften og drej den for at låse ( **4** )

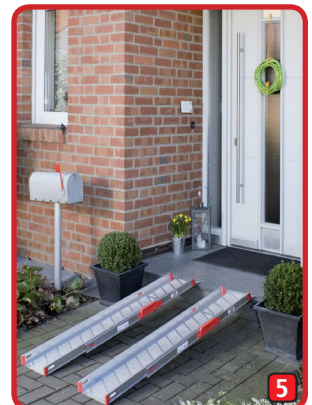

## Maximalt tilladt niveau forskel:

a) for el kørestole eller når en manuel kørestol skubbes af en ledsager:


Max. rampelængde

RAMPE-T1: 110


RAMPE-T2: 200

Rampe T3: 285

RAMPE-T2/3: 200

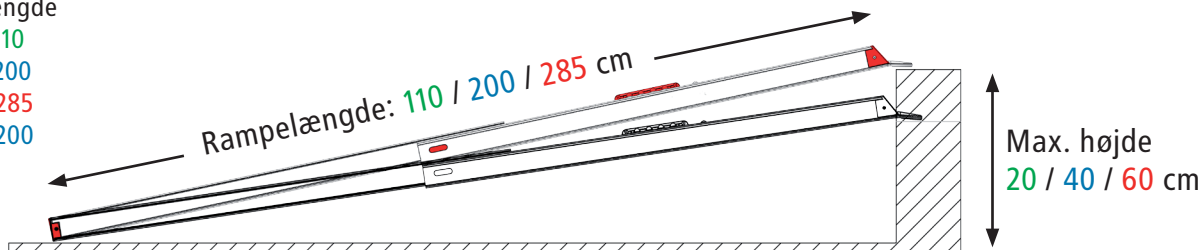

b) for manuel kørestol der drives af brugeren gælder forholdet 1:7

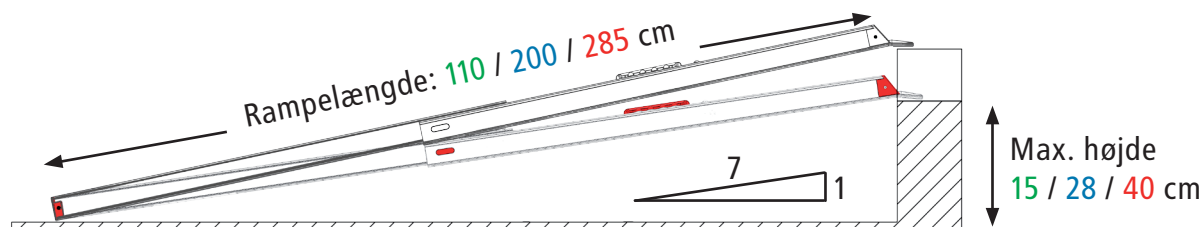

## Rengøring:

**quick2go®** aluramperne rengøres med en fugtig klud eller svamp.

Der må ikke anvendes kemikalier.

## Levetid og vedligeholdelse:

Ramperne **quick2go®** er vedligeholdelses frie. Ved forkert brug kan plastdelene beskadiges og aluminiumprofilen deformeres. Før hver ibrugtagning skal plastdelene (glider og endekapper) tjekkes for skader. Konstateres deformation af aluminiumsprofilen eller er der skader på plastdelene må ramperne ikke tages i brug! Beskadigede plastdel kan købes og udskiftes af deres faghandler. Anvend ikke smøre eller glide midler.

## CE mærkning:

Produktet er godkendt som tilbehør til medicinske produkter i klasse 1, i henhold til loven om medicinske produkter og EU retningslinjerne 93/42/EWG. Produktet overholder dermed de europæiske sikkerhedsforskrifter. Se evt. på [www.rolko.com](http://www.rolko.com) under download.

Betjeningsvejledning **quick2go®** / Pr.: 2012-08 / © Rolko Kohlgrüber GmbH

Kopiering og genoptryk kun med forudgående tilladelse af Rolko. Alle rettigheder forbeholdt.  
Ændringer på grund af tekniske videreudviklinger forbeholdt. Alle tekniske data og oplysninger underligger konstruktions- og produktionsbetingede tolerancer. Fejl undtaget.



**Rolko Scandinavia ApS**

Suensonsvej 2

DK-8600 Silkeborg

Tel.: +45-87 20 18 88

Fax: +45-86 81 86 88

E-mail: [rolkodk@rolko.com](mailto:rolkodk@rolko.com)

08.2012