

Brugsanvisning Järven vandpude



- 1) Påfyld 3-3½ ltr. tempereret vand
Mindre vand ved større personvægt
- 2) Lad puden "hvile" i ca. 10 minutter
- 3) Anbring forhøjning under det hjørne, hvor påfyldningshullet er, så det hæves i niveau i forhold til resten af puden
- 4) Luften presses ud ved eksempelvis pres-/rulning af puden fra det modsatte hjørne
Når vandet kan ses i påfyldningshullet skrues proppen i

Rengøring:

Rengøres med milde rengøringsmidler - ved desinficering anvendes alkohol med tensider f.eks. Dax 70+ - Dax Desisoft eller Liv 45+ overfladedesinfektion m.v.

Brugervægt 120 kg.