

# MADE IN EUROPE



Vores produkter og råvarer er produceret i Europa.

Vælg kvalitet, spar penge og skån miljøet.

# (DK) Brugervejledning

46\_20250114\_DK

## Master Slide CT



Varenr.	HMI nr.	Navn:	UDI-DI/GTIN	Størrelse:	Produktindhold:
● MC 002-1385	80961	Master Slide CT	5744001972021	L 120 x B 40 cm	55% Polyester, 41% Polyamid, 5 % Silikone



1. Placer Master Slide CT på CT-lejet.



2. Lad åbningen være ud til siden, for at sikre, at patienten kan glide op/ned på lejet.



3. Hvis patienten har brug for støtte til skubbe sig op ad, kan hjælper støtte fødderne på anklerner.

The Original Nordic  
Human Handling Concept



Developed &  
Manufactured by:



master-care.dk

# Brugervejledning - Master Slide CT

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet / produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde.

Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S. Ved tvivl kontakt master care A/S.

## MDR (EU) 2017/745:

Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

## Erklærede formål for produktet:

Polstret gliderør som nedsætter friktion under brugere med nedsat fysisk funktion ved vending og forflytning i seng.

## Kontraindikationer:

Produktet har ikke en "stopfunktion" og der kan derfor være risiko for, at bruger kan glide udover madrassens kant. Brugeren skal derfor have kognitiv formåen til at forstå og reagere i overensstemmelse hermed for at undgå fald - se "Advarsel".

## Advarsel:

Dette produkt har ikke en anti-skrid/stop-funktion. Det er derfor vigtigt, at brugeren ikke vender sig på kanten af madrassen og har forståelse for risikoen for at falde på gulvet. Det er ligeledes vigtigt, at brugeren har tilstrækkelig siddende funktion og understøttelse af fødderne for at hindre, at bruger glider på gulvet.

## Risikovurdering:

Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for den aktuelle bruger således, at forflytningen foregår ergonomisk og lovmæssigt forsvarligt.

## Kendskab til produktet/forflytning:

Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og på vores hjemmeside kan findes vejledninger i brug på langt de fleste produkter.

## Levetid:

Produktet forventes at have en levetid på 1-3 år ved normal slitage og vask. Produktets levetid afhænger af brug, belastning samt hvordan og hvor ofte produktet vaskes og tørres.

Produkter bør efterses jævnligt. Produkter, der ikke længere yder tilstrækkelig friktionsnedsættelse til en sundhedsmæssigt, forsvarlig forflytning for både hjælper og bruger, bør kasseres. Hvis produktet har defekte syninger eller brudte overflader, bør produktet kasseres.

## Garanti:

master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

## Utilsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:

Utilsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produktskader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål /brug.

## ADVARSLER



Efterlad aldrig bruger på produktet på sengekanten.



Efterlad aldrig produktet liggende på gulvet.



Sørg for, at alle relevante bremses er låst, inden forflytning foretages.



### CE-mærkning:

Produkterne er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.



### ISO klassificering:

ISO 12952-1:2015  
Tekstiler - Vurdering af sengeudstyrsantændelighed - Del 1: glødende cigaret.

For mere information, videoer  
Quick Guide mm.,  
se [www.master-care.dk](http://www.master-care.dk)



### Brugervægt:

Anbefalet max. brugervægt: 180 kg.



### Vask:

Dette produkt kan vaskes i vaskemaskine ved max. 85 °C.  
Lavere vaskegrader vil forlænge levetiden væsentligt.



### Vaskemidlets pH værdi:

pH værdi for vaskemiddel / desinfektionsmiddel mellem pH 5 - 9.



### Skyllemiddel:

Der må ikke anvendes skyllemiddel, da dette forringer glideegenskaberne væsentligt.



**Tørretumbling:** Dette produkt må kun tørretumbles skånsomt og ved max. 40 °C.  
Lufttørring forlænger levetiden væsentligt.



### Overfladisk rengøring:

Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.



### Strygning:

Tåler ikke strygning



### Kemisk rengøring:

Tåler ikke rengøring.



### Blegning:

Tåler ikke blegning.



### Eftersyn:

Produktet skal kontrolleres jævnlig og gerne inden hver brug. Kontroller, at der ikke er skader på stof, stropper, sømme mm. Har produktet høj friktion eller på anden vis er i stykker, skal produktet kasseres.



### Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.



### Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.

