

**Bruger vejledning,
bør læses**

Videomatic VEO

DK



Konformitätserklärung

Declaration of conformity

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
We declare under our sole responsibility that the product

Videomatic VEO

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen oder
normativen Dokumenten übereinstimmt.
to which this declaration relates is in conformity with the following directives.

Es entspricht damit den Bestimmungen der folgenden Richtlinie:
It corresponds to the rules of the following directives:

Richtlinie 93/42/EWG
des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte
Klasse I nach Anhang VII

Council directive 93/42/EEC
of 14th June 1993 concerning medical devices
Class I / Annexe VII

Die CE- Kennzeichnung auf dem Gerät dokumentiert diese Übereinstimmung.
The CE mark on the system points out this accordance.

Alsbach-Hähnlein,

03.06.2013

.....
Ort und Datum der Ausstellung
Place and date of issue

M. Reinecker Geschäftsführer
M. Reinecker General Manager


.....
Name und Unterschrift des Befugten

Name and signature of the authorized person

Indhold

Produkt beskrivelse	5
Formål	5
Produkt levetid.	5
Sikkerheds anbefalinger	5
Opsætning af dit Videomatic VEO	6
Nettilslutning	6
Justering af monitor.	7
Ergonomisk anbefaling	8
Placering af fjernbetjeningsenheden.	8
Beskrivelse af 3-knap fjernbetjening	9
Tænd og sluk af enheden	11
Beskrivelse af 1-knap fjernbetjeningsenhed	12
Automatisk sluk	13
Manuel sluk	13
Belysning TÆND/DÆMP/SLUK	14
Menu valg	14
Gå ud af menuen	14
Gå ud af menu funktionen.	14
Noter	15

Betjeningsvejledning!

Produkt beskrivelse

Dette enestående elektroniske læse apparat forstørrer det trykte materiale som placeres under kameraet, og viser det på monitor skærmen. Tekst, billeder eller objekter kan let bevæges under kameraet ved læsning, ved hjælp af xy-bordet. Skærm formatet kan ændres så det passer til dit specielle behov.

Billedfrekvensen er 60Hz med fuld-HD opløsning (1920 x 1080p) som sikrer et klart billed selv ved læsning med stor hastighed.

Formål

Dette læse system er konstrueret til at hjælpe mennesker med problemer så som macular degeneration, men også andre synshandicap.

Produkt levetid

Dette apparat har en estimeret levetid på syv år fra produktionsdato, forudsat at de anbefalede vedligeholdelses foranstaltninger gennemføres.

Sikkerheds anbefalinger

Dette udstyr er udviklet til brug i normale indørs omgivelser, og det skal beskyttes mod uforholdsmæssige høje og lave temperaturer samt fugt. Bloker ikke ventilationsåbninger.

!Note!: Vær sikker på at væsker ikke trænger ind i apparatet.

Opsætning af dit Videomatic VEO

Dit Videomatic system udpakkes og sættes op af leverandørens repræsentant. Hvis du ikke har købt en Videomatic holder som passer til produktet, kræves en stabil overflade af passende størrelse.


!Note!: Flyt IKKE dit CCTV ved at holde i xy bordet.

Nettilslutning

Dit Videomatic kamera system skal forsynes fra en stikkontakt ved hjælp af den medfølgende netledning.

Når først enheden er tilsluttet er den klar til brug.


!Note!: Den medleverede netledning må kun bruges i forbindelse med Videomatic VEO.

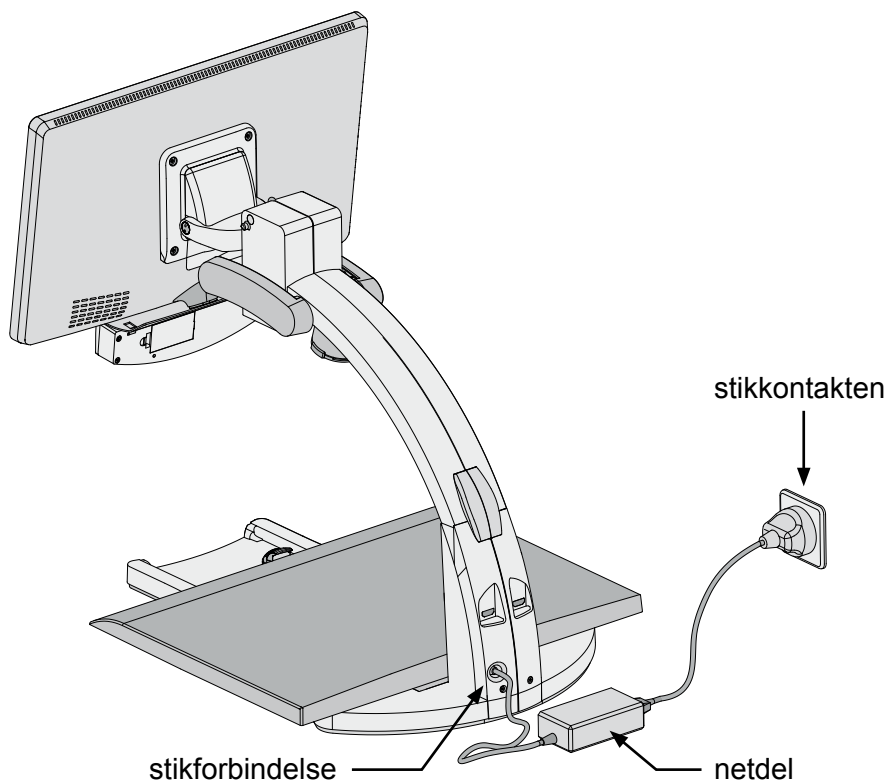


Justering af monitor

Monitor teknologien betyder at kontrast og lys ændrer sig afhængig af synsvinkel.


Den yderst fleksible 4-dimensionelle monitor arm muliggør at brugeren kan justere monitor højde og vinkel tilpasset der siddende position (se herunder).

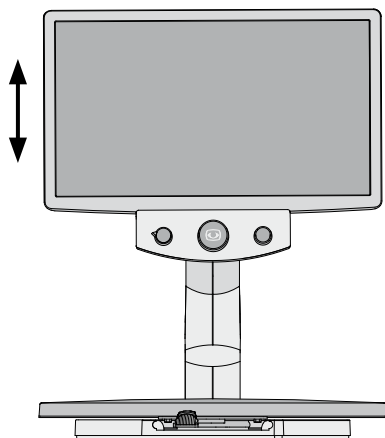


- Monitor kan bevæges vertikalt op og ned.

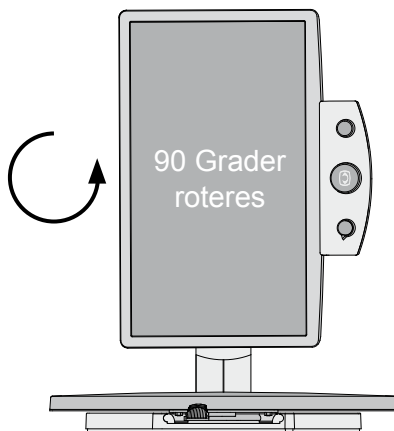

- Monitor kan roteres 90 grader mod uret for at forbedre læsning af kolonner. Billedet vil tilpasse sig automatisk til monitorens position.

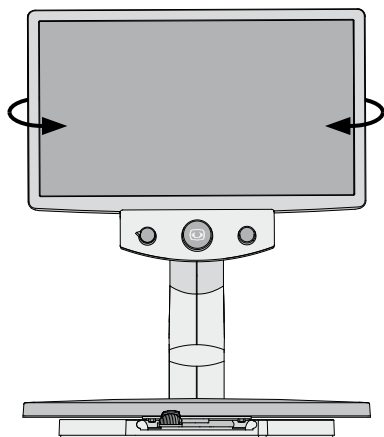

- Monitor kan roteres horison talt til venstre eller højre.

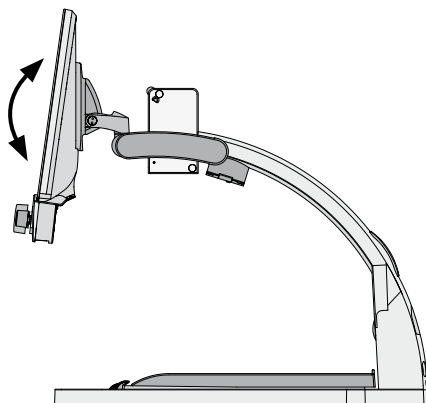


- Monitor kan vippes opad eller nedad.

Ergonomisk anbefaling

For at modvirke refleksioner i monitor skærmen, bør du ved justering af Videomatic VEO undgå at direkte lys rammer skærmen. Placer altid læseapparatets monitor skærm så den vender væk fra lyset eller parallel med lyskilden.


Placering af fjernbetjeningsenheden

Der er to options (en eller tre knapper) for fjernbetjeningsenhed til Videomatic VEO. Afhængig af fjernbetjeningen du har købt, understøttes forskellige funktioner. Fjernbetjeningsenheden kan fastgøres enten på højre side af xy-bordet eller under monitoren. Yderligere kan fjernbetjeningen holdes i hånden eller f.eks. placeres på bordet. Dermed har brugeren mulighed for at finde den bedst mulige betjening af Videomatic VEO, baseret på optimering af personlige ergonomiske behov.

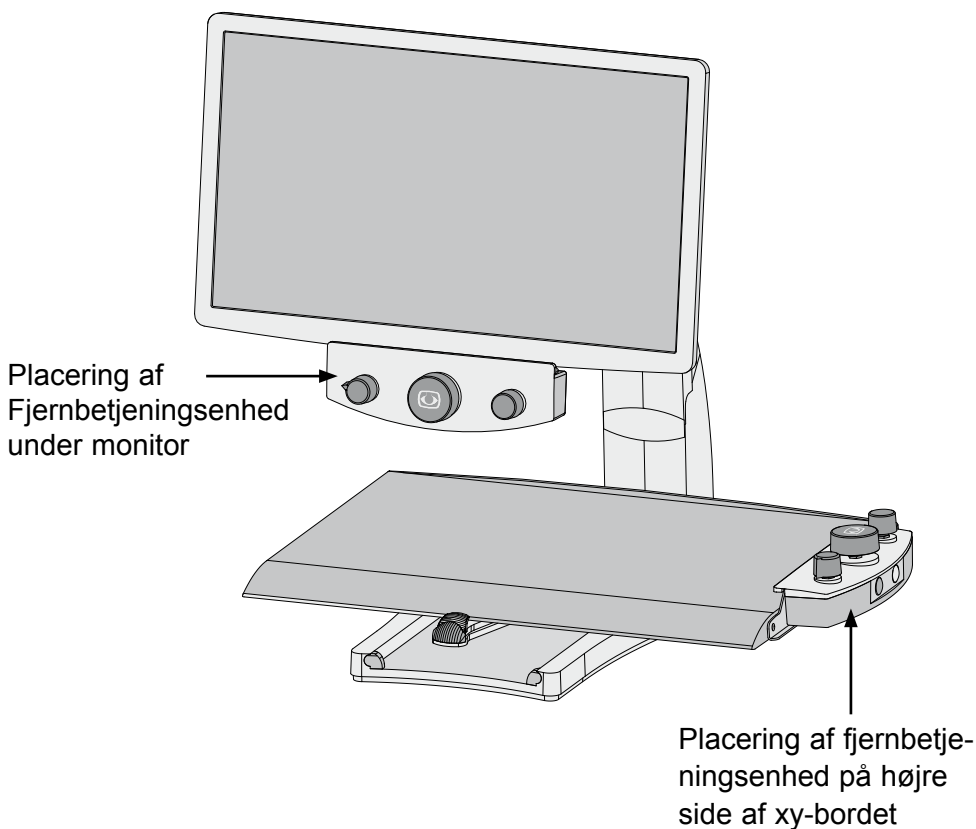


Beskrivelse af 3-knap fjernbetjening

Set forfra:

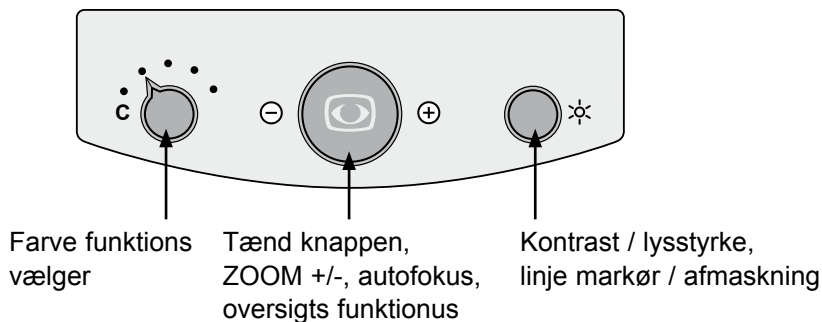

Venstre knap:

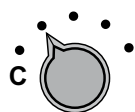

- **Farve funktions vælger**

Ved drejning af farve funktions vælger knappen fra venstre mod højre, følgende farve funktioner kan vælges:

- Position 1. Naturlige farver
- Position 2. Hvid tekst, sort baggrund
- Position 3. Sort tekst, hvid baggrund
- Position 4. Grøn tekst, sort baggrund
- Position 5. Gul tekst, sort baggrund
- Position 6. Gul tekst, blå baggrund

Den valgte farve funktion vises kortvarigt i bunden af skærmen efter aktivering.

!Note!: De ovennævnte farvekombinationer er fabriksindstillingen. Ved brug af menuen kan disse farvekombinationer justeres individuelt.

Central ZOOM knap:



- **Tænd knappen**

Ved at trykke på denne tændes læseapparatet.

- **ZOOM + / -**

Ved at dreje knappen til venstre eller højre, vil forstørrelsen trinløst variabelt skifte fra minimum til maksimum.

- **Autofokus (AF)**

Ved et hurtigt tryk på den centrale ZOOM knap, kan du aktivere/deaktivere autofokus.

Når autofokus er aktiveret vil kameraet automatisk justere billedskarphe den.


- **Oversigts funktion**

Når du arbejder med et højt forstørrelses niveau og ønsker at finde hvilken del af siden du er nået til, vil denne funktion hjælpe dig til at få overblikket.

Tryk på den centrale "zoom" knap, og efter omkring 2 sekunder vil oversigts funktionen blive aktiveret. Billedet på skærmen vil blive minimeret, og du kan få et overblik over hele dokumentet, billedet eller den trykte tekst.


Et svagt kryds vil komme til syne, og vise det sted som forstørres i øjeblikket. Når den centrale knap slippes vil billedet vende tilbage til den valgte læse funktion og forstørrelse.

Højre knap:

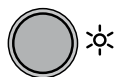

- **Kontrast / Lysstyrke**

Denne knap er forsynet med en træk-ud funktion. Med knappen inde, er den kombinerede justering af kontrast og lys aktiveret. Drejet helt til venstre er der lav kontrast og lysstyrke, og drejet helt til højre er der høj kontrast og lysstyrke.

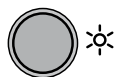

- **Linje markør / afmaskning**

Når knappen er ude aktiveres linje markering og afmaskning. Ved at dreje knappen vælges det område af skærmen som skal dækkes. Linje marker/linje afmaskning funktionen deaktiveres ved at trykke knappen ind igen.


Tænd og sluk af enheden

Videomatic VEO er forsynet med en automatisk TÆND/SLUK-funktion.

Efter at Videomatic VEO er tilsluttet stikkontakten, kan den tændes ved at trykke på den centrale "ZOOM" knap. Belysningen tændes automatisk når apparatet tændes.

!Note!: Hvis xy-bordet ikke automatisk belyses, så kontroller venligst at netkablet er sikkert forbundet. Hvis det er i orden så kontroller fjernbetjeningens belysnings indstilling, da det kan være manuelt deaktiveret (se illustration nedenfor).

Set nedefra:

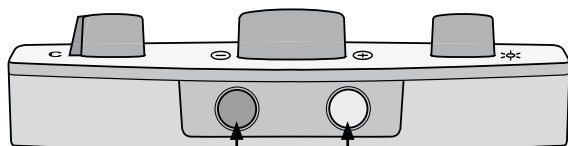


Menu valg TÆND/
SLUK

Manuel VEO-SLUK funktion,
Belysning TÆND/SLUK/
LYSDÆMPER

Beskrivelse af 1-knap fjernbetjeningsenhed

Set forfra:

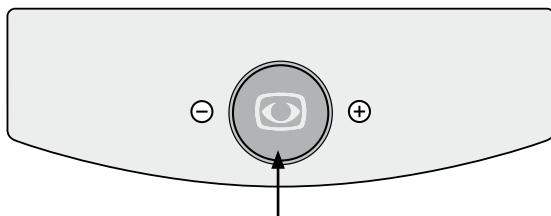

Tænd knap, ZOOM + / -,
farve valg oversigts funktion

Central knap ZOOM + / -:



- **Tænd knap**

Ved at trykke på denne knap vil læseapparatet tændes.

- **ZOOM + / -**

Ved at dreje denne knap til venstre eller højre, vil forstørrelsen skifte trinløs variabel fra minimum til maksimum.

- **Farve funktions vælger**

Ved tryk på denne knap følgende farve funktioner kan vælges:

- | | |
|-------------|---------------------------|
| Position 1. | Naturlige farver |
| Position 2. | Hvid tekst, sort baggrund |
| Position 3. | Sort tekst, hvid baggrund |
| Position 4. | Grøn tekst, sort baggrund |
| Position 5. | Gul tekst, sort baggrund |
| Position 6. | Gul tekst, blå baggrund |


Den valgte farve funktion vises kortvarigt i bunden af skærmen efter aktivering.

!Note!: De ovennævnte farvekombinationer er fabriksindstillingen. Ved brug af menuen kan disse farvekombinationer justeres individuelt.

- **Oversigts funktion**

Samme procedure som beskrevet for 3-knap fjernbetjeningen

Set nedefra:

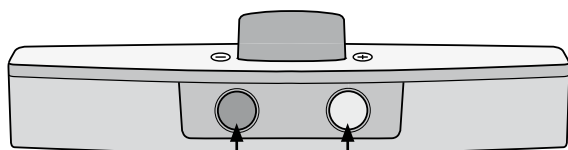

Menu valg TÆND/
SLUK


Manuel VEO-SLUK funktion,
Belysning TÆND/SLUK/
LYSDÆMPER

Automatisk sluk

Efter et forudbestemt tidsrum vil VEO automatisk slukke, hvis fjernbetjeningen har været ubenyttet i en periode.

Ved samtidigt at trykke på både sort og gul knap på undersiden af fjernbetjeningen, aktiveres funktionen som kan ændre den automatiske slukketid – kan justeres fra 60 min / 30 min / 15 min / auto OFF (skal så slukkes manuelt).

Slip knapperne når den valgte tidsindstilling vises. Tidsindstillingen vil så blive valgt og gemt

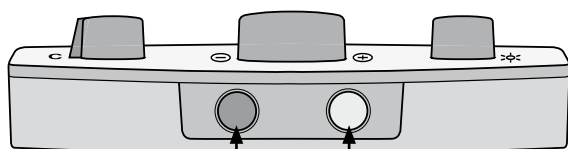

Sort knap

Gul knap

Tidsindstillings muligheder:

- automatisk sluk deaktiveret
- automatisk sluk efter 15 min.
- automatisk sluk efter 30 min.
- automatisk sluk efter 60 min.

!Note!: Når VEO først er slukket, effektforbruget er mindre end 0,5 Watt.

Manuel sluk

Hold den gule knap inde 5 sekunder indtil enheden slukker.

Belysning TÆND/DÆMP/SLUK

Ved at trykke på den gule knap på undersiden af fjernbetjeningen, kan belysningen:

- tændes
- dæmpes
- slukkes

Når VEO slukkes vil indstillingen af belysningen gemmes.

Menu valg

Hold den sorte knap under fjernbetjeningen inde i cirka 3 sekunder indtil hovedmenuen ses på skærmen.

Hovedmenu	
Lysstyrke	+26
Kontrast	+50
Farvemætning	-15
Understregning / Afmaskning	Aus
Understregning / Afmaskningsindstilling...	
AF Mode	Dauernd/Zoom
Demo Mode...	Vario 3K
Gendan Bruger Indstillinger...	
Avancerede Indstillinger...	
Exit	

Drej midterknappen (zoom) mod venstre / højre for at navigere op og ned gennem menuen, eller for at ændre værdi eller indstilling. Ved at trykke på zoom knappen kan du vælge et menu emne eller godkende en indstilling.

Gå ud af menuen

Naviger til "esc" ved at dreje zoom knappen, og tryk på den for at godkende. Alternativt, kan den sorte knap under fjernbetjeningen aktiveres for direkte at fjerne menuen.

Gå ud af menu funktionen

Naviger til "esc" ved at dreje zoom knappen, og tryk på den for at godkende.

International Contact
Reinecker Vision GmbH

sales department, customer relations:

Sandwiesenstraße 19
DE-64665 Alsbach-Hähnlein

customer service:

Am Eichwald 14
DE-64665 Alsbach-Hähnlein

Tel.: +49 62 57-93 11-0

Fax: +49 62 57-25 61

E-Mail: info@reineckervision.com

www.reineckervision.com

In case service is necessary, please contact your authorized distributor.