


# Trykaflastende madrasser og siddepuder

---

## Brugsanvisning

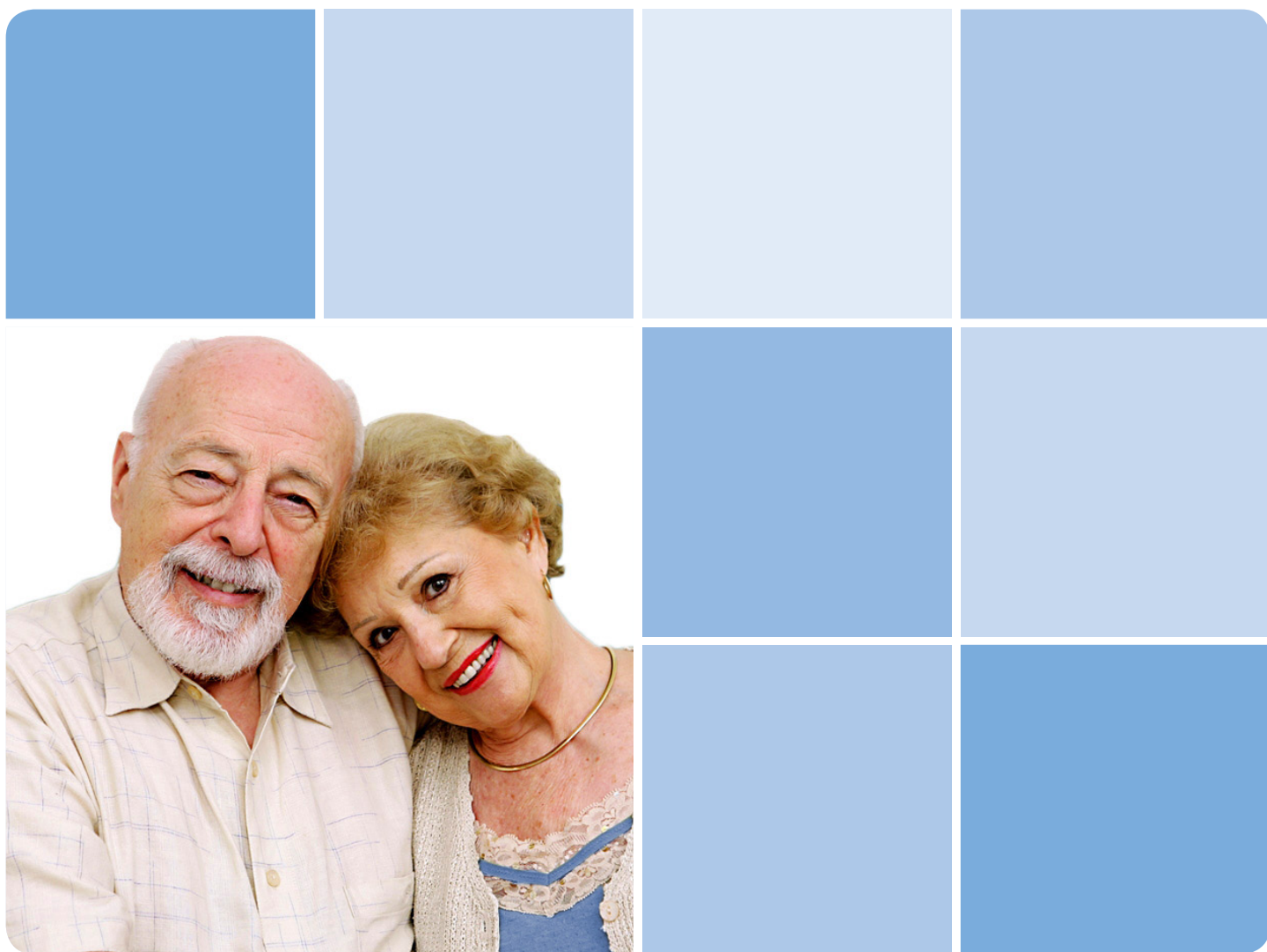

## Simonsen & Weel's - Trykaflastende madrasser og siddepuder

Simonsen & Weels madras- og siddepudeserie består af et stort udvalg af madrasser og siddepuder specielt udviklet til, og i samarbejde med, sundhedssektoren.

Madrasserne og siddepuderne er opbygget af flere lag, bestående af viskoelastisk og HR skum i forskellige hårheder. Sammensætningen af de mange forskellige skumtyper og hårheder giver mulighed for at opnå den optimale trykaflastning til specifikke behov. Viskoelastisk skum er et højteknologisk materiale udviklet af NASA. Det absorberer kroppens varme og former sig blidt efter kroppens konturer og giver således kroppen optimal støtte.

Skummets trykfordelende egenskaber giver en unik komfort og støtter kroppen til at få en korrekt anatomisk position. Madrasserne og siddepuderne minimerer preszoner via de trykaflastende egenskaber og har til formål at forebygge udviklingen af tryksår, som typisk opstår under længerevarende operationer, hvis personer er sengeliggende i længere tid, sidder i kørestol eller har nedsat mobilitet.

Betrækket er vores vandtætte og åndbare betræk, som hovedsageligt består af polyurethane. Madrasserne og siddepuderne er forsynet med et lysegråt antislip betræk i bunden som forhindrer dem i at skride. Det er to-vejs strækbart, for at mindske risikoen for shear og friktionsskader.

For at opnå en optimal hygiejne, er betrækket forsynet med en skjult lynlås, så dette kan tages af og rengøres. Derudover er madrasserne forsynet med håndtag, for at lette håndteringen af madrassen for plejepersonalet.

### Anvendelse

For at få fuldt udbytte af madrasserne og siddepudernes trykaflastende egenskaber, er det vigtigt, at disse anvendes korrekt. Som hovedregel gælder det, at alle produkter altid placeres med det lysegrå antislip betræk nedad, så dette ikke er i kontakt med patienten. For at sikre en korrekt placering er madrassen og siddepuderne er skummet og betrækket forsynet med et mærkat "denne side op".

Madrasserne og siddepuderne kan med fordel anvendes til patienter med tryksår i stadie 0-2 og til forebyggelsen af tryksår.

Har De spørgsmål til anvendelsen af Simonsen og Weels madrasser og siddepuder, kontakt venligst vores kundeserviceafdeling på telefon 7025 5610.

### Rengøring og vedligeholdelse

Undgå at skummet kommer i kontakt med større mængder væsker, da dette kan skade materialets trykaflastende egenskaber. Betrækket derimod kan aftørres og er testet med en lang række rengøringsmidler.

Overfladisk snavs på betrækket kan fjernes med en blød og fugtig klud med neutralt vaskemiddel.

Hvis en desinficering er nødvendig, kan et alkoholbaseret rengøringsmiddel anvendes efterfulgt af varmt vand og vaskemiddel.

En liste med godkendte vaske- og desinfektionsmidler er til rådighed. Egne vaske- og desinficeringsmidler kan anvendes, forudsat at producentens instruktioner følges. Dog anbefaler vi, at desinfektionsmidler som ikke fremgår af listen, testes inden brug.

Ved brug af normale vaskemidler må betrækket maskinvaskes ved max. 95 C.

Rengørings- og desinfektionsmidler baseret på opløsningsmiddel, blegemiddel, slibemidler eller høje (over 70%) alkoholkoncentrationer kan skade produktet.

Ordentlig tørring er væsentlig for vedligeholdelse. Betrækket kan lufttørres, centrifugeres eller tørretumbles. Betrækket må ikke rulles/vrides.

Betrækket kan autoklaveres ved 121 C i 20 min.



Vaskeanvisning forefindes på betrækkets inder- og ydersiden.



For at opnå den forventede levetid på 10 år på madrasserne, er det vigtigt at madrassen vendes jævnligt (gerne 3-4 gange om året). Derfor anbefaler vi, at madrassen vendes ved at bytte om på hovedende og fodende.

### **Transport, opbevaring og håndtering**

For at mindske risikoen for transportskader ved forsendelse af madrasserne og siddepuderne, bliver de pakket ind i plastik.

Såfremt madrasserne og siddepuderne ikke anvendes med det samme, anbefales det, at disse opbevares i den oprindelige indpakning for at beskytte dem mod eventuelle skader. Som hovedregel gælder det, at madrasserne og siddepuderne ikke må tvinges i en bestemt form, da dette kan beskadige materialet.

Udsættes madrasserne og siddepuderne for kulde medfører det, at det viskoelastiske skum bliver hårdere end normalt. Dette er helt naturligt - de vil genvinde deres normale hårdhed ved stuetemperatur.

### **Hygiejne og miljø**

Det vandtætte betræk og den skjulte lynlås medvirker til, at der ikke trænger væske ind under betrækket og muliggøre rengøring af betrækket.

Det er dog vigtigt, at personalet er opmærksomme på, at betrækket ikke får skader, da dette kan medføre, at der trænger væske ind under betrækket, hvor der så kan dannes bakterier og svamp. I disse tilfælde anbefales det, at betrækket udskiftes hurtigst muligt.

Skummet i madrasserne og siddepuderne er 100 % genanvendelige. Skummet granuleres og genbruges i andre produkter. Betrækket kan ikke genanvendes, men kan bortskaffes ved dagrenovation.

### **Brandsikkerhed**

Simonsen & Weels madrasser og siddepuder opfylder kravene til brandsikkerhed. De er testet iht. Centexbel BS 7175, Crib 5 el EN 597-1 & EN 597-2.

### **CE mærkning**

Alle Simonsen & Weels madrasser og siddepuder er CE mærket som medicinsk udstyr, klasse 1, og opfylder kravene i direktiv 93/42/EØF samt efterfølgende Bekendtgørelse nr. 409 af 27. maj 2003, Bekendtgørelse nr. 1268 af 12. december 2005 og Bekendtgørelse nr. 1263 af 15. december 2008 om medicinsk udstyr.

### **Garanti**

På alle Simonsen & Weels madrasser og siddepuder ydes der 3 års garanti på skum og betræk.

Garantien omfatter ikke skader på produktet som er opstået pga. forkert anvendelse eller vedligeholdelse. Desuden omfatter garantien ikke forventelige forandringer i produktets egenskaber (f.eks. normal slitage), som ikke har nogen væsentlig indflydelse på produktets trykafastende egenskaber.




Simonsen & Weel er Danmarks ældste leverandør af udstyr til den danske sundhedssektor med en historie tilbage til 1817. Vi forhandler produkter fra nogle af verdens førende producenter inden for områder som operationsudstyr, hospitals- og klinik-inventar, medicinsk teknik, kompressionsstrømper og ernæringsprodukter.

Vi er i dag omkring 50 ansatte, hvoraf de fleste arbejder ud fra hovedkontoret ved København. Heraf er størstedelen produktspecialister, som dækker hele

Danmark inklusive Færøerne og Grønland. Desuden har vi en kompetent kundeserviceafdeling samt en teknisk serviceafdeling med specialiserede medarbejdere inden for de enkelte fagområder.

Bo Simonsen  
Produktspecialist  
+45 2171 0084  
bos@sw.dk

Simonsen & Weel A/S  
Vejlegårdsvej 59  
2665 Vallensbæk Strand

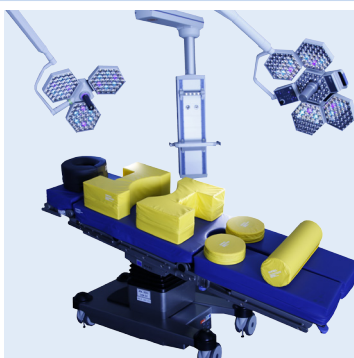

**Simonsen & Weel®**

Tel. 7025 5610 · Fax 7025 5620  
sw@sw.dk · www.sw.dk