








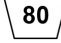
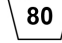
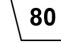
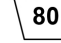
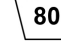
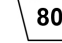
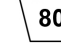










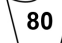
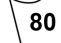
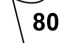
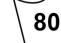
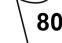














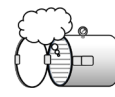
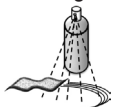



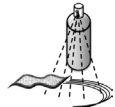












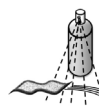

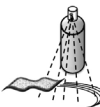

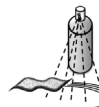

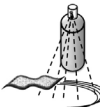




Produkt	Jay Lite	J2, J2 dyb, GS	Jay Easy Visco	Jay Soft Combi	Jay Xtreme Active	Jay Basic	Jay Balance Fluid/Luft
Ydre betræk (Luftcirkulerende og strækbart)							
(1). Maskinvask 70°C 							
Alternativ: Maskinvask 80°C i 10 min samt tørretumbling 	 i 10 min	 i 10 min	 i 10 min	 i 10 min	 i 10 min	 i 10 min	 i 10 min
Ydre betræk (Inkontinens)							
(1). Maskinvask 60°C 							
Alternativ: Maskinvask 80°C i 10 min samt tørretumbling 	 i 10 min	 i 10 min	 i 10 min	 i 10 min	 i 10 min	 i 10 min	 i 10 min
Indre betræk							
Spray og aftøringsdesinfektion  eller maskinvask 40°C (1) 	ikke relevant	ikke relevant	ikke relevant	ikke relevant	 	ikke relevant	 
Skumbase							
(2). Autoklave op til 105°C (1) 							
Spray og aftøringsdesinfektion 							
(3). Nedsænkingsdesinfektion 							
Pudeelementer							
Roho luftindsats (Spray og aftøringsdesinfektion) 	ikke relevant	ikke relevant	ikke relevant	ikke relevant	ikke relevant	ikke relevant	
Positioneringskomponenter (Spray og aftøringsdesinfektion) 	ikke relevant		ikke relevant	ikke relevant		ikke relevant	
Fluidindsats (Spray og aftøringsdesinfektion) 	ikke relevant		ikke relevant	ikke relevant		ikke relevant	
(1) Anbefalede temperaturer. (2) En autoklave er en selvåbende maskine, der steriliserer med damp under tryk. (3) Ved lav temperatur (< 30°C).							
Produktgarantien gælder ikke for produkter, der er beskadiget på grund af manglende overholdelse af disse rengøringsanvisninger eller brug af uegnede rengøringsmidler.							
Puder, positioneringselementer og betræk tåler rengøring i henhold til de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren.							
Anbefalede desinfektionsmidler							
Alle desinfektionsmidler der er anført og anbefalet af Robert Koch-instituttet: http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Desinfektionsmittel/Desinfektionsmittelliste.pdf?__blob=publicationFile							